



Veraflo™
Therapy



**U bent bekend met de
wetenschap achter 3M™
V.A.C.® Therapy.**



**Maak nu kennis met de data
achter de 3M™ Veraflo™ Therapy.**

Gebaseerd op recent gepubliceerde meta-analyse.

Starten met Veraflo Therapy: Hoe eerder, hoe beter.¹

Een meta-analyse van 13 vergelijkende onderzoeken bestaande uit 720 patiënten met een grote verscheidenheid aan wondtypen toonde een verbeterd effect bij gebruik van NPWTi-d ten opzichte van de controle.¹

Een systemische review en meta-analyse van vergelijkende onderzoeken door Allen Gabriel, MD, FACS en Paul Kim, DPM, MS in een publicatie van Plastic and Reconstructive Surgery 2021.

Veraflo Therapy* (NPWTi-d) was op de volgende eindpunten aanzienlijk gunstiger dan traditionele opties voor wondzorg, zoals V.A.C.[®] Therapie:



Wonden hadden **2,39 keer meer kans op sluiting** (p=0,01)¹



Bijna **twee keer zo snel klaar voor sluiting** (7,88 dagen versus 14,36 dagen, p=0,003)^{1,2}



Duur van therapie met meer dan de helft verminderd (9,88 dagen versus 21,8 dagen, p=0,02)^{1,2}

Ongeveer **1 debridement minder** (1,77 debridement versus 2,69, p=0,008)^{1,2}



4,4 keer meer kans op het verminderen van het aantal bacteriën (p=0,003)¹

Start met Veraflo Therapy om het genezingstraject een vliegende start te geven.¹

Feit

Gegevens hebben aangetoond dat er positieve klinische resultaten werden behaald bij wonden waarbij Veraflo Therapy is toegepast.

~26% van de patiënten waarbij debridement nodig is, zijn niet geschikt voor chirurgisch debridement.**

Feit

3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ wondverband is een geavanceerde optie voor wondreiniging* om niet-levensvatbaar weefsel aan te pakken wanneer chirurgisch debridement moet worden uitgesteld of niet mogelijk is.

Meer dan 90% van chronische wonden bevatten bacteriën en schimmels.³ De aanwezigheid van bacteriën in wonden kan de genezing vertragen.⁴

Feit

Wonden waarbij Veraflo Therapy is toegepast, hebben 4,4 keer meer kans om het aantal bacteriën te verminderen (p=0,003).¹

*Als onderdeel van goede klinische praktijken (bijv. systemische antibiotica, debridement).

**Op basis van 20 enquêtes onder artsen van ACS, ACOS & ASPS, 2015.

Algemene aanbevelingen van het panel.

Op basis van het consensusdocument over NPWT met instillatie uit 2020 door Paul Kim, DPM, MS et al. in een publicatie van International Wound Journal, moet op basis van gegevens en ervaring vroeg in de behandeling Veraflo Therapy worden overwogen.⁵

Geschikte wondkenmerken:

- ▶ Schone wonden;
- ▶ Goed gereinigde en gedebrideerde wonden;
- ▶ Wonden met veel bioburden;
- ▶ Besmette/geïnfecteerde wonden;
- ▶ Wonden die moeilijk granuleren.

Behandelingsinstellingen:

- ▶ NPWT-tijd: 2–3 uur;
- ▶ Inweektijd: 10 minuten;
- ▶ NPWT-instelling: -125 mmHg;
- ▶ Vloeistof: zoutoplossing (of overige toepasbare oplossingen);
- ▶ Wondverband: 3M™ V.A.C. Veraflo™ wondverband tenzij er niet-levensvatbaar weefsel aanwezig is. Overweeg V.A.C. Veraflo Cleanse Choice wondverband als geavanceerde optie voor wondreiniging voor chirurgisch debridement of wanneer debridement moet worden uitgesteld of niet mogelijk is.

Stop met de behandeling wanneer de klinische doelen zijn bereikt.



Veraflo Therapy wordt ondersteund door een meta- analyse met positieve klinische resultaten. Beoordeel zelf wat behandeling met Veraflo voor uw patiënten en praktijk kan betekenen. Begin slim.



Bestelinformatie voor Veraflo Therapy

3M™ V.A.C.® Ulta™ Therapy Unit	Landspecifieke artikelnummers
3M™ V.A.C. Veraflo™ wondverband, small, 5 stuks	ULTVFL05SM*
3M™ V.A.C. Veraflo™ wondverband, medium, 5 stuks	ULTVFL05MD*
3M™ V.A.C. Veraflo™ wondverband, large, 5 stuks	ULTVFL05LG*
3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™ wondverband, medium, 5 stuks	ULTVCL05MD*
3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ wondverband, medium, 5 stuks	ULTVCC05MD*
3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ wondverband, large, 5 stuks	ULTVCC05LG*
3M™ V.A.C. Veralink™ cassette, 5 stuks	ULTLNK0500
3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ slangenset, 5 stuks	ULTDUO0500
Opvangbeker van 500 ml met gel voor gebruik met het 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy System, doos met 5 stuks	M8275063/5
Opvangbeker van 500 ml met gel voor gebruik met het 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy System, doos met 10 stuks	M8275063/10
Opvangbeker van 1000 ml met gel voor gebruik met het 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy System, doos met 5 stuks	M8275093/5

*Voeg, voor Scandinavische landen, /NSP toe achter het onderdeelnummer.

Referenties:

1. Gabriel A, Camardo M, O'Rorke E, Gold R, Kim PJ. Effects of Negative-Pressure Wound Therapy With Instillation versus Standard of Care in Multiple Wound Types: Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *Plast Reconstr Surg*. 2021 Jan 1;147(1S-1):68S-76S. doi: 10.1097/PRS.00000000000007614. PMID: 33347065.
2. Camardo, Mark. „Veraflo Meta-Analysis Standardized and Non-Standardized Means.“, 3M Internal Report, San Antonio, Texas, 2020.
3. Attinger C, Wolcott R. Clinically Addressing Biofilm in Chronic Wounds. *Adv Wound Care*. 2012;1(3):127-132. doi:10.1089/wound.2011.0333.
4. Kingsley A. The wound infection continuum and its application to clinical practice. *Ostomy Wound Manage* 2003;49:1-7.
5. Kim PJ, Attinger CE, Constantine T, Crist BD, Faust E, Hirche CR, et al. Negative pressure wound therapy with instillation: international consensus guidelines update. *Int Wound J*. 2020 Feb;17(1):174-186.

Opmerking Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.



Distributed by:
GDM B.V.
Hastelweg 224
NL- 5652 CL Eindhoven
www.gdmedical.nl

© 2022 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M oder andere gezeigte Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken. Nichtautorisierte Verwendung ist untersagt.
3M Marken werden in Kanada unter Lizenz verwendet. PRA-PM-BE-00074 (03/22). OMG295787