
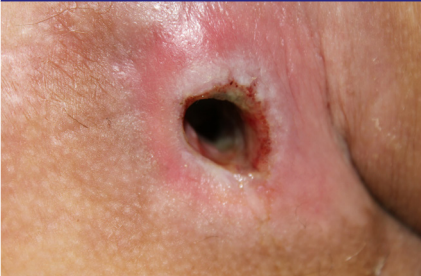


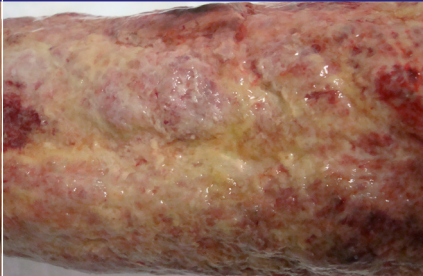


3M™ V.A.C. Veraflo™ Dressing Selectiegids

Deze gids kan worden gebruikt bij het bepalen welk wondverband u gaat gebruiken in combinatie met 3M™ Veraflo™ Therapy.

	3M™ V.A.C. Veraflo™ Dressing - Small/Medium	3M™ V.A.C. Veraflo™ Dressing - Large	3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™ Dressing	3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Dressing
Wond-types				
Wond-kenmerken	Open wonden, waaronder wonden met oppervlakkige ondermijningen of tunnelgebieden waarbij het distale aspect zichtbaar is	Grote open wonden, waaronder wonden met oppervlakkige ondermijningen of tunnelgebieden waarbij het distale aspect zichtbaar is	Diepe wonden of wonden met complexe vormen	Wonden met dik fibrineus exsudaat, dood weefsel, infectieus materiaal en andere vormen van bioburden in wonden.
Belangrijkste therapiedoel(en)	• Bij gebruik in combinatie met Veraflo Therapy om het verwijderen van infectieus materiaal en andere vormen van bioburden in wonden te vergemakkelijken • Aanmaak van robuust granulatieweefsel.	• Bij gebruik in combinatie met Veraflo Therapy om het verwijderen van infectieus materiaal en andere vormen van bioburden in wonden te vergemakkelijken • Aanmaak van robuust granulatieweefsel in grote wonden.	• Bij gebruik in combinatie met Veraflo Therapy om de therapie te starten en het verwijderen van infectieus materiaal en andere vormen van bioburden in wonden te vergemakkelijken • Eenvoudig aanbrengen in tunnels en ondermijningen.	• Bij gebruik in combinatie met Veraflo Therapy om de therapie te starten en het verwijderen van infectieus materiaal, zoals dik fibrineus exsudaat, dood weefsel en andere vormen van bioburden in wonden te vergemakkelijken • Biedt een optie voor wondreiniging voor klinici wanneer chirurgisch debridement moet worden uitgesteld of niet mogelijk of gepast is.¹

3M™ V.A.C. Veraflo™ Dressing Selectiegids

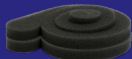	3M™ V.A.C. Veraflo™ Dressing - Sm/Md 	3M™ V.A.C. Veraflo™ Dressing - Large 	3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™ Dressing 	3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Dressing 
Artikelnummer	Small - ULTVFL05SM Medium - ULTVFL05MD	ULTVFL05LG	ULTVCL05MD	Medium - ULTVCC05MD Large - ULTVCC05LG
Vorm	Spiraalvormig foam	Blokvormig foam dat vooraf in twee lagen is gesplitst	Buisvormig	Blokvormig foam dat vooraf in drie lagen is gesplitst
Aanbreng-kenmerken	Eenvoudig aanbrengen: - Op maat maken zonder schaar - Voorgeknipt gebied voor het aanbrengen van de pad bij gebruik voor overbrugging - Aanbrengen met één pad	Eenvoudig aanbrengen: - Ideaal voor grote, ondiepe oppervlakken - Geleverd met 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ Tube Set voor extra oppervlaktebedekking	Flexibiliteit bij aanbrengen: - Ideaal voor het behandelen van wonden met complexe vormen (bijv. tunnels, ondermijningen en circulaire toepassingen) - Aanbrengen met één pad	Eenvoudig aanbrengen met flexibiliteit: - Dunne lagen voor betere aanpasbaarheid - Meerdere lagen bieden aanbrengopties voor wonden met verschillende diepten - Ideaal voor vuile wonden waarbij onmiddellijk actieve therapie nodig is - Aanbrengen met één of twee kompressen
Kenmerken van het wondverband	Small: 11,2 × 7,7 × 1,8 cm per stuk (2 stuks spiraalvormig) - Elk stuk uitgerold 24 cm - Elk stuk een 18 cm lange brug - 2 stuks 3M™ V.A.C.® Advanced Drape - 1 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad - 1 maal 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - 1 wegwerplinaal/label met hoeveelheid foam Medium: 17,4 × 14,7 × 1,8 cm per stuk (2 stuks spiraalvormig) - Elk stuk uitgerold 80 cm - Elk stuk een 74 cm lange brug - 3 stuks 3M™ V.A.C.® Advanced Drape - 1 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad - 2 maal 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - 1 wegwerplinaal/label met hoeveelheid foam BEREIK INSTELPUNT FILL ASSIST (VULHULP) Small: 12–80 ml (1 stuks) 26–160 ml (2 stuks) Medium: 38–240 ml (1 stuks) 80–450 ml (2 stuks)	25,6 × 15,0 × 1,6 cm per stuk (ovaal – 2 stuks) - 5 stuks 3M™ V.A.C.® Advanced Drape - 1 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ Pad - 4 maal 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - 1 wegwerplinaal/label met hoeveelheid foam BEREIK INSTELPUNT FILL ASSIST (VULHULP) 55–350 ml (1 stuks) 110–500 ml (2 stuks)	1 elke opgerolde spiraal (61 × 3,2 cm diameter), - 3 stuks 3M™ V.A.C.® Advanced Drape - 1 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad - 2 maal 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - 1 wegwerplinaal/label met hoeveelheid foam BEREIK INSTELPUNT FILL ASSIST (VULHULP) 65–130 ml (1/2 spiraal) 130–250 ml (hele spiraal)	Medium: 18,0 × 12,5 cm x variabele dikte (0,8–1,6 cm) - 4 stuks 3M™ V.A.C.® Advanced Drape - 1 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad - 4 maal 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - 1 wegwerplinaal/label met hoeveelheid foam Large: 25,6 × 15,0 cm x variabele dikte (0,8–1,6 cm) - 6 stuks 3M™ V.A.C.® Advanced Drape - 1 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ Pad - 5 maal 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - 1 wegwerplinaal/label met hoeveelheid foam INDICATIE VULVOLUME Medium: 85 ml (afdeklaag van 1,6 cm); 42 ml (afdeklaag van 0,8 cm); 24 ml (wondcontactlaag van 0,8 cm) Large: 150 ml (afdeklaag van 1,6 cm); 75 ml (afdeklaag van 0,8 cm); 42 ml (wondcontactlaag van 0,8 cm)



OPMERKING: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

© 2021 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik niet toegestaan. PRA-PM-NL-00087 (06/21)

