


**3M**

**ACTIV.A.C.™**  
Système de Thérapie

Guide de référence rapide

Mode de l'écran  
Date actuelle  
Heure actuelle

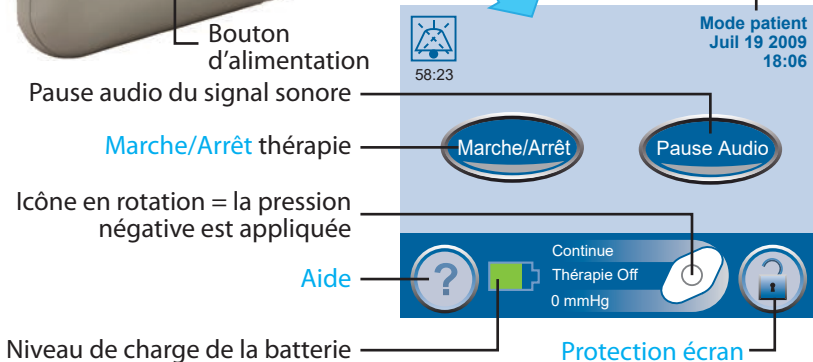

## Avant utilisation de l'unité de thérapie ACTIV.A.C.™

Passer en revue ce guide de référence rapide. Conserver ce guide dans la poche de la sacoche de transport de l'unité de thérapie.

Passer en revue le manuel d'utilisation avec votre médecin ou votre infirmier.

**Passer en revue la fiche d'informations de sécurité avec votre médecin ou votre infirmier. Conserver également cette fiche dans la poche de la sacoche de transport de l'unité de thérapie.**

Se reporter au manuel d'utilisation pour consulter la foire aux questions à propos de l'unité de thérapie ACTIV.A.C.™.

**En cas d'urgence, contacter votre médecin ou composer votre numéro de contact local d'urgence.**

## Démarrage du système de thérapie V.A.C.®

Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant environ deux secondes pour mettre l'unité de thérapie sous ou hors tension.



Appuyer sur ce bouton pour démarrer ou arrêter la thérapie.

Vert = système sous tension  
Gris = système hors tension

## Écran de confirmation

Un écran de confirmation s'affiche lorsque l'appareil détecte que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre. L'écran est accompagné d'un signal sonore.



Appuyez sur **Oui** pour éteindre l'appareil. Appuyez sur **Non** pour retourner à l'écran d'*accueil*.

## Retrait du réservoir



Appuyer sur la languette de libération du dispositif d'enclenchement du réservoir.

Retirer le réservoir de l'unité de thérapie en tirant dessus.

## Mise en place du réservoir



Faire glisser le réservoir par-dessus le guide du dispositif d'enclenchement du réservoir.

Ne pas tordre ni tourner le réservoir.

Presser fermement le réservoir contre l'unité de thérapie jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

## Alertes et alarmes

Pour obtenir des informations détaillées, se reporter au manuel d'utilisation.



**Manufactured For:**  
KCI USA, Inc.  
12930 IH 10 West  
San Antonio, TX 78249  
USA  
1-800-275-4524 (États-Unis uniquement)  
<https://hcbgregulatory.3m.com>

**KCI** fait désormais partie de 3M



KCI Manufacturing  
IDA Business & Technology Park  
Dublin Road, Athlone,  
Co. Westmeath, Ireland

© Copyright 2020 3M. Tous droits réservés.  
3M, ACTIV.A.C. et les autres marques affichées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation non autorisée interdite.  
418439-FR Rev B 6/2020