



DIATESSE XPER

Bloedglucose- en ketonenmeter



Diatesse XPER wordt vergoed door alle zorgverzekeraars

Vertrouwen op nauwkeurige resultaten

Diatesse XPER is een zeer gebruiksvriendelijke en nauwkeurige glucosemeter. Deze meter wordt geleverd in een zeer compleet en betaalbaar startpakket met hierin ook 10 teststrips/10 lancetten, prikpen en een bewaaretui. Naast glucose heeft deze meter ook de mogelijkheid ketonen te meten. Diatesse ketonen teststrips zijn apart verkrijgbaar.

Belangrijkste eigenschappen

- Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de Diatesse XPER een nauwkeurigheid behaalt van $\pm 10\%$. In Nederland ligt deze norm op 15%.
- Duidelijk, groot en verlicht display.
- Eenvoudig in gebruik.
- Bluetooth® en USB-datakoppeling.
- Strip-uitwerpfunctie.
- Optioneel: maaltijdmarkering.
- Breed hematocrietbereik (0-70 L/L).

Aanvullende voordelen:

- Handleiding in 4 talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans.
- Gebruikersvideo's in 7 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Arabisch en Pools.

Glucose teststrip

Deze unieke strip heeft de volgende voordelen:

- Diatesse XPER teststrips zijn houdbaar tot aan het einde van de vervaldatum; veel andere teststrips zijn na opening beperkt houdbaar.
- Prettig voor mensen met een mindere motoriek door makkelijk te hanteren formaat.
- Klein bloedmonster nodig (0,5 µl), binnen 5 seconden meetresultaat.
- Betrouwbare resultaten, doordat er geen interferentie (beïnvloeding) is van medicatie op de glucosewaarden.



GD101422

Voor wie?

- Mensen met diabetes die weinig hoeven meten, vanwege de lange houdbaarheid van de teststrips.
- Mensen met diabetes die juist veel moeten meten of deze meter gebruiken om te kalibreren, vanwege de nauwkeurige resultaten.
- Ook geschikt voor neonataal en dialyse-patiënten vanwege het brede hematocrietbereik (0-70 L/L).

Wanneer ketonen meten?

Mensen met diabetes type 1 hebben door een tekort aan insuline een grotere kans op het krijgen van verzuring van het bloed, zogeheten ketoacidose. Het advies is altijd een zorgprofessional te raadplegen, aangezien dit tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Mensen met diabetes type 2 hebben vaak als doel af te vallen door weinig koolhydraten te eten. Men wil in een vetverbrandingsfase terecht komen (ketose). Deze fase is te controleren door ketonenwaarden te meten.



GlucoCheck App

De GlucoCheck App is via Bluetooth te koppelen aan een smartphone (IOS/Android), zodat alle meetresultaten op een overzichtelijke wijze worden getoond.

Ook is er een software-programma (MyLink) te downloaden via www.diatesse.nl.

Met een micro USB-kabel en via Bluetooth zijn de meetgegevens te exporteren naar de pc.



direct naar
Support-pagina



Indien er vragen zijn, neem dan gerust contact op met
de afdeling Customer Service via e-mail: diatesse@gdmedical.nl

Zie website www.diatesse.nl voor meer informatie,
gebruikersvideo's en een overzicht van de veelgestelde vragen .



Distributeur:
GD Medical
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven
(Tel) +31 (0)40 3031099