


Instructie voor aanbrengen van V.A.C.® Dressings

Voor wonden zonder blootliggende vaten, organen, pezen en zenuwen

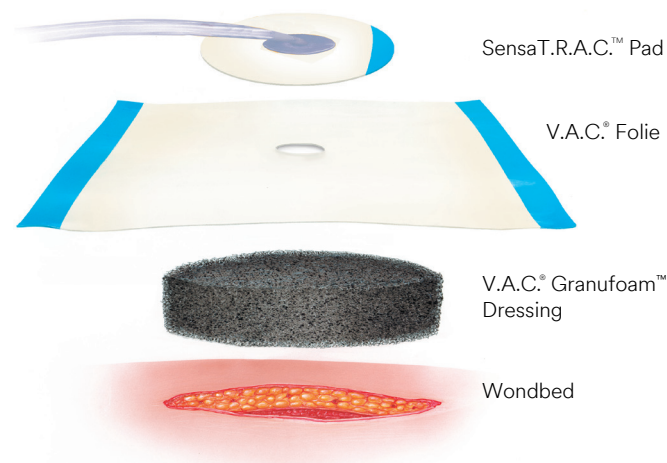


Instructies voor gebruik en veiligheid: Dit is een korte instructie waarin de basis stappen van het aanbrengen van V.A.C.® Dressings worden uitgelegd. Zoals met elk apparaat, is het belangrijk om de gedetailleerde instructies voor het gebruik en veiligheid te lezen en te begrijpen (met inbegrip de informatie over blootgestelde vaten, organen, pezen, zenuwen, en infectie) van toepassing zijnde op uw V.A.C.® Therapy Unit en het aanbrengen van V.A.C.® Dressings.

Vragen en informatie: Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar specifieke informatie welke gevonden kan worden bij de therapie unit, in het karton van de V.A.C.® dressings of in de V.A.C.® Therapy klinische richtlijnen. Deze bronnen geven informatie over de correcte toepassing van alle V.A.C.® Therapy Dressings waaronder geavanceerde toepassingen en technieken. Voor vragen over het product kunt u contact opnemen met uw account manager of kijken op gdmedical.nl of gdmedical.be

Opmerking: Specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie bestaan voor 3Mproducten en therapieën. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing voor het aanbrengen. De informatie is bedoeld voor zorgprofessionals.


©2008 Alle rechten voorbehouden. Alle hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van KCI Licensing, Inc, haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers. DSL#15-0287.NL (Rev. 6/15)

Stap 1 - Beoordeel type wond en afmeting

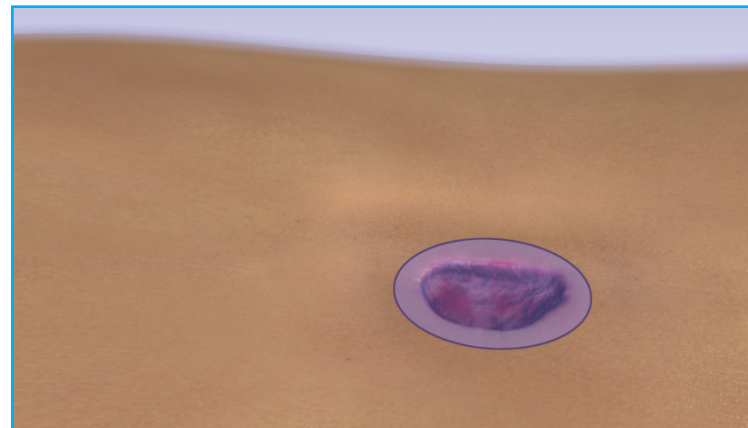

Bereid het wondbed voor.


Stap 2 - Knip het foam op maat

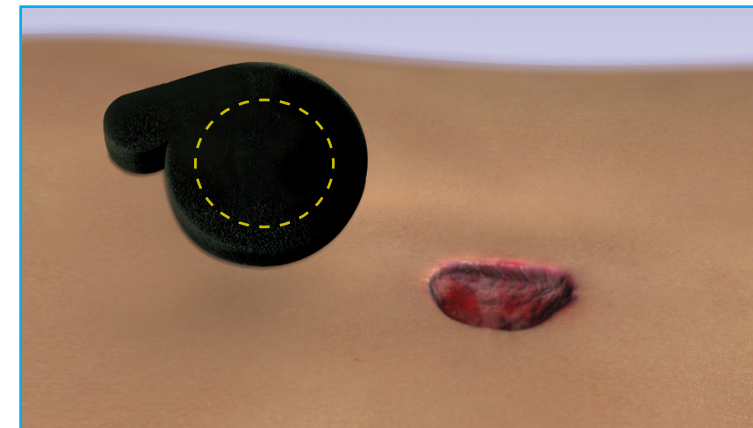

Knip het foam niet boven de wond om te voorkomen dat foam deeltjes in de wond terecht komen.


Het spiraalvormige V.A.C.® Granufoam™ kan gemakkelijk op maat worden gebracht. Hier is geen schaar voor nodig.

Stap 3 - Plaats het verband in de wond

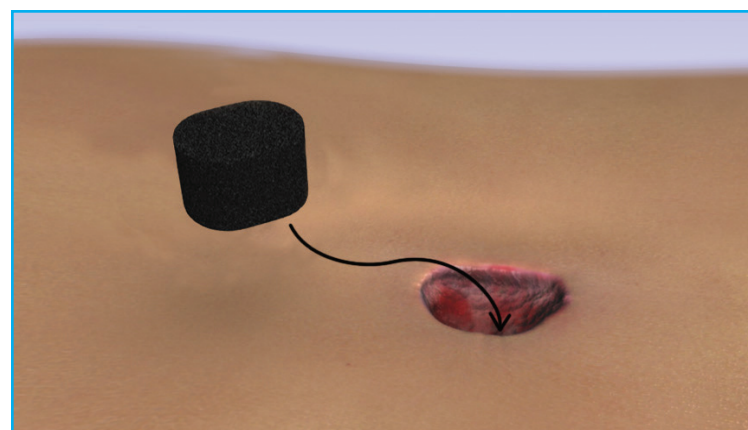


Noteer het aantal stukken foam dat in de wond wordt gebruikt.

Stap 4 - Knip V.A.C.® Therapy folie op maat

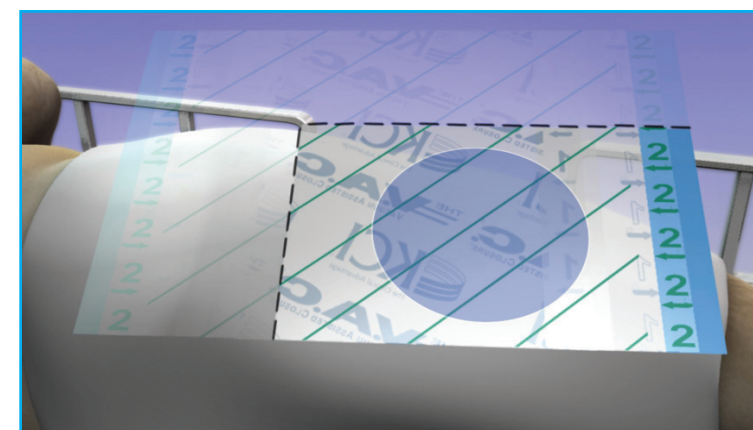


Verwijder één kant van laag 1 en plaats met de plaklaag naar beneden over de wond. Verwijder de rest van laag 1, de groen gestreepte laag en de blauwe strookjes.

Stap 5 - Aanbrengen SensaT.R.A.C.™ Pad

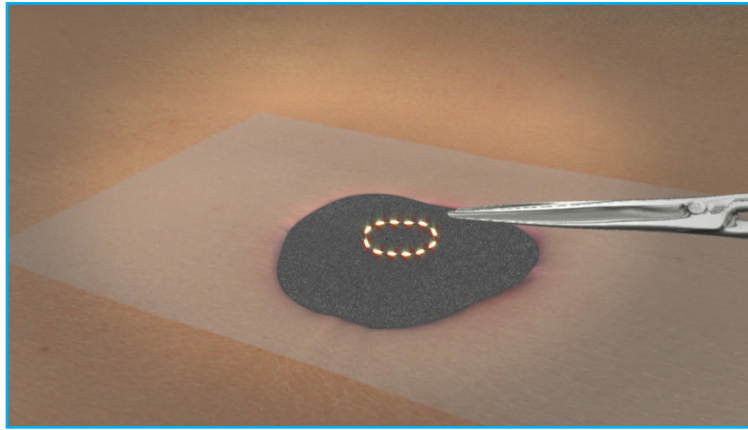


Bepaal plaats voor de SensaT.R.A.C.™ Pad.

Stap 6 - Knijp in de folie, trek omhoog en knip een rond gat van 2.5 cm

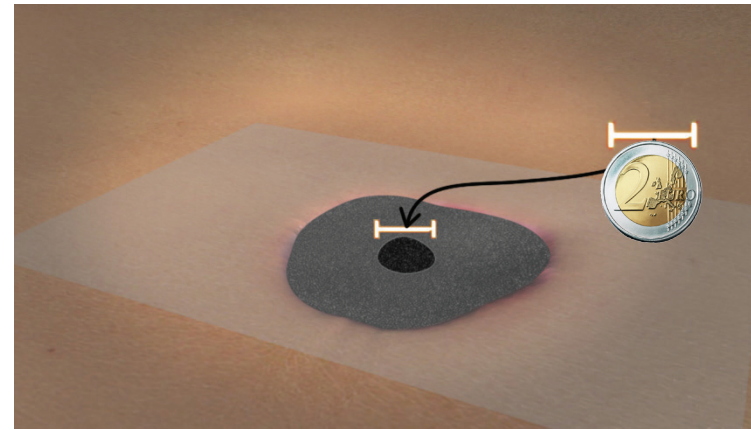


Een goede referentie voor de grootte is een 2 euro muntstuk.

Stap 7 - Verwijder kleeflaag 1 en 2 van de SensaT.R.A.C.™ Pad

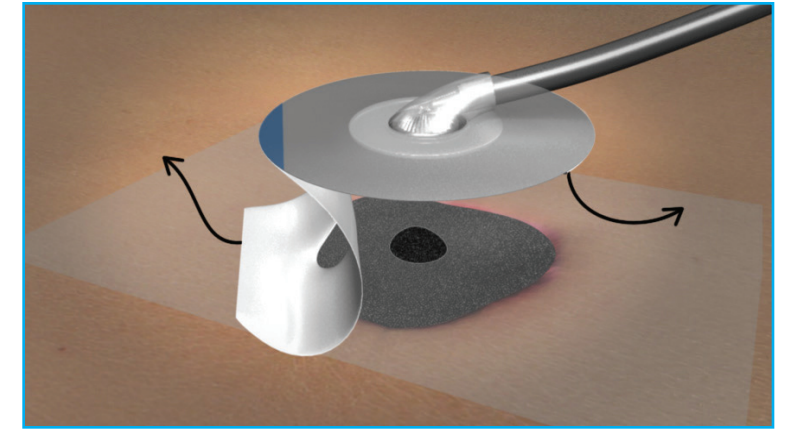

Stap 8 - Plaats de SensaT.R.A.C.™ Pad opening direct boven het gat

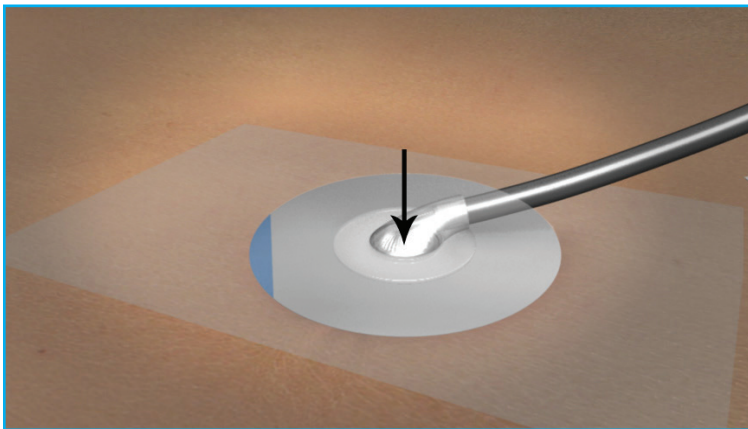


Verwijder de blauwe stabilisatie laag. Noteer de datum en het aantal stukken foam in het patiëntendossier.

Stap 9 - Koppel de SensaT.R.A.C.™ Pad aan de slang van de opvangbeker



Stap 10 - Zet de V.A.C.® Therapy Unit aan

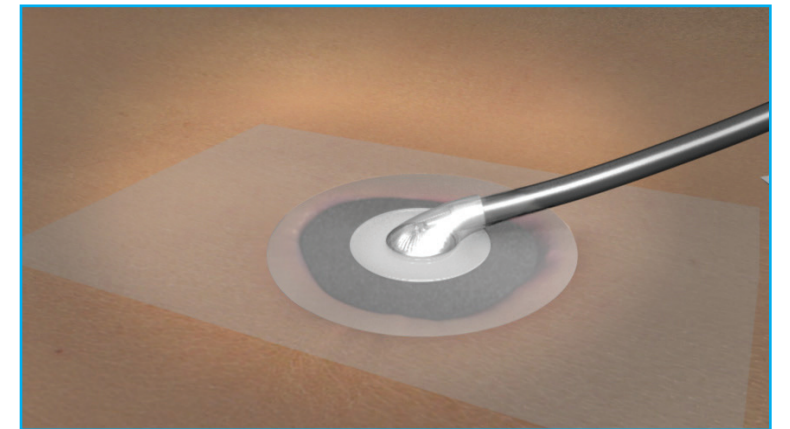

Stel de voorgeschreven therapie-instellingen in om de therapie te starten.

Neem voor meer informatie contact op met GD Medical; customerservice@gdmedical.nl of customerservice@gdmedical.be