

ACTISORB™ SILVER 220

ACTIVATED CHARCOAL DRESSING WITH SILVER

Verberg niet
de geur pak de
oorzaak aan



WAT IS HET?

ACTISORB™ Silver 220 is een verband met actieve koolstof en zilver in een niet-klevend nylon omhulsel.



Bestrijding van onaangename geur

ACTISORB™ Silver 220 gaat onaangename luchtjes van wonden tegen en verbetert zo de kwaliteit van leven van de patiënt¹⁻⁴.



Antimicrobiële werking


ACTISORB™ Silver 220 treedt effectief op tegen 150 micro-organismen die kunnen leiden tot wondinfectie⁵, waaronder MRSA en VRE^{1,3}.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

Vóór aanbrengen


Raadpleeg altijd de instructies voor uitgebreide informatie. Kies een maat ACTISORB™ Silver 220 die iets groter is dan de wond. Bereid de wond voor volgens het desbetreffende wondbehandelingsprotocol. Controleer of eventueel necrotisch weefsel is verwijderd door debridement alvorens het verband aan te brengen.

Verband voorbereiden

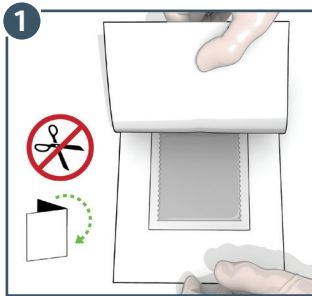


1. Neem het verband voorzichtig uit de verpakking. Werk hierbij aseptisch en gebruik een pincet.
2. Indien nodig kan het verband op maat worden gevouwen voor de vorm van de wond.
ACTISORB™ Silver 220 mag niet op maat worden geknipt, anders kunnen er mogelijk deeltjes actieve koolstof in de wond terechtkomen die verkleuring veroorzaken.

Verband aanbrengen

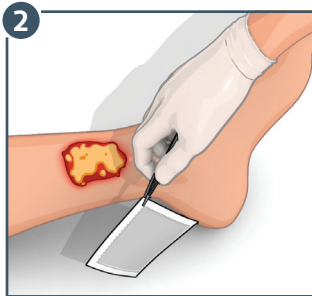

1. Breng **ACTISORB™ Silver 220** voorzichtig aan over de wond. Beide zijden van **ACTISORB™ Silver 220** kunnen op de wond worden geplaatst.
Het verband is het meest effectief als **ACTISORB™ Silver 220** rechtstreeks contact maakt met de wond.

Secundair verband aanbrengen

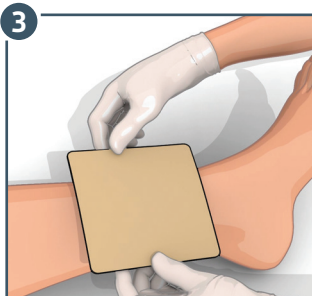

1. Dek **ACTISORB™ Silver 220** af met een secundair verband, bijvoorbeeld **KERRAFOAM GENTLE BORDER™**. Kies het secundaire verband op basis van de hoeveelheid exsudaat. Indien nodig kan het verband op zijn plaats worden gehouden om het aanbrengen te vereenvoudigen.

Verband vervangen of verwijderen



1. **ACTISORB™ Silver 220** mag tot zeven dagen op de wond blijven zitten, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat. Het absorberende secundaire verband kan worden vervangen wanneer dat nodig is.
2. Verwijder het secundaire verband voorzichtig.
3. Verwijder **ACTISORB™ Silver 220** voorzichtig van het wondbed en gooi het weg.


GEBRUIKSINDICATIES

ACTISORB™ Silver 220 is geïndiceerd voor de behandeling van bacteriële besmetting, infecties of geurtjes bij verschillende soorten wonden, waaronder:

- Drukulcera
- Ulcera op het been met verschillende oorzaken
- Diabetische ulcera op de voet
- Ulceratieve tumoren
- Traumatisch letsel en operatiewonden waarbij bacteriële besmetting, infectie of een onprettige geur optreedt



ACTISORB™ Silver 220 is geschikt voor gebruik onder een drukverband⁶.

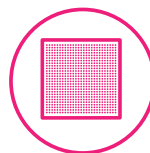

ACTISORB™ Silver 220 kan worden gebruikt in combinatie met een niet-klevende primaire contactlaag, zoals ADAPTIC TOUCH™.

Grootste
onderzoek naar
wondzorg ooit

Bij
94,8%

van de 12.444 patiënten
is er sprake van genezing
of verbetering van
de wond^{7,8}

Afmetingen	Verband per doos	Product code
6,5cm x 9,5cm	10	MAS065
10,5cm x 10,5cm	10	MAS105
10,5cm x 19cm	10	MAS190

Neem voor meer informatie over de voordelen van ACTISORB™ Silver 220 contact op met uw account manager bij GD Medical of kijk op gdmedical.nl

Referenties

1. Jackson, L. Use of a charcoal dressing with silver on an MRSA-infected wound. B J Comm Nursing 2001;19:26. 2. Hampton, S., Actisorb Silver 220: a unique antibacterial dressing. J Comm Nursing, 2002; 17:19. 3. Leak, K. PEG site infections: a novel use for Actisorb Silver 220. British J Comm Nursing, 2002; Vol. 7(6): 321-325. 4. Leak, K. Changing wound care practice: management of percutaneous endoscopic gastrostomy sites. Case Studies. 2003. 5. Rennison et al. Antimicrobial efficacy of silver impregnated activated charcoal wound dressing. Poster, ETRS 2003. 6. International case series: Using ACTISORB™: Case Studies. London: Wounds International, 2012. 7. Stadler, R. and Wallenfang, K. Survey of 12444 patients with chronic wounds treated with charcoal dressing (ACTISORB™). Aktuelle Dermatologie 2002, 28(10): 351-354. 8. Morrison, L. Et al. The effect of a silver impregnated activated charcoal dressing on delayed-healing wounds: - analysis of open, multi-center, observational studies. Poster, 2002.

©2016 Systagenix Wound Management IP Co B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken die hierin worden aangeduid zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Systagenix Wound Management IP Co B.V., de aangesloten bedrijven en / of licentiegevers.
5259/SYS/NL/0816/PRBC1250/2331