

# Comfortabel eenvoudig aanbrengen en verwijderen



## WAT IS HET?

ADAPTIC™ DIGIT niet klevend verband voor de vinger, is gemaakt van een unieke, klevende, met siliconen gecoate contactlaag met daaromheen een buisvormig verband. Het is specifiek ontworpen voor het verbinden van vingers en tenen.



### Comfortabel

ADAPTIC™ DIGIT verkleeft niet aan de wond. Het vormt zich naar de contouren en is geen dik verband, waardoor maximale flexibiliteit van de vinger behouden blijft.



### Eenvoudig aanbrengen en verwijderen


ADAPTIC™ DIGIT is snel en eenvoudig aan te brengen; geen applicator of schaar nodig. Te verwijderen zonder achterlaten van restjes in de wond, minimaliseert trauma<sup>1</sup>.

# GEBRUIKERSGIDS

## VÓÓR AANBRENGEN


Raadpleeg de gebruiksinstructies. Selecteer de juiste maat ADAPTIC™ DIGIT afhankelijk van de grootte van de vinger of teen. Pas wondbedpreparatie toe volgens het geldende protocol. Zorg dat de omringende huid van de wond droog is. Pak een ADAPTIC™ DIGIT verband uit het doosje.

### Verband voorbereiden

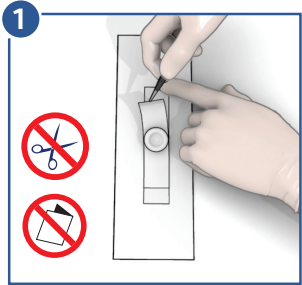


1. Verwijder op een aseptische manier de twee zijdes van de verpakking.
2. Verwijder de glanzende strip op de achterzijde van **ADAPTIC™ DIGIT**.

### Verband aanbrengen

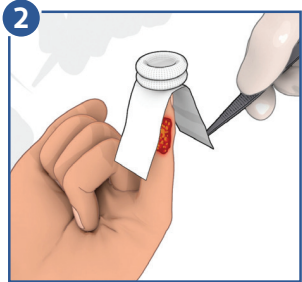

1. Breng de primaire niet verklevende siliconenlaag aan over het topje van de vinger en vervolgens voorzichtig over de aangedane huid.
2. Rol de onderste laag verband naar beneden over de siliconen contactlaag (en secundair verband indien nodig).
3. Rol vervolgens de andere verbandlaag naar beneden voor een dubbele beschermlaag.

### Verband wisselen en verwijderen

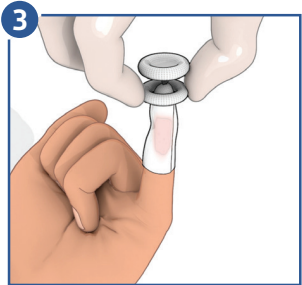

- De frequentie van verbandwissels wordt gedaan aan de hand van het wondzorgprotocol en zal afhangen van de conditie van de wond. **ADAPTIC™ DIGIT** mag een aantal dagen blijven zitten.
1. Rol voorzichtig de bovenste ring van het buisvormig verband naar boven en herhaal dit voor de andere ring.
  2. Verwijder voorzichtig de niet verklevende wondcontactlaag van het wondbed en gooi het verband weg.

### Ook beschikbaar voor tenen



# WANNEER GEBRUIKEN

ADAPTIC™ DIGIT verband is geïndiceerd voor de behandeling van een variëteit aan eenvoudige tot ernstige verwondingen aan vingers en tenen, zoals:

- Laceraties en schaafwonden
- Traumatische verwondingen
- Nageextracties
- Hechtingen

ADAPTIC™ DIGIT kan zowel als primair of secundair verband worden gebruikt<sup>2</sup>.

Goed om te weten...

In een klinische studies vond

**96%**

van de patiënten ADAPTIC™ DIGIT eenvoudig tot zeer eenvoudig te verwijderen<sup>1</sup>

ADAPTIC™ DIGIT		
Afmeting	Aantal verbanden per doos	Systagenix code
Small 2cm Ø	10	MAD003
Medium 2.4cm Ø	10	MAD013
Large 2.8cm Ø	10	MAD023
Extra large 3cm Ø	10	MAD042

ADAPTIC™ DIGIT TOE		
Afmeting	Aantal verbanden per doos	Systagenix code
2.8cm Ø	10	MAD062

Om meer te weten te komen over de voordelen van ADAPTIC™ DIGIT kunt u contact opnemen met uw account manager bij GD Medical of kijken op [gdmedical.nl](http://gdmedical.nl)