



BIOSORB™ Gelling Fibre Dressing
Denk vooruit


GEBRUIKERSHANDLEIDING

Vóór het aanbrengen

Raadpleeg de gebruiksinstructies.


Maak de wond voorzichtig schoon. De huid rondom de wond moet schoon en droog zijn. Haal de verpakking uit de doos.

Het wondverband voorbereiden

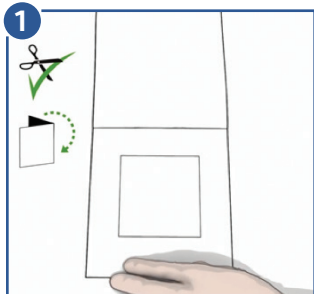


1. Bepaal de afmetingen van het wondverband en knip het wondverband zo nodig op maat. Houd er rekening mee dat het wondverband de wondranden met ongeveer 1 cm moet overlappen. Houd het product van de wond verwijderd terwijl u het op maat knipt.

Het wondverband aanbrengen

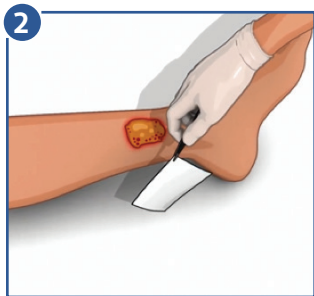


1. Plaats het wondverband op de vochtige wond, waarbij het wondverband de wondranden ongeveer 1 cm overlapt. Als er slechts een kleine hoeveelheid exsudaat aanwezig is, maak het wondverband dan vochtig met een steriele fysiologische zoutoplossing (0,9%).
2. Gebruik voor diepe wonden de streng-variant. Duw het wondverband met lichte druk in de wond, en laat het wondverband met ongeveer 2,5 cm uitsteken, zodat het gemakkelijk kan worden verwijderd.

Een secundair wondverband aanbrengen

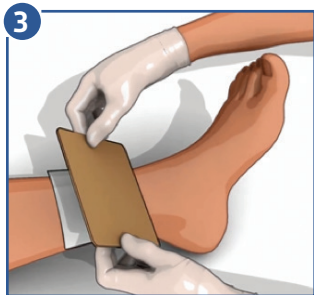

1. Breng een geschikt secundair wondverband aan om het product op zijn plaats te houden.

Verbandwisseling en verwijdering

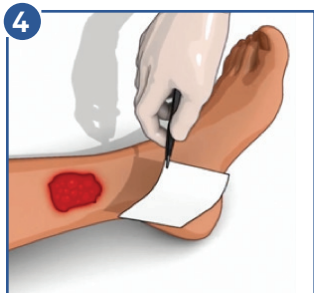

1. Het wondverband moet worden verwisseld wanneer dit medisch geïndiceerd is (bijv. wanneer het wondverband zijn maximale absorptiecapaciteit heeft bereikt of wanneer het wondprotocol voorschrijft dat een verbandwisseling noodzakelijk is). De interval tussen verbandwisselingen mag niet langer zijn dan 7 dagen.
2. Mocht het wondverband vastkleven aan een wond met kleinere hoeveelheden exsudaat, maak het dan vochtig met een steriele fysiologische zoutoplossing (0,9%) voordat u het wondverband verwisselt, zodat het genezingsproces niet wordt verstoord. Eventuele gelesten moeten tijdens het schoonmaken van de wond uit de wond worden verwijderd. Met name diepe wonden moeten goed worden geïrrigeerd.

WANNEER TE GEBRUIKEN

BIOSORB™ Gelling Fibre Dressing is bedoeld voor gebruik bij de behandeling van matig tot sterk exsuderende acute of chronische wonden waaronder:

- Veneuze beenulcera, decubituswonden (stadium II t/m IV) en diabetische ulcera
- Chirurgische wonden (bijv. postoperatief, secundair genezende wonden en donorplaatsen)
- Tweedegraads brandwonden
- Traumawonden (bijv. schaafwonden en scheurwonden)
- Oncologische wonden

BIOSORB™ Gelling Fibre Dressing heeft als ondersteunend effect dat het de wondrand en de omringende huid beschermt tegen verweking¹.



Het product kan ook onder compressie worden gebruikt.



In droge toestand kan BIOSORB™ Gelling Fibre Dressing gemakkelijk op maat worden geknipt met een steriele schaar.

Goed om te weten...

In vitro-is aangetoond dat het BIOSORB™-wondverband 43% meer absorptievermogen heeft dan Aquacel Extra¹

Afmetingen	Aantal wondverbanden per doos	Productcode
5cm x 5cm	10	BGF0505
10cm x 10cm	10	BGF1010
15cm x 15cm	5	BGF1515
2cm x 45cm (streng)	5	BGF0245

Voor meer informatie over de voordelen van BIOSORB™ kunt u contact opnemen met uw account manager bij GD Medical of kijken op gdmedical.nl

Referenties 1. Gegevens in het dossier.

2016 Systagenix Wound Management IP Co B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle in dit document genoemde handelsmerken, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van Systagenix Wound Management IP Co B.V., hieraan gelieerde bedrijven en/of licentiegevers. 5743/SYS/NL/0916/Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige gebruiksinstructies.