



### PREVENA™ 125 THERAPY UNIT SYMBOLEN EN ALARMEN



Waarschuwingssymbool



Hoorbaar alarm (gedempt)

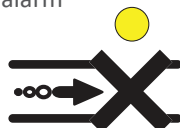
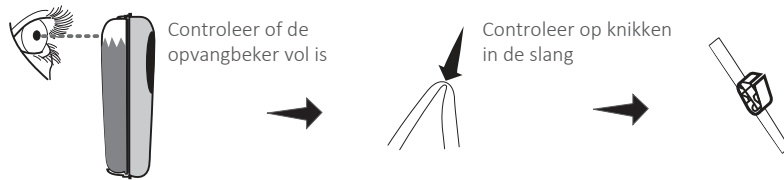
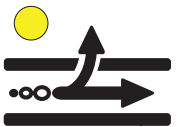
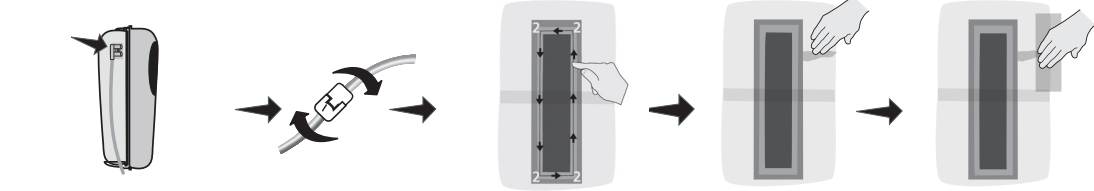

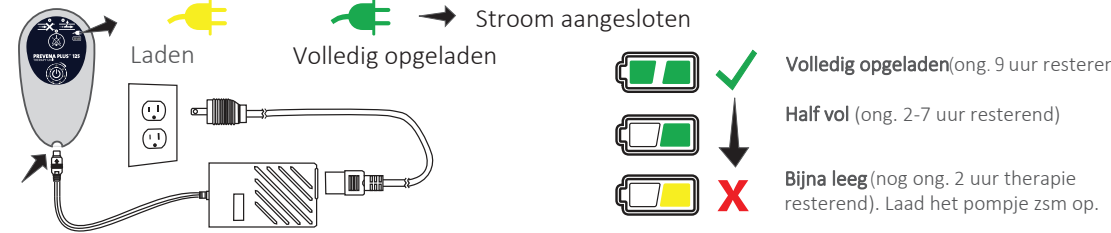






Batterij niveau

Dit is een verkort overzicht, meer details vindt u in het PREVENA™ Systeem Overzicht Zorgverleners

Soort alarm	Hoe oplossen
<p><b>Lekkage alarm</b> Eén piep, één geel lampje (continu brandend)</p>	<p>Om te controleren of het PREVENA™ Incisie verband goed is aangesloten, heeft de PREVENA™125 Therapy Unit de VISICHECK™ functie. Druk tweemaal op de AAN/UIT knop.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eén lampje: Optimaal</li> <li>- Twee lampjes: Goed</li> <li>- Drie lampjes: Marginaal</li> </ul> <p>Wanneer de VISICHECK™ functie een “marginale” afdichting aangeeft, volg onderstaande stappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de opvangbeker goed is aangesloten (klik)</li> <li>- Controleer de slangaansluiting dat deze goed zijn zijn aangesloten</li> <li>- Strijk rimpels in de folie glad met je vingers</li> <li>- Gebruik PREVENA™ folie strips (ingesloten in de verpakking) om lekkages te dichten.</li> <li>- Druk langzaam stevig op de randen van het verband</li> </ul>
<p><b>Opvangbeker vol alarm</b> Twee piepjes, één geel lampje (continu brandend)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer het vloeistof niveau in de opvangbeker</li> <li>2. Als de opvangbeker niet vol is, controleer de slangen op knikken of afsluitingen</li> <li>3. Als de opvangbeker vol is, zet het pompje uit</li> <li>4. Breng een nieuwe opvangbeker aan wanneer de therapie moet worden voortgezet</li> </ol>
<p><b>Batterij alarm</b> <b>Laag-</b> Eén langzame piep, één geel lampje <b>Kritiek-</b> Eén snel herhalend harder wordende piep, één geel lampje</p>	<p>In het pompje zitten al drie AA batterijen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd 5 seconden ingedrukt om uit te zetten</li> <li>2. Druk en duw op het deksel aan de achterkant om het pompje te openen</li> <li>3. Breng 3 AA batterijen aan (lithium batterijen aanbevolen)</li> <li>4. Druk en duw om het deksel te sluiten</li> <li>5. Houd 2 seconden ingedrukt om aan te zetten</li> </ol>
<p><b>Systeemfout alarm</b> Eén snel herhalend harder wordende piep, twee gele lampjes</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd 5 seconden ingedrukt om uit te zetten</li> <li>2. Houd 2 seconden ingedrukt om weer aan te zetten</li> <li>3. Als het systeem nog steeds niet functioneert, neem contact op met de behandelaar of GD Medical op 040- 3031099</li> </ol>
<p><b>Maximale levensduur pomp bereikt:</b> drie lampjes branden om aan te geven dat de maximale duur bereikt is. Er is een continue piep gedurende 15 seconden en dan zal het systeem uitgaan.</p>	<p>Neem contact op met de behandelaar of GD Medical op 040- 3031 099</p> <p>Levensduur=192 uur (acht dagen)</p>



Soort alarm	Hoe oplossen
<p><b>Blokkering alarm</b></p> <p>Hoorbaar blokkering alarm met twee piepjes wat zich elke 15 seconden herhaalt</p> 	<p>Controleer of de opvangbeker vol is</p> <p>Controleer op knikken in de slang</p> <p>Controleer of de slangklem open staat</p> 
<p><b>Lekkage alarm</b></p> <p>Hoorbaar lekkage alarm met twee piepjes wat zich elke 15 seconden herhaalt</p> 	<p>Zorg dat de opvangbeker goed zit aangesloten. Er moet een duidelijke klik te horen zijn.</p> <p>Controleer de slangklemmen</p> <p>Druk de folie rondom goed aan</p> <p>Gebruik je vingers om rimpels glad te strijken</p> <p>Gebruik PREVENA folie strips of VAC folie om de buitenste randen af te plakken</p> 
<p><b>Batterij alarm</b></p> <p>Er klinkt een alarm met twee piepjes elke 4 minuten</p> 	<p>Stroom aangesloten</p> <p>Laden</p> <p>Volledig opgeladen</p> <p>Volledig opgeladen (ong. 9 uur resterend)</p> <p>Half vol (ong. 2-7 uur resterend)</p> <p>Bijna leeg (nog ong. 2 uur therapie resterend). Laad het pompje zsm op.</p> 
<p><b>Systeemfout alarm</b></p> <p>Alle LED lampjes knipperen en 2 piepjes elke 15 seconden</p> 	<p>Zet het pompje uit en weer aan</p> <p>Uit</p> <p>Aan</p> <p>Continueer therapie</p> <p>Neem contact op met de behandelaar of bel GD Medical op 040- 3031 099</p> 
<p><b>Alarm pauze knop</b></p> 	<p>Houd de alarm pauze knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het geluid van het alarm uit te zetten gedurende 2 minuten. De pauze knop licht op om aan te geven dat het alarmgeluid gepauzeerd is. Het alarm treedt na 2 minuten weer op, tenzij de reden voor het alarm is opgelost.</p>
<p><b>Maximale levensduur therapie</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een geel LED lampje bovenaan het pompje bij de levensduurindicator gaat branden</li> <li>Het pompje geeft 8 piepjes, gevolgd door een continue piep gedurende 5 seconden, daarna schakelt het pompje zichzelf uit</li> <li>Stel de behandelaar op de hoogte. Mocht geprobeerd worden het pompje weer aan te zetten dan hoort u een piep gedurende 3 seconden en vervolgens gaat het pompje weer uit</li> </ul>