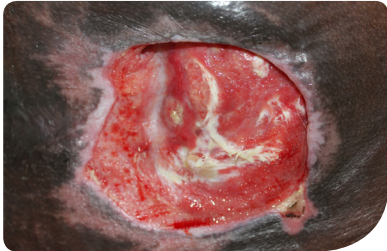
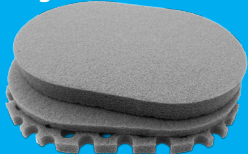


Deze handleiding kan worden gebruikt bij de besluitvorming over welk wondverband moet worden gebruikt in combinatie met V.A.C. VERAFLOR™ Therapy

	V.A.C. VERAFLOR™ Dressings	V.A.C. VERAFLOR™ Large Dressing	V.A.C. VERAFLOR CLEANSE™ Dressing	V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ Dressing
Wondtypen				
Wond eigenschappen	Open wonden, waaronder wonden met oppervlakkige ondermijningen of tunnelgebieden waarvan het distale aspect zichtbaar is.	Grote open wonden, waaronder wonden met oppervlakkige ondermijningen of tunnelgebieden waarvan het distale aspect zichtbaar is.	Wondholten of wonden met complexe vormen	Wonden met dik, fibrineus exsudaat, dood weefsel, infectieus materiaal en andere bioburden van de wond.
Hoofddoel(en) van de therapie	- Bij gebruik in combinatie met V.A.C. VERAFLOR™ Therapy: bevorderen van de verwijdering van infectieus materiaal en andere bioburden van de wond. - Vorming van robuust granulatieweefsel.	- Bij gebruik in combinatie met V.A.C. VERAFLOR™ Therapy: bevorderen van de verwijdering van infectieus materiaal en andere bioburden van de wond. - Vorming van robuust granulatieweefsel in grote wonden.	- Bij gebruik in combinatie met V.A.C. VERAFLOR™ Therapy: initiëren van actieve therapie en bevorderen van de verwijdering van infectieus materiaal en andere bioburden van de wond. - Gemakkelijk toe te passen in tunnels en ondermijningen.	- Bij gebruik in combinatie met V.A.C. VERAFLOR™ Therapy: initiëren van actieve therapie en bevorderen van de verwijdering van infectieus materiaal, zoals dik, fibrineus exsudaat, dood weefsel en andere bioburden van de wond. - Afhankelijk van de klinische beoordeling, kan deze combinatie worden overwogen wanneer chirurgisch debridement niet mogelijk of ongeschikt is.

	V.A.C. VERAFLORTM Dressings 	V.A.C. VERAFLORTM Large Dressing 	V.A.C. VERAFLOR CLEANSETM Dressing 	V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICETM Dressing 
Vorm	Spiraalvormige foam	Foamblok, vooraf gesplitst in twee lagen	Buisvormig	Foamblok, vooraf gesplitst in drie lagen
Gebruiks-kenmerken	Gemakkelijke toepassing: • Zonder schaar op maat maken • Vooraf uitgesneden gebied voor aanbrengen van pad bij gebruik voor overbrugging • Aanbrengen van één pad	Gemakkelijke toepassing: • Ideaal voor grote oppervlakken met oppervlakkige wonddiepte • Geleverd bij de V.A.C. VERAT.R.A.C. DUOTM Tube set voor afdekking van grote oppervlakken	Flexibele toepassing: • Ideaal voor wonden met complexe vormen (bijv. tunnels, ondermijningen en circumferentiële toepassingen) • Aanbrengen van één pad	Gemakkelijke toepassing met flexibiliteit: • Dunne lagen voor betere conformeerbaarheid • Meerdere lagen bieden toepassingsmogelijkheden voor wonden van wisselende diepte • Ideaal voor vuile wonden die actief moeten worden behandeld • Aanbrengen van één pad
Kenmerken dressing	Small: 7,7 x 11,2 x 1,75cm per stuk (2 spiraalvormige stukken) • Afgewikkeld is elk stuk 24cm • Elk stuk is een brug van 18cm Medium: 14,7 x 17,4 x 1,75cm per stuk (2 spiraalvormige stukken) • Afgewikkeld is elk stuk 80cm • Elk stuk is een brug van 74cm	25,0 x 15,0 x 1,6cm per stuk (ovaal - 2 stukken)	Elk stuk is 1 opgerolde spiraal (spiraal 61cm; diameter 3,2cm)	18,0cm x 12,5cm x wisselende dikte (0,8cm – 3,2cm) 3 lagen Afdeklaag van 1,6cm Afdeklaag van 0,8cm Contactlaag van 0,8cm (ronde gaten van 1,0cm; tussenruimte van 0,5cm)