

Verkorte handleiding voor probleemoplossing 3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy System

Deze verkorte handleiding is bestemd voor gebruik door zorgverleners en dient samen met de gebruikershandleiding bij het V.A.C.® Ulta 4 Therapy System en de veiligheidsinformatie bij het V.A.C.® Ulta 4 Therapy System te worden gebruikt.*

Opheffen van veelvoorkomende alarmen van het VAC Ulta 4 Therapy System:

Waarschuwingen/alarmen	Waarschuwingstoestand/alarmconditie	Mogelijke oplossingen	Gebruikerstip zorgverlener
Low Pressure Alarm (Alarm Lage druk) Therapy Interrupted (Therapie onderbroken) 	De unit heeft de beoogde negatieve-drukinstelling voor de therapie niet bereikt en de negatieve druk op de wond kan onder de ingestelde druk zijn, waardoor de therapeutische voordelen afnemen. Dit alarm gaat gepaard met een herhaald geluidssignaal. OPMERKING: Low Pressure Alarm (Therapie Interrupted) (Alarm Lage druk (therapie onderbroken)) is niet van toepassing op de 3M™ Prevena™ Therapy of de 3M™ Abthera™ Therapy.	1. Selecteer Audio Pause (Geluid stil) om het alarm twee minuten te dempen tijdens het oplossen van het probleem. 2. Zorg ervoor dat bij de 3M™ V.A.C.® Therapy de klemmen op de slangen naar de 3M™ SensaT.R.A.C.™ Pad en opvangbeker open staan. Zorg ervoor dat bij de 3M™ Veraflo™ Therapy de klemmen op de slangen naar de 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad of de 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ Tube Set en de opvangbeker open staan. 3. Controleer of de slang niet is geknikt of geplooid, of op een andere manier wordt geblokkeerd. 4. Als het Low Pressure Alarm (Alarm Lage druk) opnieuw verschijnt nadat u stap 2 en 3 hebt uitgevoerd, plaatst u de unit en slang lager, zodat deze zich op dezelfde hoogte als de wond bevinden of lager. Als de waarschuwingssituatie wordt opgelost door de verlaging, kan het gebruik worden voortgezet.	• Controleer of er een gat van 2,5 cm in de folie is geknikt. • Breng de unit en de slang omlaag tot op de hoogte van de wond of lager. 
Blockage Alert (Blokkeringswaarschuwing) 	De unit heeft een mogelijke blokkering in de 3M™ V.A.C. Therapy-slang gedetecteerd. Deze waarschuwing gaat gepaard met een herhaald geluidssignaal.	1. Selecteer Audio Pause (Geluid stil) om het alarm twee minuten te dempen tijdens het oplossen van het probleem. 2. Zorg ervoor dat bij de V.A.C.® Therapy de klemmen op de slangen naar de SensaT.R.A.C.™ Pad en opvangbeker open staan. Zorg ervoor dat bij de Veraflo Therapy de klemmen op de slangen naar de V.A.C. VeraT.R.A.C. Pad of V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo Tube Set en de opvangbeker open staan. 3. Controleer of de slang niet is geknikt of geplooid, of op een andere manier wordt geblokkeerd. 4. Als de Blockage Alert/Alarm (Blokkeringswaarschuwing/-alarm) blijft optreden nadat u stap 2 en 3 hebt uitgevoerd, plaatst u de unit en slang lager, zodat deze zich op dezelfde hoogte als de wond bevinden of lager. Als de waarschuwingssituatie wordt opgelost door de verlaging, kan het gebruik worden voortgezet.	• Breng de unit en de slang omlaag tot op de hoogte van de wond of lager. • Controleer of de SensaT.R.A.C.™ Pad op een vlak gedeelte van het lichaam zit. (Niet van toepassing op Prevena™ Therapy) • Controleer de positie van de patiënt of externe compressiemiddelen die de doorstroming zouden kunnen verhinderen. Verwijder externe compressiemiddelen, indien van toepassing.
Blockage Alarm (Blokkeringsalarm) Therapy Interrupted (Therapie onderbroken) 	Dit alarmscherm verschijnt wanneer er een blokkering aanwezig is in de V.A.C.® Therapy-slang. Dit alarm gaat gepaard met een herhaald geluidssignaal. Opmerking: Blockage (Therapie Interrupted) (Blokking (Therapie onderbroken)) is niet van toepassing op de Prevena™ Therapy of de Abthera™ Therapy.	1. Selecteer Audio Pause (Geluid stil) om het alarm twee minuten te dempen tijdens het oplossen van het probleem. 2. Zorg dat de connector tussen de slang voor het wondverband en de slang voor de opvangbeker goed is vastgedraaid. 3. Zorg dat de opvangbeker goed is geïnstalleerd. 4. Selecteer 3M™ Seal Check™ om de functie 3M™ Seal Check™ te openen. 5. Nadat de lekkage is hersteld, selecteert u Exit (Afsluiten) in het scherm Seal Check Feature (Seal Check-functie) om terug te keren naar het scherm Leak Alarm (Lekkagealarm). Selecteer Reset (Resetten) om terug te gaan naar het Startscherm. Controleer in de statusbalk of de therapie op AAN staat ingesteld. Zo niet, selecteer dan Start/Stop om de therapie opnieuw te starten.	• Bij grotere, sterk exsuderende wonden moet de intensiteit op het hoogste niveau worden ingesteld voor sneller aantrekken en een snellere afdichting.
Leak Alarm (Lekkagealarm) 	De unit heeft een significant negatieve-druklek gedetecteerd. Als deze alarmsituatie niet binnen drie minuten wordt verholpen, wordt de therapie onderbroken. Dit alarm gaat gepaard met een herhaald geluidssignaal.	1. Selecteer Audio Pause (Geluid stil) om het alarm twee minuten te dempen tijdens het oplossen van het probleem. 2. Zorg dat de connector tussen de slang voor het wondverband en de slang voor de opvangbeker goed is vastgedraaid. 3. Zorg dat de opvangbeker goed is geïnstalleerd. 4. Selecteer 3M™ Seal Check™ om de functie 3M™ Seal Check™ te openen. 5. Nadat de lekkage is hersteld, selecteert u Exit (Afsluiten) in het scherm Seal Check Feature (Seal Check-functie) om terug te keren naar het scherm Leak Alarm (Lekkagealarm). Selecteer Reset (Resetten) om terug te gaan naar het Startscherm. Controleer in de statusbalk of de therapie op AAN staat ingesteld. Zo niet, selecteer dan Start/Stop om de therapie opnieuw te starten.	• Bij grotere, sterk exsuderende wonden moet de intensiteit op het hoogste niveau worden ingesteld voor sneller aantrekken en een snellere afdichting.
Leak Alarm (Lekkage-alarm) Therapy Interrupted (Therapie onderbroken) 	Dit alarm verschijnt wanneer een gedetecteerde negatieve druklekkage niet is verholpen en de therapie is onderbroken. Dit alarm gaat gepaard met een herhaald geluidssignaal. Opmerking: Leak (Therapie Interrupted) (Lekkage (Therapie onderbroken)) is niet van toepassing op de Prevena™ Therapy of de Abthera™ Therapy.	1. Selecteer Audio Pause (Geluid stil) om het alarm twee minuten te dempen tijdens het oplossen van het probleem. 2. Zorg dat de connector tussen de slang voor het wondverband en de slang voor de opvangbeker goed is vastgedraaid. 3. Zorg dat de opvangbeker goed is geïnstalleerd. 4. Selecteer Reset (Resetten) om terug te gaan naar het Startscherm. 5. Start de therapie opnieuw door Start/Stop te selecteren. 6. Selecteer Seal Check om de functie Seal Check™ te openen. 7. Nadat de lekkage is hersteld, selecteert u Exit (Afsluiten) in het scherm Seal Check™ Feature om terug te keren naar het scherm Leak Alarm (Lekkagealarm). Selecteer Reset (Resetten) om terug te gaan naar het Startscherm. Controleer in de statusbalk of de therapie op AAN staat ingesteld. Zo niet, selecteer dan Start/Stop om de therapie opnieuw te starten.	

*Dit systeem heeft meer alarmen en functies dan hier worden beschreven. Lees en volg altijd de gedetailleerde gebruiksaanwijzing en de belangrijke veiligheidsinformatie die met de V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit en disposables worden geleverd. Neem bij medische vragen contact op met de behandelaar. Vraag uw 3M-vertegenwoordiger om een exemplaar van de verkorte handleiding voor informatie over probleemoplossingen bij alarmen met betrekking tot Veraflo Therapy.

Waarschuwingen/alarmen	Waarschuwingstoestand/alarmconditie	Mogelijke oplossing	Gebruikerstip zorgverlener
Battery Low Alert (Waarschuwing: accu bijna leeg) 	De Battery Low Alert (Waarschuwing: accu bijna leeg) verschijnt ongeveer twee uur voordat het stroomniveau van de accu te laag is om de 3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit continu te voeden. Deze waarschuwing gaat gepaard met een herhaald geluidssignaal.	1. Selecteer Audio Pause (Geluid stil) om het alarm twee minuten te dempen tijdens het oplossen van het probleem. 2. Sluit de unit aan op een stopcontact met de door 3M meegeleverde voeding om de accu op te laden. 3. Als het scherm Battery Critical Alarm (Alarm accu leeg) niet automatisch verdwijnt, selecteert u Reset (Resetten) om terug te gaan naar het Startscherm. 4. Controleer in de statusbalk of de therapie op Aan staat ingesteld. Zo niet, selecteer dan Start/Stop om de therapie opnieuw te starten.	• Zorg dat de unit aangesloten blijft om de batterijduur te maximaliseren. • Onderneem bij lekalarmen zo snel mogelijk actie om te voorkomen dat de accu snel leegloopt. • Een geel lampje onder in het touchscreen en een pictogram voor het opladen van de accu bovenin het touchscreen, geven aan dat de unit bezig is met opladen.
Battery Critical Alarm (Alarm accu leeg) 	De Battery Critical Alarm (Alarm accu leeg) verschijnt 30 minuten voordat het stroomniveau van de accu te laag is om de V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit continu te voeden. Deze waarschuwing gaat gepaard met een herhaald geluidssignaal.		
Canister Full Alarm (Alarm opvangbeker vol) Therapie onderbroken 	De opvangbeker is vol en moet worden vervangen. Dit alarm gaat gepaard met een herhaald geluidssignaal.	1. Selecteer Audio Pause (Geluid stil) om het alarm twee minuten te dempen tijdens het oplossen van het probleem. 2. Controleer of de opvangbeker vol is door het vloeistofniveau te vergelijken met de maatstreepjes op de opvangbeker. 3. Als de opvangbeker niet vol is, selecteert u Reset (Resetten) om terug te keren naar het Startscherm. 4. Als de opvangbeker vol is, vervangt u de opvangbeker en selecteert u Reset (Resetten) in dit scherm om terug te gaan naar het Startscherm. 5. Selecteer Start/Stop om de therapie opnieuw te starten.	• Controleer of de opvangbeker vol is door het vloeistofniveau te vergelijken met de maatstreepjes op de opvangbeker.
Therapy Inactive Alarm (Alarm Therapie inactief) 	De V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit is ingeschakeld en de therapie is gedurende meer dan 15 minuten gepauzeerd of gestopt.	1. Selecteer Audio Pause (Geluid stil) om het alarm twee minuten te dempen tijdens het oplossen van het probleem. 2. Selecteer Reset (Resetten) om terug te gaan naar het Startscherm. 3. Selecteer Start/Stop om de therapie opnieuw te starten.	• Als er geen therapie gewenst is, schakelt u de V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit uit met de aan/uit-knop aan de voorkant van de unit.
System Error (Systeemfout) 	Wanneer er een systeemfout optreedt binnen de V.A.C.® Ulta™ Therapy Unit terwijl de unit wordt ingeschakeld.	1. Registreer het foutcodenummer (00000001). 2. Schakel de unit uit en weer in met de aan/uit-knop aan de voorzijde van de unit.	• Als een alarmconditie niet kan worden opgelost, dient u contact op te nemen met 3M.

Neem contact op met uw plaatselijke 3M-vertegenwoordiger voor technische ondersteuning of aanvullende informatie.

Opmerking: Als een alarmconditie niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met een zorgverlener of met 3M.

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een zorgverlener en neem de gebruiksaanwijzing door voorafgaand aan gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

3M



GDM B.V.
Hastelweg 224
NL- 5652 CL
Eindhoven
www.gdmmedical.nl



© 2022 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is verboden. NL-70-2011-8292-3