



Het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System biedt een innovatieve en aanpasbare therapie door de mogelijkheid om V.A.C.® Therapy, V.A.C. VERAFL0™ Therapy, PREVENA™ Therapy of ABTHERA™ Therapy te kiezen.

Veelvoorkomende alarmen bij V.A.C.® Therapy en V.A.C. VERAFL0™ Therapy opheffen*

In deze verkorte handleiding wordt uitgelegd hoe u veelvoorkomende alarmen bij V.A.C.® Therapy en V.A.C. VERAFL0™ Therapy bij het gebruik van het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System kunt opheffen.

Voor een algemeen overzicht van probleemoplossingen bij alarmen met betrekking tot PREVENA™ Therapy en ABTHERA™ Therapy kunt u uw plaatselijke vertegenwoordiger vragen om een exemplaar van de algemene handleiding voor het oplossen van problemen bij alarmen met betrekking tot het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System. (Deze verkorte handleiding is bestemd voor gebruik door zorgaanbieders en dient samen met de gebruikershandleiding bij het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System en de veiligheidsinformatie bij het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System te worden gebruikt.*)



ACTIE/OPLOSSING



Selecteer **Geluidsonderbreking** om het geluidssignaal gedurende 2 minuten te dempen.




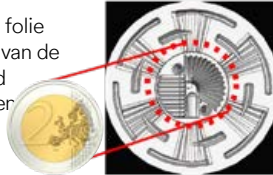

Selecteer **Help** voor meer informatie over het oplossen van het alarm.

Als het alarm niet automatisch ophoudt nadat u het alarm hebt opgelost:



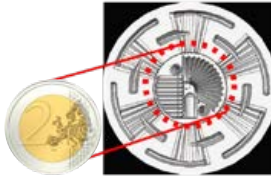



- Selecteer **Resetten** om terug te gaan naar het Start scherm.
- Controleer in de statusbalk of de therapie op **AAN** staat ingesteld. Zo niet, selecteer dan **Start/Stop** om de therapie opnieuw te starten.

Als alarmcondities niet kunnen worden opgelost, dient u contact op te nemen met GD Medical.

Wanneer de V.A.C.® Therapy-instelling is geselecteerd:

Alarmen	Actie/oplossing	Tips voor gebruikers
V.A.C.® Therapy -blokkeringsalarm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg ervoor dat beide slangklemmen open staan. 2. Controleer of de slang niet is geknikt of geplooid, of wordt geblokkeerd. 	<p>Controleer of er een gat van ten minste 2,5 cm in de folie is geknikt. Gebruik het gat in de onderliggende laag van de SENSAT.R.A.C.™ Pad of de V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad als richtlijn voor het knippen van het gat. Plaats de unit er slang lager, zodat deze zich op dezelfde hoogte als de wond of lager bevinden.</p> 
V.A.C.® Therapy -lekkagealarm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg dat de connector tussen de slang voor het wondverband en de slang voor de opvangbeker goed is vastgedraaid. 2. Zorg dat de opvangbeker goed is geïnstalleerd. 3. Selecteer de SEAL CHECK™-knop om de SEAL CHECK™-functie te gebruiken. 	<p>Opmerking: De SEAL CHECK™-functie is niet beschikbaar als de therapie is gestopt omdat het alarm niet binnen drie minuten is opgeheven. Start de therapie opnieuw om de SEAL CHECK™-functie te gebruiken.</p>

Wanneer de V.A.C.VERAFLO™ Therapy-instelling is geselecteerd:

Alarmen	Actie/oplossing	Tips voor gebruikers
V.A.C. VERAFLO™ Therapy -blokkeringsalarm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of alle vier de slangklemmen open staan en of de slangen niet zijn geknikt, geplooid of geblokkeerd. 2. Zorg ervoor dat de V.A.C. VERALINK™ Cassette goed is geplaatst en vergrendeld. 3. Controleer als het alarm aanhoudt of de positie van de patiënt of compressiemiddelen (indien van toepassing) de doorstroming van de vloeistof niet verstoren. 	<p>Als de instillatievloeistof een dikke consistentie heeft, dient één of alle van de volgende onderdelen te worden vervangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V.A.C. VERALINK™ Cassette • V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad • Vloeistofzak/fles
V.A.C. VERAFLO™ Therapy -drukafwijkingalarm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of alle vier de slangklemmen open staan en of de slangen niet zijn geknikt, geplooid of geblokkeerd. 2. Zorg ervoor dat de V.A.C. VERALINK™ Cassette goed is geplaatst en vergrendeld. 3. Controleer als het alarm aanhoudt of de positie van de patiënt of compressiemiddelen (indien van toepassing) de doorstroming van de vloeistof niet verstoren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Raadpleeg de bovenstaande tips voor gebruikers. • Controleer of er een gat van ten minste 2,5 cm in de folie is geknikt. 
Alarm: V.A.C. VERALINK™ Cassette niet goed bevestigd 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de V.A.C. VERALINK™ Cassette uit de behandelingsunit. 2. Controleer of er vuil in het aansluitpunt van de cassette zit. 3. Zorg ervoor dat draaiaansluiting van de cassette goed in de sleuf van de behandelingsunit is geplaatst. 4. Bevestig de cassette opnieuw en zorg ervoor dat deze juist is geplaatst en vergrendeld. 5. Installeer een nieuwe cassette indien het alarm aanhoudt. 	<p>Een klikgeluid geeft aan dat de cassette op de juiste wijze is geïnstalleerd.</p>
Alarm: Fill Assist inactief 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer Resetten om terug te gaan naar het Start scherm. 2. Selecteer Therapie-instellingen op het Start scherm. 3. Configureer de therapie opnieuw. 4. Controleer of de Fill Assist-slider is ingesteld op AAN. 	<p>Verschijnt als de Start-knop van Fill Assist niet is ingedrukt of indien het Fill Assist-volume niet is geaccepteerd binnen 15 minuten.</p>
Alarm: Vloeistofzak/fles leeg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de lege zak/fles. 2. Plaats een nieuwe zak/fles met topische vloeistof en bevestig deze aan de ophanghaak van de vloeistofhouder. 3. Selecteer Logboek om de vervanging van de zak/fles in te voeren. 4. Selecteer Resetten om terug te gaan naar het Start scherm. 5. Controleer in de statusbalk of de therapie op AAN staat ingesteld. 	<p>Verwijder de V.A.C. VERALINK™ Cassette en controleer de instillatieslang op luchtballen als de vloeistofzak/fles vol is en het alarm aanhoudt. Schud de V.A.C. VERALINK™ Cassette voorzichtig en plaats deze opnieuw.</p> <p>Zorg ervoor dat het blauwe ventiel van de slangpin open staat als u een niet-opvouwbare fles gebruikt en sluit het blauwe ventiel indien u een opvouwbare zak/fles gebruikt.</p>

*Dit systeem heeft meer alarmen en functies dan hier worden beschreven. Lees en volg altijd de gedetailleerde gebruiksaanwijzing en de belangrijke veiligheidsinformatie die met de V.A.C.ULTA™ 4 Therapy Unit en disposables worden geleverd. Neem bij medische vragen contact op met de behandelend arts. Voor een algemeen overzicht van probleemoplossingen bij alarmen met betrekking tot PREVENA™ Therapy en ABTHERA™ Therapy kunt u uw plaatselijke vertegenwoordiger vragen om een exemplaar van de algemene handleiding voor het oplossen van problemen bij alarmen met betrekking tot het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System. Opmerking: Als een alarmconditie niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met een zorgverlener of met 3M.

Neem voor technische ondersteuning of aanvullende informatie contact op met GD Medical 040- 3031 099.

Opmerking: Als een alarmconditie niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met een zorgverlener of met 3M.

Belangrijke opmerking: Het veiligheidsinformatieblad en de gebruikershandleiding van het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System op acelity.com bevatten indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere belangrijke veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en neem de gebruiksaanwijzing door voorafgaand aan gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

©Copyright 2020 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik niet toegestaan. PRA-PM-BE-00028 (07/20)

