



Veraflo™
Therapy


3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit met 3M™ Veraflo™ Therapy

De unit instellen

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het lampje gaat branden.
2. Bevestig zodra het startscherm verschijnt de 3M™ V.A.C. Veralink™ Cassette.



3. Trek de ophanghaak van de vloeistofhouder omhoog.

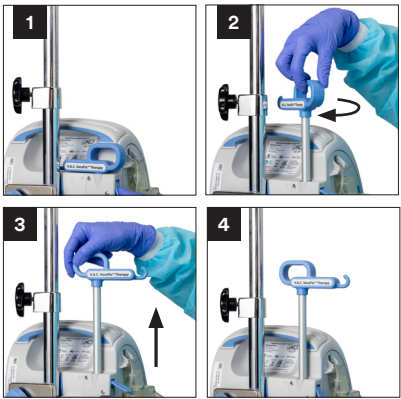

4. Sluit de zak/fles met vloeistof aan en hang deze op.



5. Sluit de wondverbandslang aan (na het aanbrengen van het wondverband) door deze uit te rollen, te drukken en te draaien.



6. Bevestig de opvangbeker van 500 ml of van 1000 ml.



Sluit de instillatieslang en daarna de 3M™ V.A.C.® Therapy-slang aan.

Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie over het aanbrengen van een wondverband.

3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy Unit



Contra-indicaties

Plaats foam wondverbanden van het 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy System (met inbegrip van 3M™ V.A.C.® Therapy en 3M™ Veraflo™ Therapy Dressings) niet direct in aanraking met blootliggende bloedvaten, anastomoses, organen of zenuwen.

3M™ V.A.C.® Therapy en 3M™ Veraflo™ Therapy zijn gecontra-indiceerd voor patiënten met:

- ▶ maligniteit in de wond;
- ▶ onbehandelde osteomyelitis;
- ▶ niet-enterale fistels en niet-geëxploreerde fistels;
- ▶ necrotisch weefsel waarin korstvorming aanwezig is. (Opmerking: Na debridement van necrotisch weefsel en het volledig verwijderen van de korstvorming kan 3M™ V.A.C.® Therapy worden toegepast).


Opmerking: Raadpleeg het gedeelte met waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen van het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie, waaronder details over mogelijke risico's in verband met bloeding en infectie. Raadpleeg de gebruikershandleiding en het veiligheidsinformatieblad voor volledige informatie over indicaties, contra-indicaties en andere veiligheidsinformatie.

Aanvullende contra-indicaties specifiek voor 3M™ Veraflo™ Therapy:

- ▶ Gebruik 3M™ V.A.C.® Dressings niet met Octenisept®, waterstofperoxide, oplossingen op alcoholbasis of oplossingen die alcohol bevatten.
- ▶ Dien geen vloeistoffen toe via de borst- of buikholte; hierbij bestaat een risico dat de kerntemperatuur van het lichaam verandert en dat er vloeistofretentie in de holte optreedt.
- ▶ Gebruik 3M™ Veraflo™ Therapy uitsluitend als de wond grondig is onderzocht; er bestaat een risico op onbedoelde instillatie van topische wondoplossingen naar naastgelegen lichaamsholten.


3M™ V.A.C.® Veraflo™ Therapy starten

Startscherm

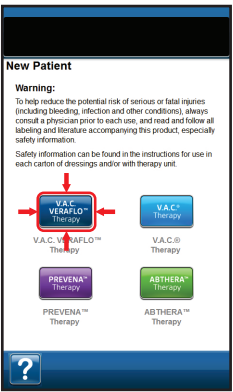


Selecteer Veraflo™ Therapy.

Instellingscherm behandeling

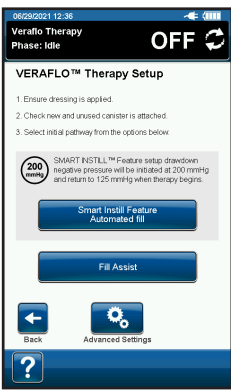


Selecteer 3M™ Smart Instill™ Feature (Smart Instill-functie).

3M™ Smart Instill™ Feature step 1

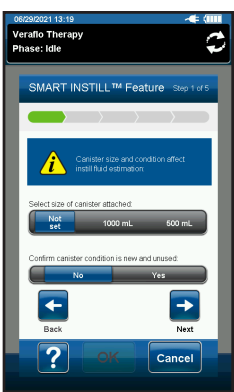


Selecteer de maat van de opvangbeker en bevestig dat de opvangbeker ongebruikt is.

3M™ Smart Instill™ Feature step 2

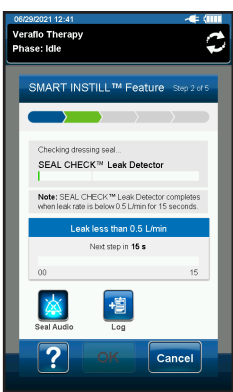


3M™ Smart Instill™ Feature initieert de 3M™ Seal Check™-functie.

3M™ Smart Instill™ Feature step 3

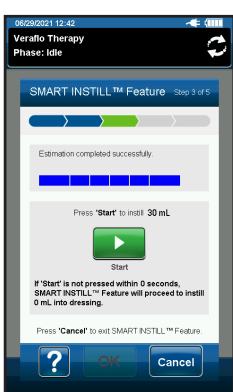

Het scherm 3M™ Smart Instill™ Feature schat en toont het aanbevolen instillatievolume. Als de gebruiker Start niet selecteert, zal de 3M™ Smart Instill™ Feature na 10 seconden automatisch het weergegeven instillatievolume indruppelen.


3M™ Smart Instill™ Feature step 4

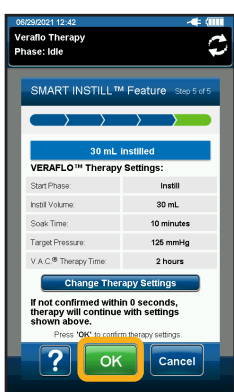

Selecteer OK om de voorgestelde instellingen te accepteren. 3M™ Veraflo™ Therapy begint automatisch met de instellingen die worden weergegeven als de gebruiker niet binnen 10 minuten OK selecteert.

Verbeterde functies

3M™ Veraflo™ Therapy – overzicht geavanceerde instellingen (optioneel)

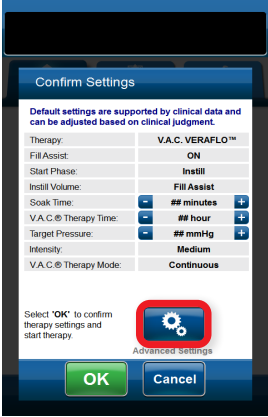

Selecteer **Advanced Settings** (Geavanceerde instellingen.)



Wijzig de instellingen voor **Pressure** (Druk), **Intensity** (Intensiteit) en **Therapy Mode** (Behandelingsmodus). Selecteer **OK** om de instellingen te accepteren.




Stel **Fill Assist** (Vulhulp) in op Off (Uit) en selecteer **Start Phase** (Fase starten). Wijzig de instellingen voor **Instill Volume** (Instillatievolume), **Soak Time** (Inweektijd) en de **V.A.C.® Therapy Time** (Behandelingstijd).


Informatieschermen – 3M™ Veraflo™ Therapy



Selecteer de **knop i** in het **beginscherm** om verder te gaan naar het tabblad **Therapy Summary** (Behandelingsoverzicht).

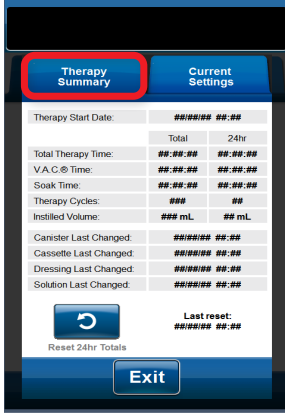

Gebruik het tabblad **Therapy Summary** (Behandelingsoverzicht) voor het beoordelen van een cumulatief overzicht van de toegediende behandeling.

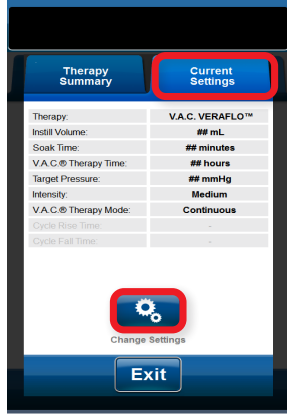

Gebruik het tabblad **Current Settings** (Huidige instellingen) voor het beoordelen van de huidige behandelingsinstellingen. Selecteer **Change Settings** (Instellingen wijzigen) om verder te gaan naar het scherm **Confirm Settings** (Instellingen bevestigen).

Opmerking: Als een alarmconditie niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met een zorgverlener of een lokale vertegenwoordiger.

Opmerking: Voor deze producten en therapieën bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een behandelaar en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor medisch specialisten.

Octenisept® is een handelsmerk van Schulke & Mayr Gesellschaft m.b.H.
© 2023 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M, Seal Check, Smart Instill, V.A.C., V.A.C. Veraflo en V.A.C. Veralink zijn handelsmerken van 3M Company. OMG605814.

