

# Ht one

## Veiligheidslancetten



- ✓ Gemakkelijk en veilig
- ✓ Eenmalig te gebruiken
- ✓ Prikaccidenten uitgesloten

# Eenvoudig te gebruiken

- Zeer eenvoudig in gebruik: **draai en druk!**
- Geen prikapparaat en plaatsen/verwijderen van naalden nodig.

# Prettig

- Verkrijg dezelfde hoeveelheid bloed met beduidend minder pijn.
- De gepatenteerde technologie vermindert de kracht van de activering, het geluid en de vibratie.
- De ultra-scherpe kwaliteitsnaald reduceert huidbeschadiging en pijn tot een minimum.

# Veilig

- Het automatische terugtreksysteem voorkomt dat de scherpe naald, na gebruik, blootgesteld blijft. Hiermee voorkomt u dat u of iemand anders zichzelf per ongeluk prikt.



# Handig



- 's Werelds kleinste veiligheidslancet.
- Eenvoudig mee te nemen.


# Activatie bij contact

- Consistente prikdiepte.
- Voorkomt de kans dat u de procedure moet herhalen.



<b>1,5 mm</b> 	<b>Omschrijving</b>	<b>Ht-One Veiligheidsnaald 1,5 mm</b>
	<b>Kleurmarkering</b>	<b>Geel</b>
	<b>Bloedmonster</b>	
	<b>Inhoud</b>	100 stuks
	<b>Onderdeelnummer</b>	GD101226
	<b>ZI nummer</b>	16671872
<b>EAN code</b>	8718692276185	

<b>1,8 mm</b> 	<b>Omschrijving</b>	<b>Ht-One Veiligheidsnaald 1,8 mm</b>
	<b>Kleurmarkering</b>	<b>Oranje</b>
	<b>Bloedmonster</b>	
	<b>Inhoud</b>	100 stuks
	<b>Onderdeelnummer</b>	GD100195
	<b>ZI nummer</b>	16034333
<b>EAN code</b>	8718692270404	

<b>2,2 mm</b> 	<b>Omschrijving</b>	<b>Ht-One Veiligheidsnaald 2,2 mm</b>
	<b>Kleurmarkering</b>	<b>Roze</b>
	<b>Bloedmonster</b>	
	<b>Inhoud</b>	100 stuks
	<b>Onderdeelnummer</b>	GD100196
	<b>ZI nummer</b>	16034341
<b>EAN code</b>	8718692270411	

<b>2,5 mm</b> 	<b>Omschrijving</b>	<b>Ht-One Veiligheidsnaald 2,5 mm</b>
	<b>Kleurmarkering</b>	<b>Blauw</b>
	<b>Bloedmonster</b>	
	<b>Inhoud</b>	100 stuks
	<b>Onderdeelnummer</b>	GD101202
	<b>ZI nummer</b>	16667468
<b>EAN code</b>	8718692275379	

4 typen veiligheidslancetten, geschikt voor alle toepassingsgebieden.

# Gebruiksaanwijzing

1



Reinig uw vingertop met alcohol.  
Verwijder de beschermkap van de veiligheidslancet door deze 90° te draaien.

2



Plaats het rode uiteinde van de veiligheidslancet op uw vingertop.

3



Druk zachtjes de veiligheidslancet tegen uw vingertop om het lancetmechanisme te activeren.

4



Gebruik een naaldcontainer om uw veiligheidslancet weg te gooien.

# Ht one



Medical Pharma

**GD Medical Pharma BV**  
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven  
[www.ht-one.nl](http://www.ht-one.nl)  
Telefoon 040-3031090  
[www.gdmedicalpharma.nl](http://www.gdmedicalpharma.nl)  
E-mail [support@gdmedicalpharma.nl](mailto:support@gdmedicalpharma.nl)

STERILE R



CE 1008