


# GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PRIKAPPARAAT

Met dit prikapparaat kunt u eenvoudig en vrijwel pijnloos capillair bloed uit de vingertop (of een andere prikplaats) afnemen.

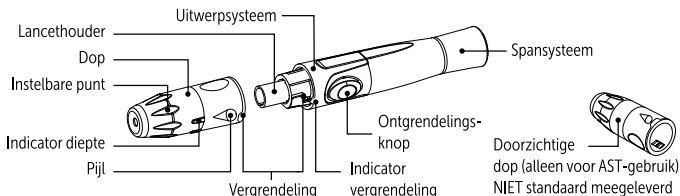

**Dit prikapparaat heeft 6 standen voor de gewenste aanprikdiepte:**




Hoe langer de indicatorlijn, hoe dieper de naald in de huid gaat.

## WAARSCHUWING


### Om de kans op infectie te verkleinen:

- ▶ Deel de naaldjes en het prikapparaat niet met anderen.
- ▶ Gebruik altijd een nieuw, steriel naaldje. De naaldjes zijn alleen geschikt voor eenmalig gebruik.
- ▶ Zorg dat er geen handcrème, vetigheid of vuil in of op de naaldjes en het prikapparaat komt.
- ▶ Het gebruikte naaldje kan biologisch gevaarlijk materiaal zijn. Verwijder het daarom volgens de daarvoor bestemde lokale voorschriften.

## Vorbereiding van het prikapparaat

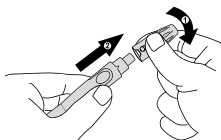


**1. Draai de dop en trek de dop van het prikapparaat.**

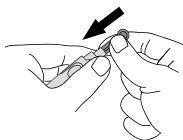


**2. Breng het naaldje in de naaldhouder en druk deze stevig aan tot het goed vastzit.**



**3. Draai het beschermplaatje van het naaldje.**

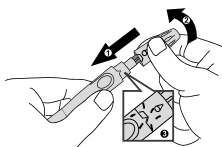

**4. Plaats de dop en draai de dop om de vergrendeling te sluiten, zoals in de afbeelding, tot u de klik hoort. Als de vergrendeling op de juiste wijze wordt gesloten, staat de indicator van de vergrendeling in de uiterste positie rechts.**

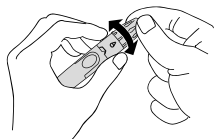

**5. Houd de dop vast en kies de gewenste aanprikdiepte door de instelbare punt in een van beide richtingen te draaien tot de pijl op de dop naar de gewenste diepte wijst.**




**6. Trek het spansysteem terug tot u een klik hoort. U ziet de ontgrendelingsknop van kleur veranderen wanneer het systeem klaar is.**

▶ **Als u geen klik hoort, kan het zijn dat de pen is aangespannen toen het naaldje werd aangebracht.**


NB:

#### Wat te doen voor u een druppel bloed verzamelt:

- ▶ U wast voor u begint uw handen en u droogt deze goed af.
- ▶ U kiest een prikplaats op de vingertop.
- ▶ U wrijft gedurende 20 seconden over de prikplaats voor u met het aanprikken begint.
- ▶ U maakt de prikplaats schoon met een wattenstaafje met een 70%-alcoholoplossing en laat het aan de lucht drogen.

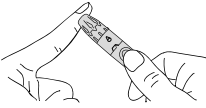

**7. Het aanprikken van de vinger**  
Druk het prikapparaat tegen de vingertop op de zijkant van uw vingertop. Druk op de ontgrendelingsknop om uw vinger aan te prikken. Als u een klik hoort, is het aanprikken voltooid.

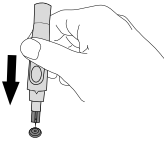

**9. Verwijder het naaldje door eerst de dop eraf te draaien.** U verwijdert het gebruikte naaldje op veilige wijze door het beschermplaatje op een hard oppervlak te plaatsen en de nu blootliggende punt van het naaldje in het beschermplaatje te drukken.



**8. Verwijder het prikapparaat van de prikplaats.** Na het aanprikken verwijdert u de eerste druppel bloed met een schoon wattenstaafje. Knijp zachtjes in het aangeprikte gebied tot er een andere druppel bloed naar buiten komt. Zorg ervoor dat u de bloeddruppel NIET uitsmeert. Houd de teststrip tegen de druppel bloed.




**10. Schuif het uitwerksysteem naar voren om het gebruikte naaldje te verwijderen.** Verwijder het naaldje volgens de lokale voorschriften.

▶ **Wanneer u een bloedmonster wilt afnemen van een andere prikplaats dan de vingertop, gebruikt u de doorzichtige AST dop.**

#### Alternatieve prikplaatsen (AST)

De AST dop wordt niet standaard meegeleverd. Deze dient apart besteld te worden.

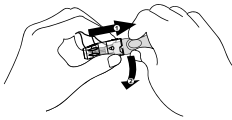

NB:

Deze mogelijkheid is niet voor alle bloedglucosemeters beschikbaar. **Lees de gebruiksaanwijzing van de bloedglucosemeter** om te zien of u met uw systeem AST kunt uitvoeren.

Het aanprikken van een andere plek dan de vingertop wordt ook wel het gebruik van alternatieve prikplaatsen (alternative site testing – AST) genoemd. Lees de rubriek **'Alternatieve prikplaatsen'** in de gebruiksaanwijzing van uw bloedglucosemeter voordat u een andere prikplaats dan de vingertop aanprik. Vervang de dop van het prikapparaat door de doorzichtige dop voor alternatieve prikplaatsen. Trek het spansysteem terug tot u een klik hoort. Wanneer u de onderarm, bovenarm, hand, dij of kuit aanprik, let dan op dat u niet prikt in een gebied waar de bloedvaten duidelijk te zien zijn. Dit kan namelijk een bloeding veroorzaken.

#### Schoonmaken

Het naaldje is een wegwerpartikel en alleen geschikt voor eenmalig gebruik. Het prikapparaat kan vaker worden gebruikt. Maak het prikapparaat schoon met water en zachte zeep en veeg het prikapparaat met een doekje schoon. Spoel het prikapparaat **NIET** onder stromend water af. Desinfecteer de dop door deze gedurende 10 minuten in een 70%-alcoholoplossing te plaatsen en vervolgens aan de lucht te laten drogen. Plaats het prikapparaat niet in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen.



TaiDoc Technology Corporation  
B1-7F, No.127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,  
24888 New Taipei City, Taiwan



MedNet GmbH  
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

#### Uitleg symbolen

**Symbol**

**Referentie**



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing



Fabrikant



Gemachtigde vertegenwoordiger  
in de Europese Unie



Gesteriliseerd door gammastraling



Let op, lees de bijbehorende informatie



Niet opnieuw gebruiken (alleen lancet)



Batchcode



CE-markering



Te gebruiken vóór (alleen lancet)