


KERRALITE COOL™

Verzachtend hydrogel
verband voor de
behandeling van
droge tot weinig
exsuderende wonden

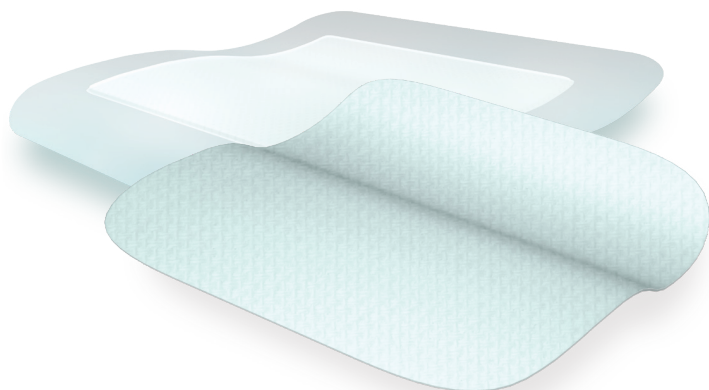

HYDROGEL VERBAND MET PRO-IONIC® TECHNOLOGY VOOR OPTIMALE VOCHTBALANS



WATERPROOF
(VARIANT MET BORDER)



**ONDER
COMPRESSIE**



**LANGE DRAAG-
TIJD**



**KNIPPEN
MOGELIJK**

Wat is het KERRALITE COOL™ verband?

KERRALITE COOL™ Hydrogel Moisture Balancing Dressing wordt gebruikt ter stimulatie van wondbedpreparatie, granulatie en epithelialisatie van chronische wonden en minimaliseert tegelijkertijd pijn¹.

KERRALITE COOL™ Dressings maken gebruik van de Pro-ionic® technology, waardoor het verband vocht kan afgeven of absorberen², afhankelijk van de toestand van de wond en geeft interactie met proteïnen en ionen³. Dit helpt bij het verminderen van schadelijke proteases zoals MMP's³ en stimuleert nieuwe vochttoevoer vanuit het onderliggende weefsel, en draagt hierdoor bij aan een autolytisch en/of osmotisch debridement¹.

KERRALITE COOL™ DRESSINGS HELPEN DE WONDBEHANDELING DOOR:

✓ Bieden van een vochtige wond-omgeving

✓ Exsudaatmanagement¹

✓ Pijnmanagement¹

✓ Helpt de wond en wondomgeving te beschermen tegen contaminatie van buitenaf

✓ Heeft een verkoelend en verzachtend effect op de wond⁵

Onderbouwing

KERRALITE COOL™ Dressings bij de behandeling van skin tears²



Dag nul: eerste presentatie skin tear




Skin tear na 24 dagen

Skin tears werden geclassificeerd volgens de International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) classificatie. KERRALITE COOL™ Dressing werd gedurende 4 weken toegepast, waarbij klinisch kon worden aangetoond dat het wondexsudaat werd gemanaged, het wondinfectie hielp voorkomen en minder pijn gaf door een verkoelend en verzachtend effect op de wond bij aanbrengen.

Wat maakt KERRALITE COOL™ Dressings beter?


KERRALITE COOL™ Dressings zijn gemaakt om de interactie tussen het verband met wondvocht en haar componenten te verbeteren. Door het absorberend vermogen van de ionische polymeren kan het verband beter overtollig vocht absorberen, wat resulteert in een verminderd risico op maceratie⁶. Daarbij stimuleren KERRALITE COOL™ Dressings een natuurlijk debridement door autolyse en osmose³.

Autolytisch debridement

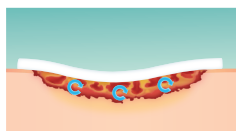

- Breekt necrotisch weefsel en beslag af
- Creëert een vochtig milieu voor wondgenezing
- Stimuleert enzymatische activiteit

Osmotisch debridement

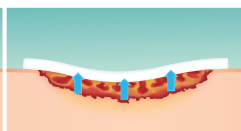

- Mechanische aantrekking van necrotisch weefsel
- Stimuleert nieuwe vochttoevoer vanuit onderliggend weefsel

DE KLINISCHE RESULTATEN SAMENGEVAT:



Snel, effectief debridement van avitaal weefsel¹



Excellente vochtmanagement eigenschappen



Vermindering risico op maceratie²




Significante pijnreductie³

Samenstelling van het verband


KERRALITE COOL™ Dressing bestaat uit een laag hydrogel met een polyurethane toplaag. Deze toplaag is waterafstotend, conformeerbaar, zeer ademend en beschermend.

De Pro-ionic® hydrogel contactlaag heeft een verzachtend, verkoelend effect. Beschermst tegen invloeden van buitenaf, maar is nog wel doorlaatbaar voor vocht, waardoor het in staat is zowel vocht te absorberen als af te geven².

KERRALITE COOL™ Border Dressing heeft een kleeftand om het verband goed op zijn plek te houden.

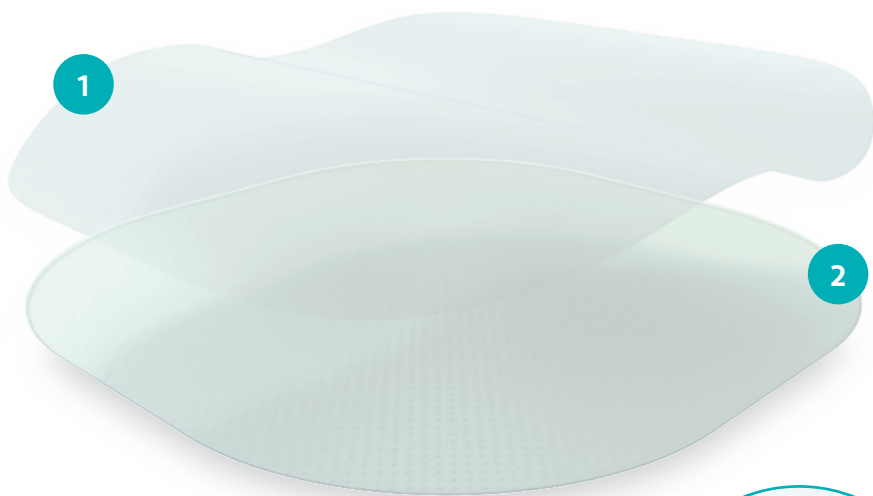

1. **Zachte, doorzichtige, conformeerbare beschermende film laag**
2. **Verzachtende, verkoelende Pro-ionic® gel laag**
3. **Kleeftand (border)**

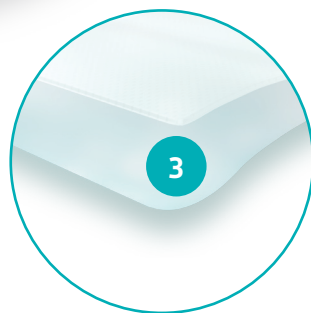


Ook verkrijgbaar
met kleeftand
(border)

Indicaties

KERRALITE COOL™ Hydrogel Moisture Balancing Dressing wordt gebruikt ter stimulatie van wondbedpreparatie, granulatie en epithelialisatie van chronische wonden en minimaliseert tegelijkertijd pijn.

KERRALITE COOL™ Dressings kunnen worden toegepast bij een variëteit aan droge en weinig exsuderende wonden, zoals:

- Ulcera van de onderste extremiteit
- Decubitus wonden
- Brandwonden/ huidschade na radiotherapie
- Skin tears
- Blaren/ schaafwonden

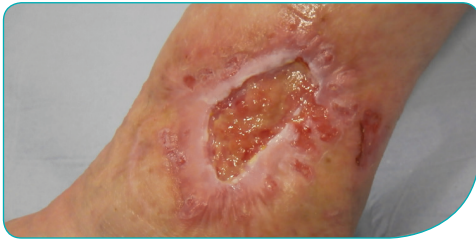

Been ulcera



Decubitus wonden



Brandwonden/ huidschade na radiotherapie



Skin tears



Blaren/ schaafwonden



Specifieke wonden (E.B.)

BESTELINFORMATIE

KERRALITE COOL™ Dressings zijn verkrijgbaar in 3 maten in zowel een variant met als zonder border.

KERRALITE COOL™ Dressing

Maat	Verbanden per doos	Product code	ZI- nummer
6cm x 6cm	5	CWL1004	16797795
12cm x 8.5cm	5	CWL1005	16797809
18cm x 12.5cm	5	CWL1006	16797817

KERRALITE COOL™ Border Dressing

8cm x 8cm	5	CWL1007	16797833
11cm x 11cm	5	CWL1008	16797841
15cm x 15cm	5	CWL1009	16797868

Voor meer informatie over de voordelen van KERRALITE COOL™ Dressings kunt u contact opnemen met uw account manager bij GD Medical, bellen met onze klantenservice op **040- 30 31 099** of kijken op **gdmedical.nl**

Gebruik van de wondafbeeldingen met toestemming van de patiënt.

NB: Er kunnen specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie zijn voor producten Systagenix, Crawford en KCI. Raadpleeg een zorgverlener en de gebruiksinstructies voorafgaand aan de toepassing. Deze informatie is bestemd voor zorgverleners.

Referenties

1. Williams-Kelly W. KerraLite Cool for the debridement of a painful leg ulcer. Poster presented at: Wounds UK Annual Conference; November 13-15, 2017; Harrogate, UK.
2. Jackson S. Absorbency and retention under compression of KerraLite Cool – R&D Trial report CHC R112. Knutsford, UK: Crawford Healthcare; 2017.
3. Ivins N. Evaluation of the mode of action of a new gel wound dressing. Wounds UK. 2014;10(2).
4. Crawford Healthcare. KerraLite Cool Instruction for use. 3rd issue. Crawford Healthcare, Knutsford, UK, 2018.
5. Johnson S, et al. A randomised clinical in-market evaluation of Allevyn Life® and KerraLite Cool® border in the management of skin tear wounds. Poster presented at: Wounds UK Annual Conference; November 9-11, 2015; Harrogate, UK.
6. Peplow PV. Glycosaminoglycan: a candidate to stimulate the repair of chronic wounds. Thrombosis and Haemostasis. 2005;94:4-16.