


# KERRAMAX CARE™

SUPER-ABSORBENT DRESSING


## KERRAGAMI™

KERRAMAX CARE™ verbanden zijn zeer conformeerbaar en kunnen dusdanig worden gevouwen dat een grote variëteit aan verschillende wonden behandeld kunnen worden.

### Tussen tenen/ vingers

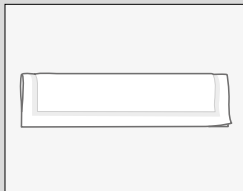


1. Vouw een 10cm x 22cm over de lengte doormidden

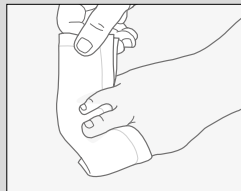


2. Weef tussen de tenen/ vingers door


### Hiel/ elleboog

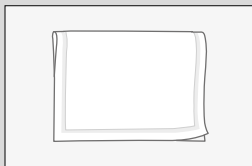


1. Vouw een 10cm x 22cm doormidden

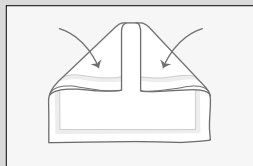

2. Vouw beide hoeken naar binnen

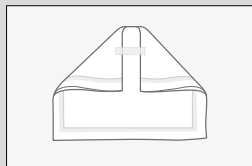

3. Breng tape aan om de gevouwen hoeken op hun plek te houden

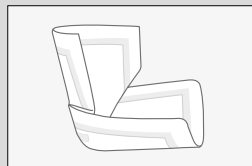


4. Open het gevouwen verband



5. Plaats op hiel/ elleboog

### Been/ arm

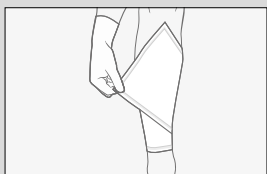

1. Plaats een 20cm x 50cm aan de onderkant van het been/ arm



2. Vouw het verband rond het been/ arm




3. Zorg dat het verband overlapt zodat er geen openingen zijn



4. Zet het verband vast met retentie of compressieverband


### Aanbrengen KERRAMAX CARE™ Multisite:

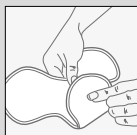

Borst



Schouder

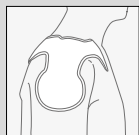


Elleboog




Heup



Lies

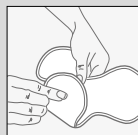

Hiel

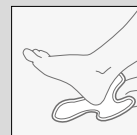

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw account manager, bellen met onze klantenservice +32(0)2 808 58 80 of kijken op [gdmedical.be](http://gdmedical.be)