

ACTISORB™ SILVER 220

ACTIVATED CHARCOAL DRESSING WITH SILVER

Ne pas se contenter
de masquer l'odeur
**s'attaquer à la
cause**



QU'EST-CE QUE C'EST ?

ACTISORB™ Silver 220 est un pansement au charbon actif imprégné d'argent, et recouvert d'une enveloppe en nylon non adhérente.



Prise en charge de l'odeur

ACTISORB™ Silver 220 élimine les mauvaises odeurs et améliore ainsi la qualité de vie du patient¹⁻⁴.



Action antimicrobienne


ACTISORB™ Silver 220 est efficace contre 150 micro-organismes associés aux infections de plaies⁵, y compris SARM et ERV¹⁻³.

MANUEL D'UTILISATION

AVANT L'APPLICATION

Pour des instructions complètes d'utilisation, veuillez consulter la notice. Sélectionner une taille d'ACTISORB™ Silver 220 légèrement supérieure à celle de la plaie. Préparer la plaie selon le protocole de prise en charge des plaies approprié. Avant l'application du pansement, s'assurer que tout tissu nécrotique est éliminé par détersion.

Préparation du pansement

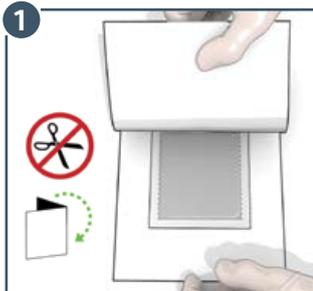

1. Retirer délicatement le pansement de la pochette en utilisant une technique et des pinces aseptiques.
2. Si nécessaire, plier le pansement pour l'adapter à la forme de la plaie. **ACTISORB™ Silver 220** ne doit pas être découpé, sinon des particules de charbon actif peuvent pénétrer dans la plaie et causer une décoloration.


Application du pansement



1. Appliquer **ACTISORB™ Silver 220** délicatement sur la plaie. Les deux côtés du pansement **ACTISORB™ Silver 220** peuvent être appliqués sur la plaie.

Les propriétés du pansement sont utilisées de manière plus optimale lorsqu'**ACTISORB™ Silver 220** est en contact direct avec la plaie.

Application du pansement secondaire

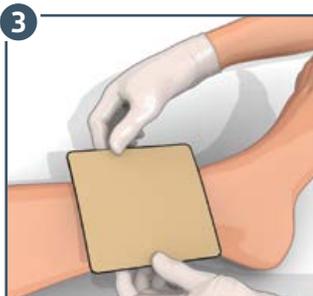

1. Couvrir et maintenir en place **ACTISORB™ Silver 220** avec un pansement secondaire tel que les pansements de la gamme **TIELLE™**.

Choisir le pansement secondaire en fonction du taux d'exsudation. Si nécessaire, le pansement peut être maintenu en place pour faciliter l'application.

Changement et retrait du pansement



1. **ACTISORB™ Silver 220** peut rester sur la plaie jusqu'à 7 jours, en fonction du taux d'exsudation. Le pansement absorbant secondaire peut être changé selon les besoins.
2. Retirer délicatement le pansement secondaire.
3. Retirer délicatement **ACTISORB™ Silver 220** du lit de la plaie et l'éliminer.


QUAND FAUT-IL L'UTILISER ?

ACTISORB™ Silver 220 est indiqué pour la prise en charge d'une contamination, d'une infection ou d'une odeur d'origine bactérienne dans un large éventail de plaies, y compris :

- escarres de décubitus
- ulcères de jambe causés par différentes étiologies
- ulcères du pied diabétique
- carcinomes bourgeonnants
- plaies traumatiques et chirurgicales présentant une contamination, une infection ou une odeur d'origine bactérienne.



ACTISORB™ Silver 220 est approprié pour une utilisation avec une bande de compression⁶.

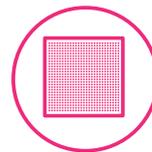

ACTISORB™ Silver 220 peut être associé à une couche de contact primaire non adhérente, comme **ADAPTIC TOUCH™**.

La plus grande étude sur la surveillance des plaies jamais entreprise

94.8%
des 12 444 patients ont présenté une amélioration ou une cicatrisation^{7,8}

ACTISORB™ SILVER 220

Taille	Nb de pansements par boîte	Code Systagenix
6.5cm x 9.5cm	10	MAS065
10.5cm x 10.5cm	10	MAS105
10.5cm x 19cm	10	MAS190

Pour en savoir plus sur les avantages de **ACTISORB™ Silver 220** contactez votre représentant au **+32 (0)2 808 58 80** ou visitez **gdmedical.be**