

Port de connexion de l'alimentation

Écran tactile

Réservoir

Bouton d'alimentation

Pause audio du signal sonore

Démarrage ou arrêt de la thérapie

Icône en rotation = la pression négative est appliquée


Aide

Niveau de la batterie



Guide de référence rapide du système de thérapie

Mode de l'écran
Date actuelle
Heure actuelle

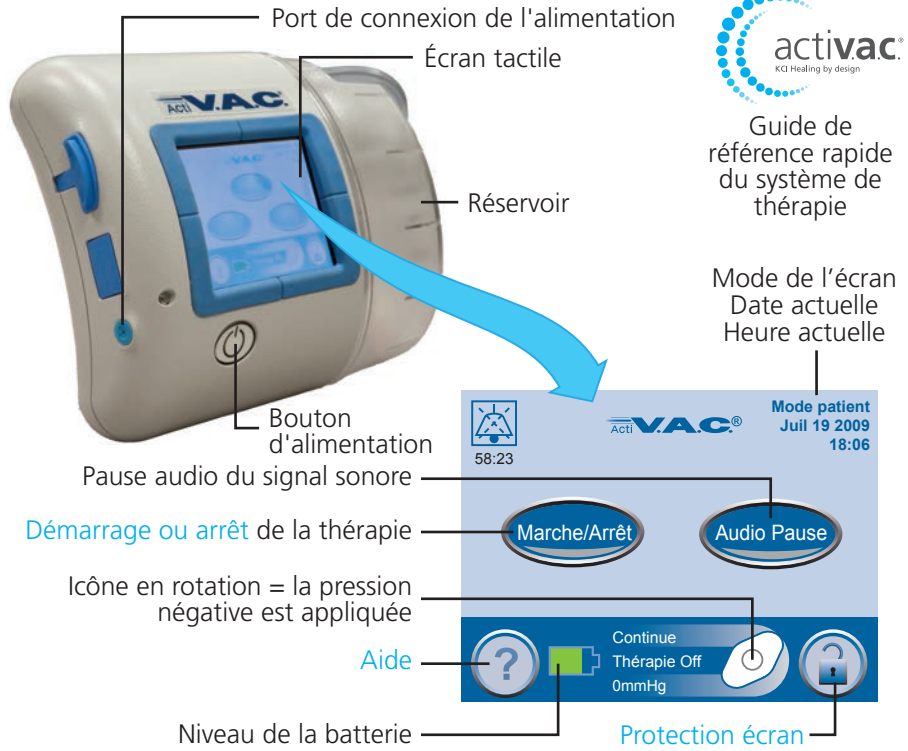

Protection écran

Avant utilisation de l'unité de thérapie ActiV.A.C.®

Passer en revue ce guide de référence rapide. Conserver ce guide dans la poche de la sacoche de transport de l'unité de thérapie.

Passer en revue le manuel d'utilisation avec votre médecin ou votre infirmier.

Passer en revue la fiche d'informations de sécurité avec votre médecin ou votre infirmier. Conserver également cette fiche dans la poche de la sacoche de transport de l'unité de thérapie.

Se reporter au guide d'utilisation pour consulter la foire aux questions à propos de l'unité de thérapie ActiV.A.C.®.

En cas d'urgence, contacter votre médecin ou composer votre numéro de contact local d'urgence.

Démarrage du système V.A.C.® Therapy



Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant environ deux secondes pour mettre l'unité de thérapie sous ou hors tension.



Appuyer sur ce bouton pour démarrer ou arrêter la thérapie.

Vert = système sous tension, gris = système hors tension

Retrait du réservoir



Appuyer sur la languette du dispositif de verrouillage du réservoir.

Retirer le réservoir de l'unité de thérapie en tirant dessus.

Mise en place du réservoir



Faire glisser le réservoir par-dessus le guide du dispositif de verrouillage du réservoir.

Ne pas tordre ni tourner le réservoir.

Presser fermement le réservoir contre l'unité de thérapie jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

Alertes et alarmes

Pour obtenir des informations détaillées, se reporter au manuel d'utilisation.



KCI USA, Inc.
San Antonio, TX 78219 USA
1-800-275-4524
www.kci1.com



KCI Medical Products (UK), Ltd.
Wimborne, Dorset
BH21 7SH
United Kingdom
www.kci-medical.com

Toutes les marques commerciales mentionnées aux présentes sont la propriété de KCI Licensing, Inc, ses filiales et / ou ses concédants de licence. ©2012 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. 340091-06 Rev C 09/2012