



VOYANTS ET ALARMES DE L'APPAREIL DE THÉRAPIE PREVENA™ 125



Voyant d'avertissement

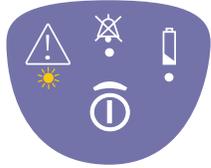
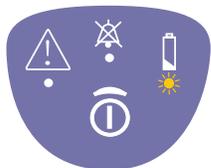
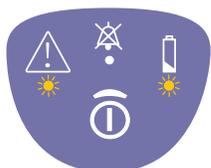
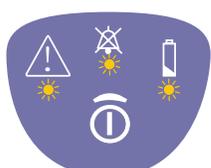


Alarme sonore (interrompue)



Niveau de charge de la batterie

Ceci est un guide rapide. Pour plus d'informations, consultez le guide des cliniciens du système PREVENA™

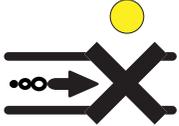
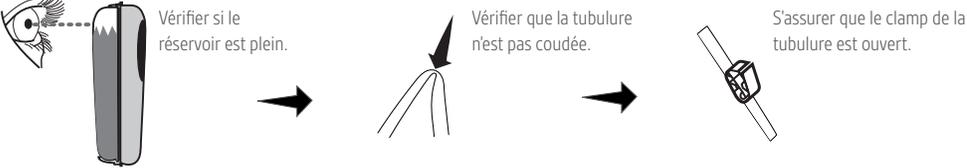
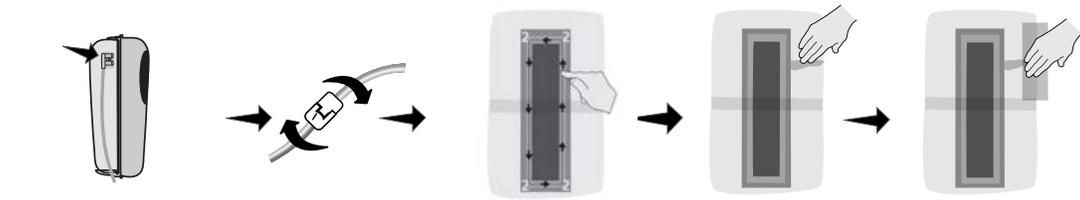
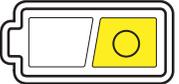
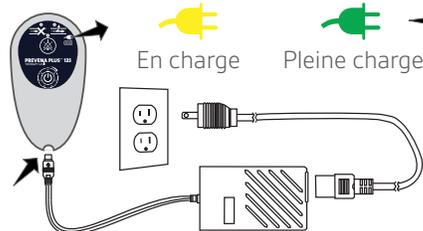
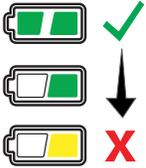
Type d'alarme	Résolution du problème
<p>Alarme de prise d'air Un signal sonore, un voyant jaune continu.</p> 	<p>Pour vérifier l'application correcte du pansement pour incisions PREVENA™, l'appareil de thérapie PREVENA™ 125 est équipé de la fonctionnalité VISICHECK™. Presser deux fois sur le bouton Marche/Arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un voyant : Excellent - Deux voyants : Bon - Trois voyants : Minime <p>Si la fonctionnalité VISICHECK™ indique un taux de prise d'air « Minime », procéder comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que le réservoir est verrouillé dans l'appareil. - Vérifier les connecteurs de tubulure afin de garantir qu'ils sont complètement engagés et verrouillés. - Lisser les éventuels plis dans l'adhésif à l'aide du doigt. - Utiliser les bandelettes adhésives PREVENA™ (placées dans l'emballage du pansement) pour aider à assurer l'étanchéité autour du pansement. - Appuyer fermement sur les bords du pansement.
<p>Alarme de réservoir plein Deux signaux sonores, un voyant jaune continu.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier le niveau de liquide dans le réservoir. 2. Si le réservoir n'est pas plein, vérifier l'absence de pliure ou de pincement des tubulures. 3. Si le réservoir est plein, mettre l'appareil hors tension. 4. Contacter le représentant KCI local.
<p>Alarme de batterie faible Faible - Un signal sonore long, un voyant jaune continu. Critique - Un signal sonore, répété rapidement, dont le volume augmente, deux voyants jaunes continus.</p> 	<p>Cette unité de thérapie est livrée avec trois piles AA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maintenir le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre l'unité. 2. Pousser en appuyant sur le panneau à l'arrière de l'unité pour l'ouvrir. 3. Introduire trois piles AA (piles au lithium de préférence). 4. Pour fermer le panneau, le pousser en appuyant dessus. 5. Maintenir le bouton enfoncé pendant deux secondes pour mettre en marche l'unité.
<p>Alarme d'erreur du système Un signal sonore, répété rapidement, dont le volume augmente, deux voyants jaunes continus.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maintenir le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre l'unité. 2. Maintenir le bouton enfoncé pendant deux secondes pour remettre en marche l'unité. 3. Si l'unité de thérapie ne fonctionne toujours pas, contacter le représentant KCI local.
<p>Fin de la durée de vie du dispositif Trois voyants allumés indiquent que le cycle est terminé. Un signal sonore répétitif durera pendant 15 secondes puis l'unité s'éteindra.</p> 	<p>Contactez le représentant KCI local.</p> <p>Cycle de vie = 192 heures (huit jours)</p>

PREVENA PLUS™

SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE DES INCISIONS



GUIDE RAPIDE

Type d'alarme	Résolution du problème
<p>Alarme de blocage</p>  <p>L'alarme sonore de blocage émet deux signaux sonores toutes les 15 secondes.</p>	 <p>Vérifier si le réservoir est plein.</p> <p>Vérifier que la tubulure n'est pas coudée.</p> <p>S'assurer que le clamp de la tubulure est ouvert.</p>
<p>Alarme de prise d'air</p>  <p>L'alarme de prise d'air émet deux signaux sonores toutes les 15 secondes.</p>	 <p>S'assurer que le réservoir est correctement enclenché dans l'appareil de thérapie. Lorsque le réservoir est installé, un déclic distinct est audible.</p> <p>Vérifier les connecteurs de tubulure afin de garantir qu'ils sont complètement engagés et verrouillés.</p> <p>Appuyer le film adhésif sur la partie adhésive afin d'assurer une parfaite étanchéité.</p> <p>Lisser avec les doigts pour éliminer les plis éventuels.</p> <p>Utiliser les bandelettes adhésives PREVENA™ ou le film adhésif KCI™ restant au niveau du bord extérieur du film afin d'assurer l'étanchéité.</p>
<p>Alarme de batterie faible</p>  <p>L'alarme émet deux signaux sonores toutes les quatre minutes.</p>	 <p>Connexion à l'alimentation</p> <p>En charge Pleine charge</p>  <p>Pleine charge (environ 9 heures restantes)</p> <p>Batterie à moitié chargée (environ deux à sept heures restantes)</p> <p>Charge faible (environ deux heures de thérapie restantes). Charger immédiatement l'appareil pour éviter l'interruption de la thérapie.</p>
<p>Alarme d'erreur du système</p>  <p>Tous les voyants clignotent et deux signaux sonores se répètent toutes les 15 secondes.</p>	<p>Arrêter puis redémarrer l'appareil de thérapie.</p>  <p>Off On</p> <p>Continuer la thérapie.</p> <p>Contactez le représentant KCI local.</p>
<p>Bouton d'interruption d'alarme</p> 	<p>Appuyer pendant trois secondes au centre du bouton d'interruption d'alarme pour interrompre l'alarme sonore pendant deux minutes. Une fois activé, le bouton d'interruption d'alarme s'allume pour indiquer que l'interruption de l'alarme a été sélectionnée. L'alarme sonore se répétera au bout de deux minutes, à moins que le problème ne soit résolu.</p>
<p>Fin de la thérapie</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Un voyant jaune situé au-dessus de l'indicateur de cycle de vie de la thérapie s'allume en continu. L'appareil de thérapie émet huit signaux sonores suivis d'un signal sonore continu de cinq secondes. Ensuite, il s'éteint. Prévenir le médecin référent ou le personnel soignant : si l'appareil de thérapie est arrivé en fin de cycle après sept jours d'utilisation et que le patient tente de l'allumer, l'appareil émet une alarme pendant trois secondes avant de s'éteindre automatiquement.