

PREVENA™


SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE DES INCISIONS



Votre médecin a choisi
la thérapie PREVENA™
POUR LA PRISE EN CHARGE DE
VOTRE INCISION CHIRURGICALE



Votre médecin a sélectionné le système PREVENA™ pour protéger votre incision en :

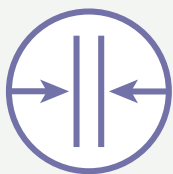

Maintenant ensemble les bords de l'incision



Protégeant contre les sources d'infection extérieures




Éliminant les liquides du site de l'incision

La protection de votre incision est importante pour votre convalescence

- Une **incision** est une ouverture dans la peau et le tissu de l'organisme effectuée au cours d'une intervention chirurgicale, puis fermée à l'aide de produits tels que des sutures chirurgicales, des agrafes ou ces deux méthodes.
- Les incisions cicatrisent à la surface de la peau comme illustré ci-dessous.
- Le soin de votre incision est une étape essentielle de votre convalescence et de votre qualité de vie.

Thérapie PREVENA™

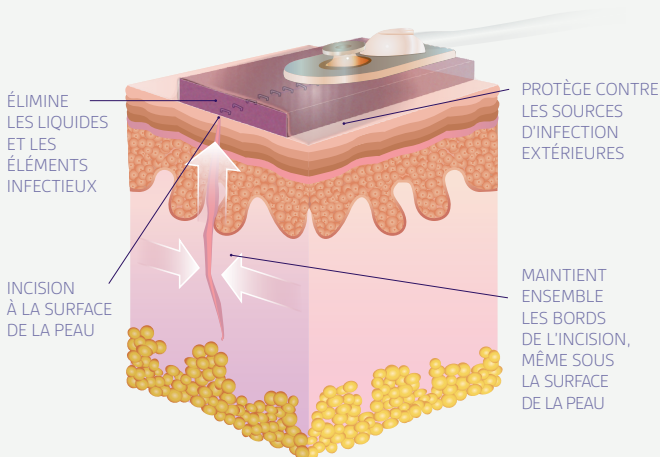

FAQ

Combien de temps dois-je garder la thérapie PREVENA™ sur mon incision ?

- Portez le système aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. L'unité de thérapie se désactive automatiquement après 7 jours.

Faudra-t-il changer le pansement pour incision ?

- Généralement, le pansement n'est pas changé. Suivez les instructions de votre médecin.

Que faire en cas d'alarmes du système PREVENA™ ?


- L'unité de thérapie émet des alarmes visuelles et sonores pour vous alerter d'un problème potentiel, tel qu'une batterie faible ou une fuite d'air. Dans la plupart des cas, le problème est facilement résolu. Consultez le guide du patient sur la thérapie PREVENA™ ou contactez votre représentant Acelyty local.

Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ?

- Le guide du patient sur la thérapie PREVENA™ contient des informations de sécurité et des détails plus complets sur l'utilisation de votre thérapie PREVENA™.

Comment porter votre unité de thérapie PREVENA™

Vous devez utiliser l'unité portable en **permanence** pendant la durée prescrite par votre médecin. Suivez les instructions contenues dans cette brochure pour l'utilisation la nuit ou sous la douche. Il est possible de porter l'unité sous les vêtements et elle est fournie avec une sacoche de transport dotée de lanières ajustables que vous pouvez utiliser de plusieurs façons.

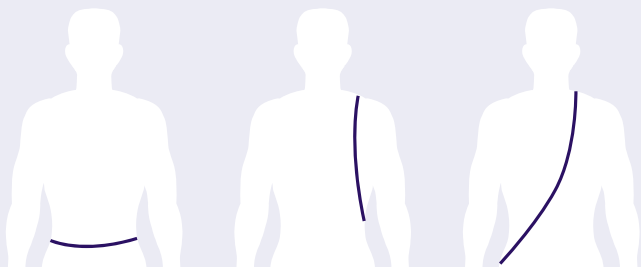

À la taille

À l'épaule

En bandoulière



UNITÉ DE
THÉRAPIE
PREVENA™ 125
ET SACOCHE
DE TRANSPORT

REMARQUE : le système PREVENA™ n'est pas indiqué pour une utilisation chez l'enfant.

EN QUOI CONSISTE LA THÉRAPIE PREVENA™ ?

La thérapie PREVENA™ est un système jetable qui utilise la **pression négative** (aspiration) pour protéger votre incision.

Présentation du système PREVENA™

Vous recevrez le système PREVENA™ PEEL & PLACE™ ou le système PREVENA PLUS™ après votre intervention chirurgicale. Les deux systèmes PREVENA™ fonctionnent de la même manière, à quelques différences près.

Composants de votre système :

- Une unité de thérapie qui applique une pression négative sur le pansement
- Un pansement doté d'une protection étanche placé sur votre incision
- Une tubulure de connexion
- Un réservoir qui recueille le liquide
- Un chargeur de batterie (l'unité de thérapie PREVENA PLUS™ fonctionne avec une batterie rechargeable)
- Une sacoche de transport avec lanières réglables



REMARQUE : Le système PREVENA™ peut être utilisé sur différents types d'incisions. La taille et l'emplacement de l'incision peuvent ne pas correspondre à l'illustration ci-dessus.

ENTRETIEN DE VOTRE UNITÉ DE

Unité de thérapie PREVENA PLUS™ 125

Systeme :

Placez votre unité de thérapie dans un endroit sûr de sorte que :

- La tubulure ne soit pas tordue ou pincée
- L'unité ne risque pas de tomber d'une table ou sur le sol



Douche :

Si votre médecin vous y autorise, vous pouvez prendre une douche rapide et superficielle. N'arrosez pas directement l'unité de thérapie. **N'immergez pas le pansement dans l'eau. Avant de vous doucher, débranchez le pansement de l'unité de thérapie.**

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que la thérapie s'arrête.
2. Fermez le clamp situé sur la tubulure de connexion.
3. Débranchez la tubulure de l'unité de thérapie.
 - Lors du séchage avec une serviette, évitez de déplacer ou d'endommager le pansement.

Consultez le guide du patient sur la thérapie PREVENA PLUS™ pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Batterie :

- Cette unité de thérapie comporte une batterie rechargeable associée à un chargeur.
- Emportez le chargeur si vous sortez pendant de longues périodes.
- À des fins pratiques, envisagez de charger la batterie de l'unité de thérapie lorsque vous dormez.

THÉRAPIE PREVENA™

Unité de thérapie PREVENA™ 125

Systeme :

Placez votre unité de thérapie dans un endroit sûr de sorte que :

- La tubulure ne soit pas tordue ou pincée
- L'unité ne risque pas de tomber d'une table ou sur le sol



Douche :

Si votre médecin vous y autorise, vous pouvez prendre une douche rapide et superficielle. N'arrosez pas directement l'unité de thérapie. **N'immergez pas le pansement dans l'eau.**

- Lors du séchage avec une serviette, évitez de déplacer ou d'endommager le pansement.

Consultez le guide du patient sur la thérapie PREVENA™ pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Batterie :

- Cette unité de thérapie est fournie avec trois piles de taille AA et ne peut pas être rechargée.
- Il est recommandé de disposer de piles de rechange. Lorsque les piles sont vides, consultez les informations sur le remplacement des piles dans le guide du patient sur la thérapie PREVENA™.

Votre pansement et la thérapie PREVENA™

N'essayez pas de retirer ou de regarder sous le pansement durant l'application de la thérapie.

Il est important d'aborder les avantages et risques potentiels d'une thérapie spécifique avec votre médecin pour décider si elle vous convient. Veuillez consulter votre médecin traitant si vous avez des questions spécifiques et pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et le fonctionnement du système PREVENA™.

REMARQUE : il existe des indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité propres à la thérapie PREVENA™. Veuillez consulter les instructions du guide du clinicien sur le système PREVENA™ applicables avant l'application.

Copyright 2017, 2018 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de KCI Licensing, Inc., de ses filiales et/ou de ses concédants de licence.
PRA-PM-FR-00031 (05/18)

