

**SNAP**<sup>TM</sup>  
THERAPY SYSTEM




## Dites bonjour au système de thérapie SNAP<sup>TM</sup> ...

une thérapie par pression négative qui  
s'inscrit dans votre mode de vie

### QUESTIONS FRÉQUENTES



## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE THÉRAPIE SNAP™

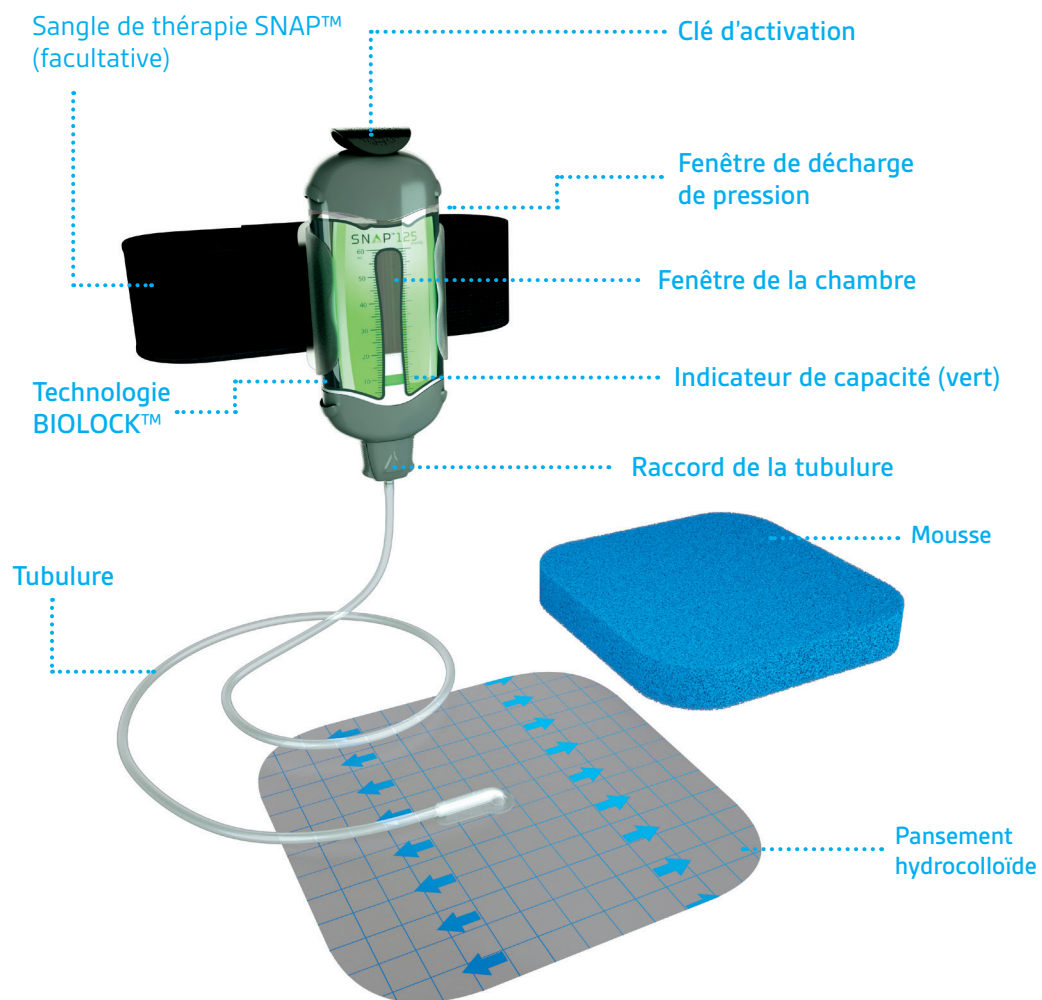

## QUESTIONS FRÉQUENTES

### Qu'est-ce que le système de thérapie SNAP™ ?

Le système de thérapie SNAP™ est un système de thérapie par pression négative de petite taille, portable et simple à utiliser. Le système SNAP™ est actionné de façon mécanique, complètement silencieux et conçu pour permettre l'élimination des excès de liquide, ce qui peut favoriser la cicatrisation des plaies.

### Pendant combien de temps vais-je recevoir la thérapie par le système de thérapie SNAP™ ?

La durée de la thérapie peut varier en fonction du type de plaie et du délai jugé nécessaire par votre professionnel de santé pour obtenir les résultats souhaités. Quelle que soit la durée de la thérapie, votre pansement devra être remplacé au moins deux fois par semaine.

### Dois-je utiliser le système de thérapie pendant la nuit ?

En règle générale, il est préférable de garder le système à pression négative toute la nuit ; vous devez toutefois demander l'avis de votre professionnel de santé.

### Est-il possible de prendre un bain ou une douche tout en portant le système de thérapie SNAP™ ?

Les patients peuvent prendre des douches ou des bains avec le système de thérapie SNAP™. En cas de bain, ne pas submerger le système de thérapie SNAP™ dans l'eau.

### Ressentirai-je une douleur lorsque le système de thérapie SNAP™ sera appliqué ?

Le niveau de confort est individuel à chaque utilisateur. Lors de l'application de la pression négative, il est possible que vous ressentiez une légère sensation de traction au site du pansement. En cas de gêne ou de douleur, parlez-en à votre professionnel de santé.

### Des réactions allergiques ?

Veillez contacter votre professionnel de santé si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants : démangeaisons, rougeurs de la peau autour du pansement, gonflement autour du pansement.



## QUESTIONS FRÉQUENTES

### Comment savoir si le système fonctionne ?

Le système de thérapie SNAP™ est en fonctionnement et activé si :

- l'indicateur de capacité VERT est visible et stationnaire (fig. 6)
- le pansement SNAP™ présente un aspect « comprimé »
- le pansement SNAP™ est dur au toucher

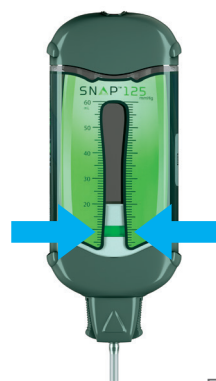


Fig. 6

REMARQUE : Inspecter visuellement le système au moins une fois toutes les 8 heures.

### Quand faut-il remplacer la cartouche de thérapie SNAP™ ?

Remplacez la cartouche de thérapie SNAP™ lorsque l'indicateur de décharge de pression rouge est visible (fig. 7) et que la cartouche de thérapie SNAP™ est remplie d'exsudats. Suivez les étapes indiquées à la page 6 si un traitement par le système de thérapie SNAP™ est souhaité ou indiqué par votre professionnel de santé.

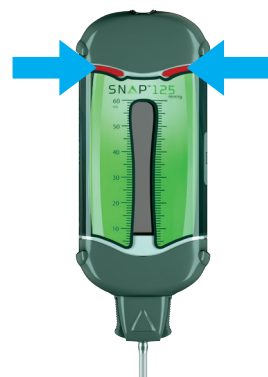


Fig. 7

\*Si l'indicateur de pression rouge est visible, mais que la cartouche de thérapie SNAP™ n'est pas remplie, réinitialisez la cartouche de thérapie SNAP™ à l'aide de la clé d'activation. Consultez le mode d'emploi ou bien contactez votre professionnel de santé.

## POUR VOUS PERMETTRE DE VIVRE VOTRE VIE, SANS LIMITES

### Qui est KCI ?

KCI est une société internationale qui se spécialise dans le traitement avancé des plaies.

Le siège de KCI est situé à San Antonio, au Texas (États-Unis), et la société emploie près de 5 000 salariés à l'échelle mondiale.

La gamme de produits KCI propose des solutions disponibles dans le monde entier qui sont à la pointe du secteur en termes de qualité, de sécurité et d'expérience des clients.

Les produits KCI sont conçus pour gérer les besoins en matière de thérapie avancée des plaies grâce à des solutions de haute qualité qui apportent de meilleures issues cliniques aux patients.





## QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment remplacer la cartouche de thérapie SNAP™ ?



1 Retirer la cartouche de thérapie SNAP™ de son attache de transport.



2 Pincer les boutons de retrait situés sur le raccord de tube et retirer le raccord de la cartouche de thérapie SNAP™.



3 Introduire le raccord de tube dans la nouvelle cartouche de thérapie SNAP™.



4 Enfoncer la clé d'activation pour la libérer et la retirer de la nouvelle cartouche de thérapie SNAP™.



5 Remettre la cartouche de thérapie SNAP™ dans son attache de transport.

## DÉPANNAGE

| Problème   | Cause possible   | Solution possible   |
|--|--|---|
| <p>Le pansement n'est pas étanche et l'indicateur de décharge de pression rouge EST VISIBLE</p> <p>OU</p> <p>L'indicateur de capacité vert ne reste pas stationnaire dans la fenêtre de la chambre</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il est possible que les raccords de la tubulure ne soient pas corrects</li><li>• Une fuite peut exister entre l'hydrocolloïde et la peau</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que les raccords de la tubulure sont corrects</li><li>• Lissez le pansement avec les doigts pour aplanir les plis</li><li>• Recollez les bords du pansement à l'aide d'un film ou d'un champ adhésif</li></ul>                                 |
| <p>Le pansement n'est pas étanche et l'indicateur vert de capacité est stationnaire</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il est possible que la tubulure soit obstruée</li><li>• Le pansement peut être obstrué</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Examinez la tubulure pour détecter une occlusion ou des pliures éventuelles. A besoin, redresser la tubulure ou remplacer le kit de pansement SNAP™</li><li>• Une occlusion peut être présente au niveau du pansement. Remplacez le pansement</li></ul> |

En cas de doute, contactez votre professionnel de santé.

## PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Contactez votre professionnel de santé en cas de fuite du pansement SNAP™. Si vous ne pouvez pas consulter votre professionnel de santé dans les 24 heures, retirez la cartouche de thérapie SNAP™, le pansement SNAP™ et tous les autres matériaux du pansement et recouvrez la plaie d'une compresse de gaze stérile ou d'un autre pansement selon les consignes de votre professionnel de santé.
- Contactez immédiatement votre professionnel de santé si vous éprouvez des signes d'infection tels qu'un gonflement accru, de la fièvre, de la douleur ou une rougeur dans la zone de la plaie. Retirez la cartouche de thérapie SNAP™, le pansement SNAP™ et tous les autres matériaux du pansement et recouvrez la plaie d'une compresse de gaze stérile ou d'un autre pansement selon les consignes de votre professionnel de santé.

## QUI CONTACTER :

Emplacement pour coller une  
étiquette portant les coordonnées  
de l'établissement local

Service clients GD Medical: **+32 (0) 2 808 58 80**

### Important

Consultez le mode d'emploi du système de thérapie SNAP™ fourni avec chaque kit de pansements SNAP™ pour obtenir des informations de sécurité et des instructions complètes. Un guide à l'intention du patient/du personnel soignant est également fourni avec chaque cartouche de thérapie SNAP™.

Ce document ne constitue pas un mode d'emploi complet.

### REMARQUE :

il existe des indications, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des consignes de sécurité propres aux produits et aux traitements de KCI. Veuillez consulter un clinicien et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation.

Copyright 2017 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété exclusive de KCI Licensing, Inc., de ses filiales et/ou de ses concédants de licence. PRA001121-R0-OUS, FR (11/17)