

SYSTÈME DE THÉRAPIE SNAPTM

TRAITEZ LES PLAIES CHRONIQUES AVEC UN
DISPOSITIF MÉCANIQUE DE THÉRAPIE PAR
PRESSION NÉGATIVE



DISPOSITIF DE TRAITEMENT SMART NEGATIVE PRESSURETM

Le dispositif de traitement SNAP™ associe la simplicité d'utilisation des pansements modernes et les bienfaits avérés¹ du traitement des plaies par pression négative. Le dispositif de traitement SNAP™ est indiqué pour la prise en charge des patients pouvant bénéficier d'un traitement des plaies par pression négative, en particulier car le dispositif facilite la cicatrisation de la plaie grâce au nettoyage de petites quantités d'exsudat.



Technologie à cartouche silencieuse

Son design innovant et portable permet le traitement des plaies par pression négative sans utiliser d'électricité.

Adapté au patient

- Petit et léger - il peut facilement être porté discrètement sous les vêtements
- Alimentation mécanique - sans batterie ni câble électrique
- Silencieux - le sommeil du patient n'est perturbé par aucune alarme

Design innovant

- Un mécanisme à ressort exclusif génère une pression négative constante, à des niveaux identiques (- 125 mmHg)
- La technologie BIOLOCK™ gélifie les exsudats pour un meilleur confinement de la plaie
- Un indicateur visuel permet un suivi simple et précis des niveaux d'exsudat




Conçu pour simplifier le traitement avancé des plaies

- Facile à utiliser avec un temps d'application inférieur à 10 minutes¹
- Il permet une adhésion rapide et facile sur des surfaces de peau inégales et des parties du corps difficiles
- Composants jetables prêts à l'emploi

Kits et accessoires de pansement SNAP™


Les pansements hydrocolloïdes exclusifs offrent une protection des tissus périphériques de la plaie et facilitent le retrait du pansement. Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour simplifier davantage l'application des pansements.

Pansements hydrocolloïdes avancés SNAP™

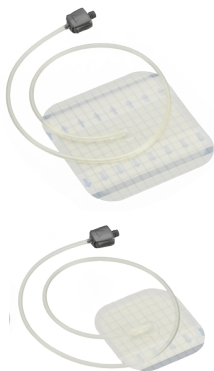


- Les pansements hydrocolloïdes avancés assurent l'étanchéité du pansement et aident à réduire la macération des berges de la plaie
- Un micro port entièrement intégré permet d'obtenir un rayon de courbure étroit pour le traitement des plaies situées dans des zones difficiles d'accès
- Les pansements et les tubulures peuvent être découpés à la taille désirée, en fonction des besoins du patient
- Une soupape antiretour maintient les exsudats à l'écart de la plaie

Pansement pour dérivation SNAP™

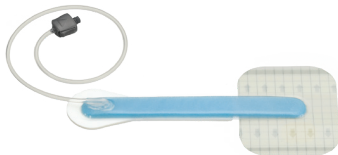

- Dérivation et port intégrés pour une application en une étape
- Rembourrage doux sous la dérivation pour améliorer le confort du patient et minimiser d'autres dommages de pression

Emplacements d'utilisation :

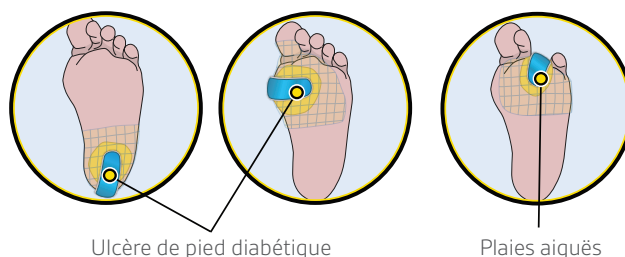

Ulcère de pied diabétique

Plaies aiguës

Une meilleure qualité de vie pour vos patients¹

- Petit, silencieux, discret et léger, peut être caché facilement sous les vêtements
- Assure un minimum d'interférence avec l'activité du patient, son sommeil et ses interactions sociales
- N'interfère pas avec la mobilité du patient, lui permettant de rester actif durant le traitement



Remplissage en mousse

- Facilite la formation des tissus de granulation de la plaie*
- Facilite des niveaux identiques de pression négative*
- La conception hydrophobe intervient dans l'élimination des exsudats*



Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™

- Facilite la mise en place du pansement sur des surfaces de peau inégales et sur des parties du corps difficiles
- Réduit le nombre d'accessoires nécessaires pour protéger la plaie de l'humidité
- Améliore l'adhérence du pansement SNAP™ sur une peau sèche et inégale



Sangle de traitement SNAP™

- La sangle de traitement souple permet au patient de porter discrètement et facilement le dispositif sous ses vêtements

Associe la simplicité d'utilisation des pansements modernes et les bienfaits avérés¹ de la thérapie par pression négative.

DONNÉES CLINIQUES D'ESSAI RANDOMISÉ CONTRÔLÉ

Armstrong¹

132 patients atteints d'ulcères de pied diabétique ou d'ulcères de jambe veineux ont été invités à participer à un essai clinique multicentrique randomisé contrôlé. 118 patients ont été traités soit avec le système de thérapie SNAPTM (n = 59) soit avec le système de thérapie V.A.C.[®] (n = 56), avec 115 patients complétant l'étude.


- Les patients ont été pris en charge pendant 16 semaines ou jusqu'à la cicatrisation complète de la plaie.
- La comparaison du critère d'évaluation principal de réduction de la taille des plaies des patients pris en charge a permis de démontrer la non-infériorité du système de thérapie SNAPTM par rapport au système de thérapie V.A.C.[®] à 4, 8, 12 et 16 semaines ($p = 0,0030$; $0,0130$; $0,0051$ et $0,0044$, respectivement).
- L'étude a montré que l'effet du système de thérapie SNAPTM n'était pas significativement différent de celui du système de thérapie V.A.C.[®] dans la facilitation de la cicatrisation complète de la plaie pour la population étudiée ($p = 0,9620$).
- On a observé moins d'interruptions des activités de la vie quotidienne chez les patients pris en charge avec le système de thérapie SNAPTM que chez les patients pris en charge avec le système de thérapie V.A.C.[®]. Cependant, la douleur associée au traitement n'était pas significativement différente entre les deux groupes de l'étude.
- D'autres avantages mentionnés par les auteurs comprenaient la facilité d'utilisation et le gain de temps lors de l'application des pansements.
- Cependant, malgré la randomisation de l'étude, la taille initiale de la plaie était significativement supérieure chez les patients pris en charge avec le système de thérapie V.A.C.[®], en comparaison avec les patients traités avec le système de thérapie SNAPTM (moyenne de $9,95 \text{ cm}^2$ contre $5,37 \text{ cm}^2$; $p = 0,0093$).



-125 mmHg

Cartouche pour le dispositif de traitement SNAP™ (Unité)

Référence produit	Pression	Capacité
SNPA125	-125 mmHg	60 ml
SNPA125P	-125 mmHg	150 ml

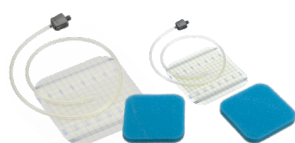

Kit de pansements modernes SNAP™ (Unité)

Référence produit	Taille	Interface
SKTF10X10	10 cm x 10 cm	Mousse
SKTF15X15	15 cm x 15 cm	Mousse



Référence produit	Taille	Interface
BKTF14X11	14 cm x 11 cm	Mousse
BKTF14X11S	14 cm x 11 cm avec l'hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™	Mousse



Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™ (Boîte de 10)

Référence produit	Taille
SRNG10	5 cm de diamètre



Sangle de traitement SNAP™ (Unité)

Référence produit	Taille
STPAS	Petit modèle 46 cm
STPAM	Modèle moyen 53 cm
STPAL	Grand modèle 61 cm



Sangle de traitement SNAP PLUS™ (Unité)

Référence produit	Taille
STPASP	Petit modèle 46 cm
STPAMP	Modèle moyen 53 cm
STPALP	Grand modèle 61 cm

Pour commander un produit ou obtenir plus d'informations, contactez votre représentant au GD Medical.

RÉFÉRENCES

1. Armstrong DG, Marston WA, Reyzelman AM, Kirsner RS. Comparative effectiveness of mechanically and electrically powered negative pressure wound therapy devices: a multicenter randomized controlled trial. Wound Rep Reg. 2012 ; 20(3) :332-341

REMARQUE : Des indications spécifiques, contre-indications, mises en garde, précautions d'utilisation et consignes de sécurité existent pour les produits et dispositifs de traitement KCI. Consultez un médecin et lisez les instructions d'utilisation du produit avant toute application. Ce matériel est destiné aux professionnels de santé.

©2016 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques présentées ici sont la propriété de KCI Licensing, Inc, de ses affiliés et/ou de ses concédants. DSL#16-0639.FR.BE (Rev. 1/17)