

# Portefeuille de produits diabète



**WE  
TAKE  
CARE.**

## LA QUALITÉ À UN PRIX ABORDABLE

L'objectif de GD Medical est de fournir la gamme d'aides au diabète la plus complète, ce qui signifie qualité à un prix abordable.

Nous proposons un portefeuille complet d'aides au diabète brevetées sous les noms de marque Diatesse® et Ht One®, comprenant des glucomètres, bandelettes réactives, lancettes (de sécurité) et aiguilles (de sécurité).

Récemment, nous avons également proposé le capteur de glucose Glunovo sur le marché du Benelux.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les magasins médicaux spécialisés, les fabricants, les prescripteurs et les autorités de certification.

Notre équipe expérimentée d'employés spécialisés possède des connaissances professionnelles et commerciales dans le domaine des aides au diabète et du système de remboursement.

**WE  
TAKE  
CARE.**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>1. Capteur de glucose</b>	<b>4</b>
GluNovo p3 CGM System	5
<b>2. Lecteurs de glycémie</b>	<b>6</b>
Diatessé XPER	7
<b>3. Bandelettes réactives</b>	<b>9</b>
Diatessé XPER glucose	10
Diatessé cétones	10
<b>4. Aiguilles de stylo</b>	<b>11</b>
Ht One ReadyGard™ Duo aiguilles de stylo de sécurité	12
Ht One Plus Fine aiguilles pour stylo à insuline	13
<b>5. Autopiqueurs</b>	<b>14</b>
Autopiqueur Diatessé Soft	14
<b>6. Lancettes</b>	<b>15</b>
Lancettes de sécurité Ht One Flex	16
Lancettes de sécurité Ht One	17
Lancettes Ht One	18
<b>7. Lift Glucotabs</b>	<b>19</b>
Lift Glucotabs comprimés de dextrose	20
Glucogel	20
<b>8. Informations sur la commande</b>	<b>21</b>
<b>9. Détails du contact</b>	<b>22</b>

# 1. CAPTEUR DE GLUCOSE



## SYSTEME GLUNOVO P3 CGM

**Glunovo P3 est un système de surveillance du glucose en continu (disponible en Belgique et au Luxembourg). Glunovo P3 CGM affiche en permanence les niveaux de glucose dans le sang et les tendances dans un graphique.**

Le système CGM Glunovo p3 est associé à l'application Glunovo Pro. La connexion entre le capteur et l'application se fait par Bluetooth®. Le positionnement du capteur est très intuitif. En outre, l'application et l'environnement en ligne sont très clairs, ce qui permet à l'utilisateur et au praticien de comprendre rapidement les tendances.

Le système dispose d'une fonction d'alarme pour les mesure haute et basse. Celles-ci peuvent être réglées à la discrétion de l'utilisateur. L'utilisateur reçoit une notification d'alarme à l'écran lorsque la connexion entre l'émetteur et l'application est établie.

### Caractéristiques

- Période du capteur : 14 jours
- Téléchargement automatique vers le portail web
- Le transmetteur peut être utilisé jusqu'à 3 ans
- Aucun étalonnage n'est nécessaire
- Possibilité de se doucher et de nager
- Les données peuvent être facilement partagées



## 2. LECTEURS DE GLYCÉMIE



## LECTEUR DE GLYCÉMIE ET DE CÉTONE DIATESSE XPER

**Le lecteur de glycémie et de cétonémie Diateste XPER a été développé en pensant aux utilisateurs d'appareils fonctionnels d'aujourd'hui. Le système devait être convivial, moins lourd et facile à manipuler.**

**Avantages du lecteur de glycémie et de cétonémie Diateste XPER :**

### **Haute qualité**

- Certifié CE, ISO et Tüv

### **Exact**

- Utilise l'enzyme GDH-FAD pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec l'oxygène
- Mesure et corrige l'hématocrite, de sorte qu'il n'affecte pas la valeur de glucose (la plage d'hématocrite est de 0 à 70 %)
- Aucune interférence avec les médicaments ; la valeur n'est pas affectée par les médicaments.

### **Capacité à mesurer les cétones**

- Étant donné que l'acidocétose associée au diabète peut entraîner un coma diabétique, il est fortement recommandé de mesurer les cétones dans des circonstances particulières.

### **Facile à utiliser**

- Structure de menus simplifiée
- Mémoire étendue (1000 mesures)
- Les mesures sont faciles à lire via l'application GlucoCheck (pour Android et iOS) ou via l'ordinateur (sans fil ou via un câble USB)
- La fonction d'éjection de la bandelette signifie que l'utilisateur n'a pas à toucher la bandelette de test, ce qui est hygiénique.

### **Convient à plusieurs publics**

- Utilisateurs qui doivent s'injecter beaucoup
- Utilisateurs qui n'ont pas besoin d'injecter beaucoup
- Convient aux nouveau-nés et aux patients dialysés (gamme d'hématocrite 0-70%).



## Suivre le résultat

- Application GlucoCheck avec calculateur de bolus
- Possibilité d'indiquer si une valeur de glycémie a été saisie avant (AC) ou après (PC) un repas
- Logiciels informatiques disponibles
- Les mesures peuvent être partagées avec le praticien dans un aperçu pratique

## Autres caractéristiques techniques

- Liaison de données Bluetooth® et USB
- Reconnaissance automatique de la solution de contrôle

## Matériel de soutien pour les utilisateurs et les soignants:

Vidéos explicatives : [www.gdmedical.nl/fr/product/diatesse-xper-2/](http://www.gdmedical.nl/fr/product/diatesse-xper-2/)

## Le lecteur de glycémie Diatesse XPER est disponible dans un pack de démarrage.

Contenu du pack de démarrage:

- 1 lecteur Diatesse XPER
- 1 autopiqueur
- 10 bandelettes de test de glycémie Diatesse XPER
- 10 lancettes Ht-One
- 2 piles (1,5 V AAA)
- Manuel d'utilisation
- Pochette de rangement





### 3. BANDELETTES DE TEST



## BANDELETTES DE TEST DIATESSE XPER - GLUCOSE

La bandelette de test Diatesse XPER contient une technologie très bien pensée avec un seul objectif : garantir à l'utilisateur la mesure la plus fiable.

En utilisant l'or comme matériau conducteur, une très grande stabilité est obtenue. La bandelette de test Diatesse XPER possède également 1 orifice d'aspiration général qui se transforme en 2 orifices d'aspiration internes séparés et 5 électrodes. La 5ème électrode vérifie le volume sanguin (éventuellement) trop faible ou les bulles d'air fournies.

Avec une taille d'échantillon de seulement 0,5 µl, la bandelette réactive Diatesse XPER donne le résultat de la mesure en 5 secondes.



Les bandelettes de test Diatesse XPER peuvent être utilisées jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage. Ceci est unique car la plupart des bandelettes réactives doivent être utilisées dans les 3 à 6 mois suivant l'ouverture de l'emballage. Cela rend également ces bandelettes idéales pour les patients qui n'ont pas besoin de beaucoup de tests.

## BANDELETTES DE TEST DIATESSE CÉTONES

Les bandelettes de test de cétone Diatesse ont été spécifiquement développées pour mesurer les cétones.

Étant donné que l'acidocétose associée au diabète peut entraîner un coma diabétique, il est fortement recommandé de mesurer les cétones dans des situations spécifiques.



## 4. AIGUILLES À INSULINE



## AIGUILLES DE STYLO DE SÉCURITÉ HT-ONE READYGARD™ DUO

L'aiguille de stylo de sécurité Ht-One ReadyGard™ Duo est une aiguille pour stylo de sécurité où l'aiguille est cachée à l'avant et à l'arrière après utilisation, ce qui réduit l'exposition du soignant à l'aiguille.

Tant avant qu'après l'utilisation de l'aiguille pour stylo de sécurité duo, il n'y a aucun risque pour l'utilisateur et le soignant de se blesser par piqûre d'aiguille, ce qui signifie que ce produit répond pleinement aux exigences de sécurité en vigueur.

La gaine de protection de l'aiguille du stylo de sécurité Ht-One ReadyGard™ Duo réduit la peur de l'utilisateur de piquer, car l'aiguille n'est pas clairement visible.



Après utilisation, un **indicateur rouge** clair indique que l'aiguille du stylo de sécurité a été utilisée.



Le principal avantage par rapport aux autres aiguilles pour stylos de sécurité Duo est qu'en raison de la plus grande surface de contact du ReadyGard Duo, moins de pression doit être exercée sur la peau, ce qui rend l'injection plus confortable pour l'utilisateur. De plus, moins d'étapes sont nécessaires lors de l'utilisation, de sorte que l'application peut être effectuée rapidement et facilement.

L'aiguille pour stylo de sécurité Ht-OneReadyGard™ Duo est actuellement disponible dans les tailles suivantes :



5mm – 31 G - 100 pièces par paquet



## AIGUILLES À INSULINE HT-ONE PLUS FINE

Les aiguilles pour stylo Ht-One PlusFine sont destinées à l'administration d'insuline, stériles et à usage unique.

Les aiguilles pour stylos sont universelles et conviennent à tous les stylos à insuline courants.

Les aiguilles du stylo ont un revêtement en silicone pour une piqûre confortable sans irritation de la peau.

Chaque type d'aiguille de stylo a sa propre couleur.



**Matériel de soutien pour les utilisateurs et les soignants :**

Vidéo d'instruction: [https://youtu.be/z\\_94MZX919U](https://youtu.be/z_94MZX919U)

Les aiguilles pour stylo à insuline Ht-One Plus Fine sont disponibles en quatre tailles :



4mm:  
0.23mm 32G x 4mm



5mm:  
0.25mm 31G x 5mm



6mm: 0.25mm 31G  
x 6mm



8mm:  
0.25mm 31G x 8mm

## 5. AUTOPIQUEUR



### AUTOPIQUEUR DIATESSE SOFT

L'autopiqueur Diatesse Soft offre les avantages suivants :

- Modèle universel
- A utiliser avec les lancettes Ht-One (voir page 15)
- 9 niveaux de perforation
- Insertion et retrait sûrs et faciles des lancettes
- Mécanisme de piqûre aligné et calibré (moins douloureux)
- Capuchon verrouillable

**Matériel de soutien pour les utilisateurs et les soignants :**

Vidéo d'instruction: <https://youtu.be/Y8CjcVgn3-g>



## 6. LANCETTES (DE SÉCURITÉ)



## LANCETTE DE SÉCURITÉ HT ONE FLEX

**La lancette de sécurité Ht One Flex augmente la flexibilité et le confort des patients grâce à trois profondeurs de piqûre réglables. Le personnel soignant est ainsi protégé de manière optimale contre les piqûres d'aiguille.**

### Facile à utiliser

Il est facile d'obtenir le volume sanguin souhaité. Les pictogrammes figurant sur l'emballage expliquent clairement comment utiliser notre lancette de sécurité Flex et régler la profondeur de piqûre souhaitée.

### Une piqûre confortable

La pointe de l'aiguille est à facettes et comporte une couche de silicone pour un prélèvement confortable. Elle assure en outre une pénétration optimale de la peau et des piqûres pratiquement indolores. Convient aux adultes, aux enfants de moins d'un an et aux nouveau-nés.

### Sans danger

En raison de l'usage unique, il n'y a pas de risque de contamination croisée. Le mécanisme unique de prélèvement élimine les piqûres involontaires, tandis que la lancette est automatiquement retirée de la peau pour une sécurité optimale. La lancette de sécurité Ht One Flex est disponible en deux variantes, chacune réglable à 3 profondeurs de piqûre différentes :

- 23G avec des profondeurs de ponction de 1,3mm, 1,8mm et 2,3mm
- 28G avec profondeurs de ponction de 1,3mm, 1,8mm et 2,3mm





## LANCETTES DE SÉCURITÉ HT ONE

Les lancettes de sécurité Ht One sont sûres et faciles à utiliser. Un autopiqueur n'est pas nécessaire. Les lancettes de sécurité sont largement utilisées par les professionnels de la santé, car leur utilisation réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille.

### Sûr

- Le système de rétraction automatique empêche l'aiguille pointue de rester exposée après utilisation.
- Cela empêche quelqu'un de se piquer accidentellement ou quelqu'un d'autre.

### Confortable pour l'utilisateur

- Obtenez la même quantité de sang avec beaucoup moins de douleur.
- La technologie brevetée réduit la force d'activation, le bruit et les vibrations.
- Les aiguilles de qualité ultra-tranchantes réduisent au minimum les dommages cutanés et la douleur.
- Une profondeur de ponction constante réduit le risque de répétition de la procédure.

### Facile à utiliser

- Il suffit de tourner et d'appuyer.
- Aucun autopiqueur requis et donc pas besoin de retirer et d'insérer des aiguilles.
- Utilisation intuitive, adaptée à tous les âges.
- Petit, facile à transporter.

Les lancettes de sécurité Ht One sont disponibles en 4 tailles/profondeurs de perforation :



1.5 mm



1.8 mm



2.2 mm



2.4 mm

## LANCETTES HT ONE

Les lancettes Ht One sont simples d'utilisation, stériles, à usage unique et applicables avec l'autopiqueur Diatesse.

Cependant, grâce à leur conception universelle, les lancettes Ht One peuvent également être utilisées en combinaison avec tous les autopiqueurs courants.

Les lancettes sont disponibles dans un diamètre d'aiguille de 28G et 30G et emballées par 100 pièces.



## 7. LIFT GLUCOTABS & GLUCOGEL



## LIFT GLUCOTABS COMPRIMÉS DE DEXTROSE & GLUCOGEL

**Les Lift GlucoTabs contiennent 3,7 grammes de glucides à action rapide. Cela permet à l'utilisateur d'absorber facilement la bonne dose de glucides pour plus d'énergie.**

Les GlucoTabs ne contiennent ni matières grasses, ni sel, ni caféine.

Le tube unique Lift GlucoTabs garde les comprimés frais, secs et les protège de la casse. Les tubes sont faciles à transporter dans un sac ou une poche. Les tubes sont facilement rechargeables avec 10 comprimés du pack de recharge de 50 pièces.

Les Lift GlucoTabs sont disponibles par tube de pièces ou par recharge de 50 pièces dans les saveurs :

- Citron vert
- Myrtille
- Orange
- Framboise

### Glucogel

Glucogel est un gel de glucose rapidement absorbé par la muqueuse buccale.

Ces tubes pratiques à emporter sont idéaux pour les moments où l'on a besoin d'énergie rapidement.

Un paquet contient 3 tubes de gel. Un tube contient 25 grammes dont 40% de glucose, soit 10 grammes de glucose par tube.



## 8. INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

CODE ARTICLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
GD103771	Glunovo P3 sensor (2)
GD103770	Glunovo P3 transmetteur (1)
GD101905	Diatessse XPER pack de démarrage pack + 10 bandelettes de test Diatessse XPER mg/dL
GD100850	Bandelettes de test Diatessse XPER (50 pièces/paquet)
GD104148	Bandelettes réactives Diatessse XPER emballées individuellement (50 pièces/paquet)
GD101439	Diatessse β - bandelettes de test cétoniques (10 pièces/paquet)
GD103699	Ht One ReadyGard Duo aiguilles à stylo de sûreté 5 mm 31G (100 pièces/paquet)
GD100225	Aiguilles à stylo Ht One Plusfine 4mm 32G (100 pièces/paquet)
GD100156	Aiguilles à stylo Ht One Plusfine 5mm 31G (100 pièces/paquet)
GD100157	Aiguilles à stylo Ht One Plusfine 6mm 31G (100 pièces/paquet)
GD100158	Aiguilles à stylo Ht One Plusfine 8mm 31G (100 pièces/paquet)
GD104122	Lancettes de sécurité Ht One Flex 23G (1,3/1,8/2,3mm) (100 pièces/paquet)
GD104124	Lancettes de sécurité Ht One Flex 28G (1,3/1,8/2,3mm) (100 pièces/paquet)
GD101226	Lancettes de sécurité Ht One 1,5 mm (100 pièces/paquet)
GD100195	Lancettes de sécurité Ht One 1,8 mm (100 pièces/paquet)
GD100196	Lancettes de sécurité Ht One 2,2 mm (100 pièces/paquet)
GD101202	Lancettes de sécurité Ht One 2,5 mm (100 pièces/paquet)
GD100141	Lancettes Ht One 28G (100 pièces/paquet)
GD100194	Lancettes Ht One 30G (100 pièces/paquet)
GD101840	Diatessse autopiqueur Soft (1)
GD100228	Solution de contrôle Diatessse XPER 4ml (1)
GD103859	LIFT GlucoTabs framboise tube (10)
GD103860	LIFT GlucoTabs framboise boîte (50)
GD103855	LIFT GlucoTabs orange tube (10)
GD103856	LIFT GlucoTabs orange boîte (50)
GD103857	LIFT GlucoTabs citron/citron vert tube (10)
GD103858	LIFT GlucoTabs citron/citron vert boîte (50)
GD103853	LIFT GlucoTabs myrtille tube (10)
GD103854	LIFT GlucoTabs myrtille boîte (50)
15658171	LIFT GlucoGel 25 grammes (3)



## DÉTAILS DU CONTACT

**GD Medical Belgium B.V.**

Rue Abbé Cuypers 3/ Priester Cuypersstraat 3  
B-1040 Brussel

+32(0) 2 808 58 80

**Customer Service**

+32(0) 2 808 58 80

[customerservice@gdmedical.be](mailto:customerservice@gdmedical.be)

**Site web**

[www.gdmedical.be](http://www.gdmedical.be)

**WE  
TAKE  
CARE.**