

# Facile à manipuler

MAINTENANT AVEC UN MEILLEUR TAUX  
DE TRANSMISSION DE VAPEUR D'EAU\*



## QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le pansement transparent BIOCLUSIVE™ Plus est un pansement auto-adhésif et est composé d'un film transparent en polyuréthane semi-perméable recouvert d'un adhésif acrylique.

BIOCLUSIVE™ Plus:

- Constitue une barrière contre les virus d'un diamètre de 27 nm ou plus (p. ex., VIH et Hépatite B)<sup>†</sup> et contre les bactéries
- Permet la transmission d'oxygène et de vapeur d'eau prévenant ainsi la macération péri-lésionnelle

BIOCLUSIVE™ Plus est flexible, confortable, facile à utiliser et à retirer

- S'adapte aux contours difficiles
- Facilite une application contrôlée et sans gaspillage
- Est imperméable

BIOCLUSIVE™ Plus est transparent et permet ainsi l'inspection de la plaie pendant toute la durée du port.



Barrière contre les  
bactéries et les virus



Facilite un  
environnement humide  
pour la cicatrisation



Fournit une protection  
sûre pour toute la  
durée de port




Permet aux patients de  
prendre une douche tout  
en portant le pansement<sup>†</sup>

# MANUEL D'UTILISATION


Préparer la plaie selon le protocole de prise en charge des plaies.

S'assurer que la peau autour de la plaie est propre et sèche, exempte de traces de graisse, de savon et de détergent. Choisissez un pansement de taille appropriée afin d'avoir un bord d'au moins 2cm chevauchant la plaie.


## Application du pansement

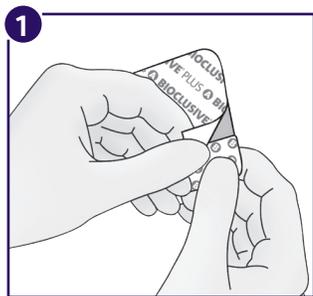

Retirer la bande anti-adhésive centrale la plus grande de la couche adhésive inférieure du pansement (marquée d'un A) et appliquer le pansement directement sur le centre du lit de la plaie, côté adhésif vers le bas. Appuyer sur le côté adhésif exposé du pansement sur la peau entourant la plaie.

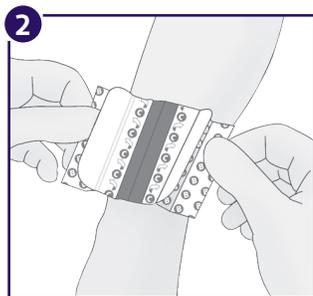

Saisir les languettes de la bande anti-adhésive de la couche inférieure du pansement (marquée d'un B). Décoller les languettes et appuyer les bords restants du pansement sur la peau à l'aide d'un mouvement de roulement. S'assurer que le pansement adhère bien à la peau.

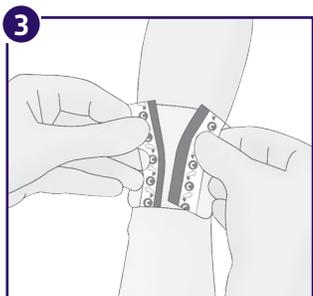

Une fois le pansement appliqué, saisir les languettes supérieures de la bande anti-adhésive (marquée d'un C) et la décoller du centre du pansement vers l'extérieur.

## Retrait du pansement

Pour retirer BIOCLUSIVÉ Plus de la plaie, décoller et soulever délicatement un coin du pansement de la peau. Soutenir la peau pendant le décollement du pansement en étirant horizontalement (et non verticalement) dans le sens du poil.

Pour en savoir plus sur les avantages de BIOCLUSIVÉ Plus contactez votre représentant au **+32 (0)2 808 58 80** ou visitez [gdmedical.be](http://gdmedical.be)

# QUAND FAUT-IL L'UTILISER ?

BIOCLUSIVÉ Plus est indiqué pour le traitement des plaies sans exsudat, ou présentant de faibles taux d'exsudation.

BIOCLUSIVÉ Plus doit être utilisé sous la direction d'un professionnel de la santé pour les indications suivantes :

- Brûlures mineures
- Sites donneurs
- Zones de pression superficielle et ulcères de la jambe
- Plaies postopératoires propres et fermées
- Coupures et abrasions

BIOCLUSIVÉ Plus peut également être utilisé :

- Pour la fixation des cathéters
- Comme pansement de couverture secondaire
- Pour réduire les forces de déchirement et de friction au niveau des zones vulnérables

BIOCLUSIVÉ Plus peut rester en place pendant plusieurs jours en fonction de la quantité d'exsudat.

Pour des instructions complètes d'utilisation, veuillez consulter la notice.

# QU'AVONS-NOUS AMÉLIORÉ ?

- BIOCLUSIVÉ Plus présente un meilleur taux de transmission de vapeur d'eau que BIOCLUSIVÉ™



- BIOCLUSIVÉ Plus s'applique en trois étapes faciles à suivre grâce à des onglets d'application marqués A, B et C.



BIOCLUSIVÉ™ Plus		
Taille	Nb de pansements par boîte	Code Produit
6cm x 7cm	10	BIP0607
10cm x 12cm	10	BIP1012
15cm x 20cm	10	BIP1520
20cm x 30cm	10	BIP2030

\* Par comparaison à BIOCLUSIVÉ™

† Un test in vitro montre que le film transparent des pansements de la marque BIOCLUSIVÉ® Plus constitue une barrière contre les virus d'un diamètre de 27 nm ou plus tout en restant intact et en ne présentant aucune fuite. Données internes.

Données cliniques

1. Morris, L. Clinical efficacy of a transparent film wound dressing. BJN, Vol 10, N9, 2001

© Systagenix Wound Management 2015. Les marques portant le symbole ® ou ™ sont des marques déposées de Systagenix. Tous les autres produits mentionnés dans le présent document sont reconnus comme des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 5070/SYS/FRBE/0816/PRB4213