

Uitwendige Fecale Katheter met geurfilter - KIT



Inhoud:

- Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter
- Fecale Opvangzak
- Klevende Barrièrefilm
- Medical Skin Wipe (reinigungsdoekjes)
- Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Beschrijving:

De **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** van Furine is geschikt om fecale vloeistof weg te voeren van patiënten met sijpelende feces. De vloeistof sijpelt uit de anale opening via de **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** in de **Fecale Opvangzak**.

De **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** kan maximaal 5 dagen op de perianale huid blijven zitten. Hierna wordt de katheter vervangen en wordt de perianale huid gereinigd.

De **Fecale Opvangzak** moet dagelijks worden vervangen en daarna worden weggegooid.

Furine's **Medical Skin Wipe** is een huidvriendelijk, alcohol- en parfuvrij reinigungsdoekje dat is ontworpen om:

- De huid voor te bereiden voordat u Furine's **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** aanbrengt door overtollig vet van de huid te verwijderen.
- De **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** van Furine na gebruik van de huid te verwijderen door de lijm effectief op te lossen en voorzichtig van de huid te verwijderen.

Indicaties:

De **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** van Furine is bedoeld voor personen met een type 6 of type 7 stoelgang op de Bristol Stool Scale (BSS) en bedoeld om fecale vloeistof van het rectum naar de **Fecale Opvangzak** te leiden.

Furine's **Medical Skin Wipe** is geïndiceerd om de huid voor te bereiden voor het aanbrengen van Furine's **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** of andere hechtende Furine-producten.

Furine's **Medical Skin Wipe** is geïndiceerd om lijm op te lossen en te verwijderen bij het verwijderen van Furine's **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** of andere hechtende Furine-producten.

Contra- indicaties:

Furine's **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** mag niet worden gebruikt bij personen die:

- zijn uitgedroogd of harde ontlasting hebben,
- grote aambeien hebben,
- een rectale prolapse hebben
- perianale wondjes hebben of een exsuderende perianale huid.

Gebruik Furine's **Medical Skin Wipe** niet op een beschadigde huid of open wonden, of als er een bekende allergie voor de inhoud is.

Waarschuwingen:

Hergebruik van Furine's **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** of delen ervan kan leiden tot infectie of kruisbesmetting.


Stop met het gebruik van de **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** als er perianale huidirritatie optreedt of als er ontlasting naar de perianale huid lekt.

Furine's **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** mag alleen onder medisch toezicht worden gebruikt door personen met aambeien of andere vormen van anale prolaps.

Furine's **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** moet op kamertemperatuur worden bewaard en mag niet worden gesteriliseerd.

De **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** van Furine kan zijn hechtvermogen verliezen als de patiënt een hoge mate van transpiratie heeft.

Als er een fecale geur uit de fecale opvangzak komt, moet deze worden vervangen. Als de geur aanhoudt na vervanging van de zak, moet het hele systeem worden vervangen, inclusief de katheter zelf.

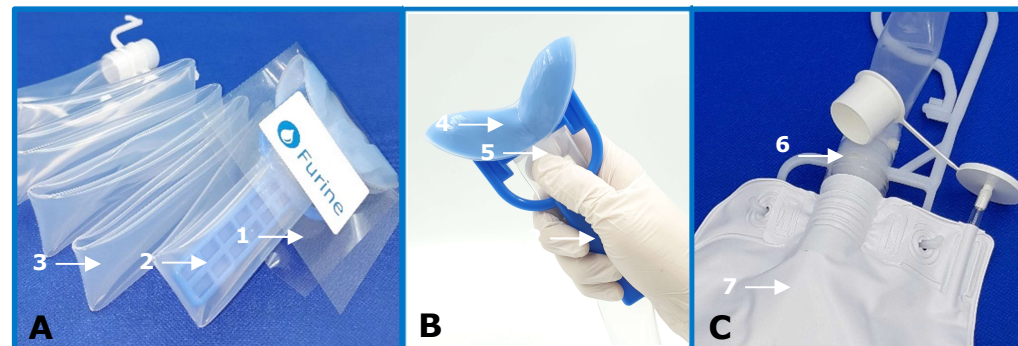

Afbeelding **A**: **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** zoals deze er in de verpakking uitziet. Afbeelding **B**: **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** zonder non-touch folie. Afbeelding **C**: Opvangzak, connector en bedhanger.

- 1: **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** en non-touch folie.
- 2: Aanbrengmiddel voor **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter**.
- 3: Slang van **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter**, die 150 cm doorloopt tot aan het verbindingsstuk (6), dat wordt aangesloten op de fecale opvangzak van Furine (7). Het verbindingsstuk is inclusief bedhanger, zodat de fecale opvangzak aan de bedzijde kan hangen.
- 4: Kraag van **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter**, die bestaat uit Furine's huidvriendelijke kleefstof en een siliconenfilm.
- 5: Tape van **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** die aan de kraag is bevestigd.

Toepassingsgids:

1. Reinig en droog de perianale huid met Furine's **Medical Skin Wipe** voordat u de **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** aanbrengt. Gebruik **geen** reinigende chemicaliën of zeep die olie of vocht inbrengende crème bevat. Gebruik **geen** andere huidbeschermingsfolies. Zorg ervoor dat de huid helemaal droog is.
2. Breng eerst de **Klevende Huidbarrièrefilm** van Furine aan in een breedte van 2-3 cm op de perianale huid rond de anale opening, met behulp van de applicatieruif. Breng slechts een dunne laag aan.
3. Laat de **Klevende Huidbarrièrefilm** 1 tot 1½ minuut drogen terwijl u de billen uit elkaar houdt.
4. Verwijder de non-touch folie van de **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter**, terwijl u tegelijkertijd de katheter gefixeerd houdt door de tape van de katheter vast te houden.
5. Plaats de **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** met behulp van het aanbrengmiddel op de eerder aangebrachte **Klevende Huidbarrièrefilm** op de perianale huid, zodanig dat de kraag is bevestigd aan de huid rond de anale opening. De katheter wordt met behulp van het aanbrengmiddel op de perianale huid gedrukt, zodanig dat deze voor het eerst in contact komt met crena ani en perineum. Vervolgens wordt met twee vingers de rest van de kraag stevig op de omringende huid gedrukt.
6. Verwijder het aanbrengmiddel door het voorzichtig van de perianale huid af te trekken, terwijl u tegelijkertijd de katheter op zijn plaats houdt met de andere hand.
7. Sluit de connector van de **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** aan op de **Fecale Opvangzak** van Furine en plaats de zak aan de bedzijde met behulp van de hanger die in de connector is geïntegreerd. Plaats de zak aan de veiligheidshaken aan de hanger om de zak vast te zetten.
8. De **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** kan 3-5 dagen op de perianale huid blijven zitten. Het wordt aangeraden om regelmatig op lekkage te controleren. De opvangzak kan indien nodig worden vervangen. Als de slang verstopt raakt, kan de ontlasting voorzichtig in de opvangzak worden geduwd door in de slang te knijpen, terwijl tegelijkertijd met de andere hand de kraag van de **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** stevig op zijn plaats wordt gehouden.
9. Na beëindigen van het gebruik wordt de **Uitwendige Fecale Katheter met Geurfilter** van de perianale huid verwijderd door voorzichtig aan de kraag te trekken, terwijl tegelijkertijd de randen van de kraag worden gereinigd met Furine's **Medical Skin Wipe** of een ander doekje op siloxaanbasis. De katheter wordt hierna weggegooid. Eventuele lijmresten op de perianale huid worden vervolgens verwijderd met Furine's **Medical Skin Wipe**.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing		Voor eenmalig gebruik	Zie primaire verpakking	Zie primaire verpakking
REF B06NL22	IFU versie NL-1.0	Furine ApS Industrivaenget 1 3320 Skaevinge Denemarken		