





Instructie voor aanbrengen

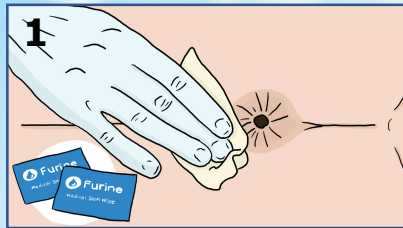

Reinig en droog de perianale huid vooraf het aanbrengen van de **Uitwendige Fecale Katheter**.


- Gebruik **geen** reinigingsmiddelen die olie bevatten of crème.
 - Gebruik **geen** Caviol of een soortgelijke barrièrefilm producten.
 - Zorg ervoor dat de huid helemaal droog en intact is.
- Bereid tot slot de huid voor met een **Medical Skin Wipe** om overtollige olie of vet van de huid te verwijderen en een stevige grip op de huid te verzekeren.

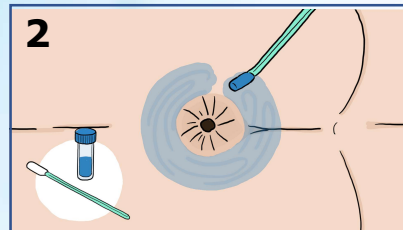

Breng Furine's **Klevende Barrièrefilm** aan op de huid rond de anus met behulp van de swap.

Het moet worden aangebracht in een breedte van 2-3 cm.


Breng slechts een dunne laag aan.

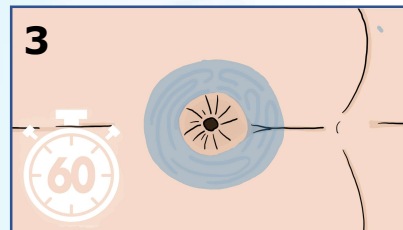

Laat de **Klevende Barrièrefilm** 1-1½ minuut drogen, terwijl u de billen uit elkaar houdt.




Verwijder de non-touch folie van de **Uitwendige Fecale Katheter**, terwijl u tegelijkertijd de katheter stevig bevestigd houdt op de applicator door de strips vast te houden.

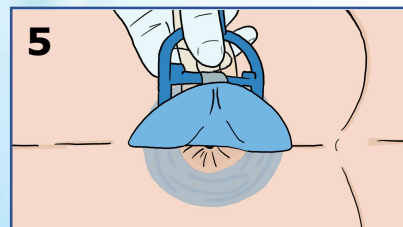

Met behulp van de applicator, wordt de **Uitwendige Fecale Katheter** vervolgens op de huid geplaatst, zodat de flens helemaal rond de anus op de huid wordt gelijmd, op de eerder aangebrachte **Klevende Barrièrefilm**.

De katheter wordt gepositioneerd en stevig op de perianale huid gedrukt, zodat deze eerst contact heeft met crena ani en perineum.

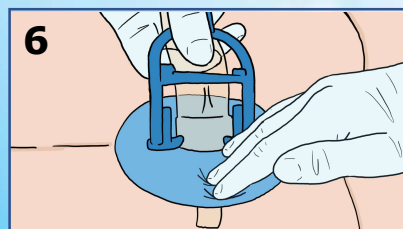

De flens wordt vervolgens met twee vingers stevig op de perianale huid gedrukt over de hele omtrek van de flens.

**Uitwendige
Fecale Katheter**
Veiligheid - Waardigheid - Kwaliteit
van Leven



