

Sacrale toepassing

1. Reinig de wond en de omliggende huid volgens het protocol van de instelling.
2. Maak de omliggende huid droog.
3. Beoordeel de wond.
4. Kies het juiste verbandformaat: het schuimkussen moet de wond overlappen.

Vorbereiding en aanbrengen



Haal het verband uit de verpakking en vouw het dubbel.



Houd beide zij-tabs vast en verwijder de achterkant.



Houd de tabjes vast en spreid de billen, zodat u het verband goed over de wond en in de bilnaad kunt positioneren.



Druk het verband zachtjes, vanuit het midden naar buiten, aan op de huid.



Verwijder langzaam het blauwe aanbrengsysteem door vanuit het midden te beginnen naar de buitenkant.



Druk het verband nog eens na om het goed te laten aansluiten op de huid.

Beoordelen van de wond



"Lift" de klevende rand van het verband met twee handen los van de huid, te beginnen aan de bovenzijde.



Trek het verband voorzichtig naar achteren om de onderliggende benige uitsteeksels zichtbaar te maken.



Kleef het verband weer vast. Maak de randen van het verband glad en pas het zo nodig aan om vouwen te voorkomen.

Bijkomende gegevens

Het 3M™ Tegaderm™ Siliconenschuimverband met border mag tot zeven dagen blijven zitten. De frequentie van verbandwisseling wordt bepaald door het type wond, hoeveelheid exsudaat en de klinische situatie. Verbandwisseling dient te worden gedaan zodra het schuimkussen verzadigd is.

Bestelinformatie

	Informatie	Catalogus-nummer	Formaat	Verbanden/ doos	Dozen/ Omdoos
	Verband zonder border	90631	10×11 cm	10	4
	Verband zonder border	90632	15×15 cm	10	4
	Verband met border	90643	5×5 cm	10	6
	Verband met border	90640	7,5 x7,5 cm	10	6
	Verband met border	90641	10×10 cm	10	6
	Verband met border	90642	15×15 cm	10	4
	Hiel & contour	90646	16,5×16,5 cm	5	4
	Klein sacraal	90647	15×17 cm	10	4
	Groot sacraal	90648	18,5×22 cm	5	4

Het 3M™ Tegaderm™ siliconenschuimverband is voorzien van de 3M innovatieve kleeftechnologie. Het biedt een significant langere draagtijd dan het toonaangevende siliconenschuimverband van de wereldwijde concurrentie*.

*verband in de maten 10x10cm en 16,5x16,5cm, gebaseerd op in vivo-onderzoeken EM-13977 en EM-13978

GD Medical is de exclusieve distributeur van het 3M wondportfolio voor België en Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via +32(0)2 808 58 80 of +31(0)40 3031 099 of kijken op gdmedical.be en gdmedical.nl.



3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel. +31 15 782 2435

3M BELGIUM BVBA/SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel. +32 2722 5133

3M en Tegaderm zijn handelsmerken van 3M.
Gelieve te recycleren.
© 3M 2017. Alle rechten voorbehouden.
10/17

