

**3M****Tegaderm™**

Solutions pour le soin des plaies

Pansements en mousse siliconée 3M™ Tegaderm™

# Application sur le sacrum

1. Nettoyer la plaie et la peau environnante selon les directives internes de l'établissement.
2. Sécher correctement la région péri-lésionnelle.
3. Evaluer l'état de la plaie.
4. Choisir un pansement de la taille appropriée, de sorte que le revêtement en mousse soit plus grand que la surface de la plaie.

## Préparation et positionnement



Sortir le pansement de son emballage et le plier au milieu.



Tenir les deux languettes latérales et retirer le papier de protection blanc.



Tenir le pansement par les languettes latérales et le positionner plié, dans un premier temps au centre du pli anal, en maintenant les deux fesses écartées.



Modeler délicatement le pansement sur la peau depuis le pli fessier, en allant de l'intérieur vers l'extérieur.




Retirer le papier support bleu en commençant par le centre, horizontalement en direction du bord extérieur.



Modeler le pansement en exerçant une pression sur la zone de peau recouverte.

## Evaluation intermédiaire

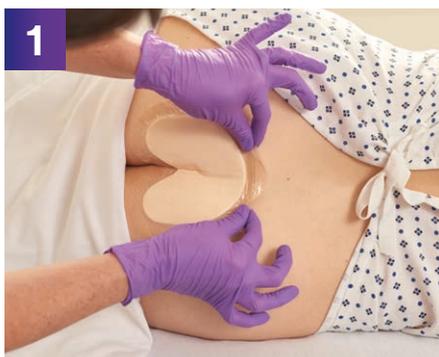

Décoller le bord adhésif du pansement depuis le bord supérieur, avec les deux mains.



Retirer délicatement le pansement pour pouvoir évaluer la peau des saillies osseuses.



Remettre en place le pansement. Lisser les bords et, le cas échéant, ajuster pour éliminer les plis.

## Informations supplémentaires

Produits emblématiques de la technologie d'adhésifs innovante 3M, les pansements en mousse siliconée 3M™ Tegaderm™ offrent une durée de port nettement plus longue que les pansements en mousse siliconée leaders d'autres fabricants<sup>2</sup>. Le pansement peut rester jusqu'à sept jours sur la plaie. Il est de plus particulièrement doux pour la peau et convient à toutes les quantités d'exsudats (plaies faiblement à fortement exsudatives). La fréquence du changement de pansement dépend du type de plaie, de la quantité d'exsudats et de la situation clinique.

## Informations de commande

	Reference	Informations	Dimensions	Pansements par boîte	Boîtes par UE <sup>1</sup>
	90631	Pansement sans bord adhésif	10 cm x 10,8 cm	10	4
	90632	Pansement sans bord adhésif	15 cm x 15 cm	10	4
	90643	Pansement avec bord adhésif	5 cm x 5 cm	10	6
	90640	Pansement avec bord adhésif	7,5 cm x 7,5 cm	10	6
	90641	Pansement avec bord adhésif	10 cm x 10 cm	10	6
	90642	Pansement avec bord adhésif	15 cm x 15 cm	10	4
	90646	Talon & coude, avec bord adhésif	16,5 cm x 16,5 cm	5	4
	90647	Sacré, petit avec bord adhésif	15 cm x 17 cm	10	4
	90648	Sacré, grand avec bord adhésif	18,5 cm x 22 cm	5	4

<sup>1</sup> Unité d'expédition

<sup>2</sup> Pansements 10 cm x 10 cm et 15 cm x 15 cm, sur la base des études in vivo EM-13977 et EM-13978

GD Medical est le distributeur exclusif du portefeuille de plaies 3M pour la Belgique et les Pays-Bas. Pour plus d'informations, veuillez contacter le +32 (0) 2808 58 80 ou visitez [gdmedical.be](http://gdmedical.be)

