

**De allereerste hybride
siliconen-acryl folie
voor gebruik met de
3M™ V.A.C.® Therapy**



Introductie van

Een innovatieve mix die de volgende stap in genezing ondersteunt

Ondersteunt de wondgenezing van uw patiënten die behandeld worden met 3M V.A.C. Therapy door de voordelen van zowel acryl kleefmiddel als zachte siliconen

3M™ V.A.C. Dermatac™ folie benut de specifieke combinatie van acryl en siliconen optimaal voor een ideale balans

- Acryl (in de cirkels) biedt een goede afdichting om wonden te beschermen op verschillende anatomische plaatsen
- Siliconen (buiten de cirkels) zorgen ervoor dat de folie te herpositioneren en op een zachte manier te verwijderen is

De mogelijkheid om V.A.C. Dermatac folie eenvoudig te herpositioneren bespaart de behandelaar aanzienlijk veel tijd en vermindert de hoeveelheid verspilde folie.

– Dr. Ralph J. Napolitano, Jr.,
DPM, CWSP, FACFAS, OrthoNeuro, Columbus, Ohio

V.A.C.
Dermatac folie
is op diverse
anatomische
plaatsen te
bevestigen



Foto ter beschikking gesteld door Ralph J. Napolitano, Jr., DPM, CWSP, FACFAS.



Foto ter beschikking gesteld door Michael M. Desvigne, MD, FACS, CWS, FACCS.



Foto ter beschikking gesteld door Marcus Speyrer, RN, CWS.

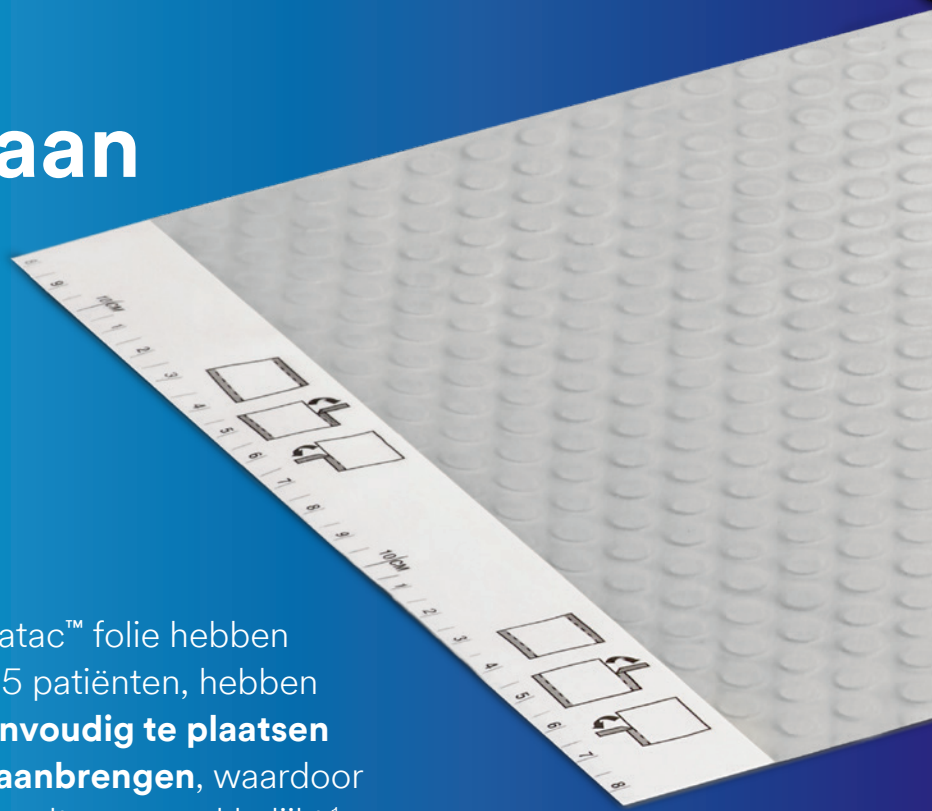


Foto ter beschikking gesteld door Michael M. Desvigne, MD, FACS, CWS, FACCS.

Gemakkelijk aan te brengen

past zich aan de
verschillende anatomische
gebieden aan en kan
worden geherpositioneerd

Behandelaars die 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie hebben gebruikt tijdens een casestudy met 5 patiënten, hebben opgemerkt dat de **hybride folie eenvoudig te plaatsen en aan te passen is bij het eerste aanbrengen**, waardoor het wisselen van wondverbanden wordt vergemakkelijkt.¹



Vormt zich naar de wond

- Past zich aan het lichaam aan en biedt een goede afdichting, zelfs op ongelijkmatige plaatsen
- Past zich aan de verschillende anatomische gebieden aan en kan tijdens het eerste aanbrengen worden geherpositioneerd

Bespaart behandelaars tijd

- Minder training omdat de folie eenvoudiger is aan te brengen



Vermindering van

33%

van de benodigde tijd voor het aanbrengen van wondverband vergeleken met standaard 3M™ V.A.C.® folie^{2,3}

Gebruiksvriendelijk te hanteren voor minder afval

- Eenvoudig los te maken wanneer de folie aan handschoenen of aan zichzelf kleeft
- Eenvoudig verwijderen van plooien en eenvoudig te herpositioneren tijdens het aanbrengen van wondverband zonder kleefkracht te verliezen

75%

van de behandelaars (18/24)⁴

constateerden dat er met V.A.C. Dermatac folie...

- MINDER folie nodig was bij verbandwissels
- MINDER behoefte was om extra bij te plakken
- GEEN behoefte was aan aanvullende producten om een goede afdichting te verkrijgen

1. Napolitano, R. Early Use of a Novel Acrylic-Silicone Hybrid Drape With Negative Pressure Wound Therapy in Lower Extremity Wounds. Poster gepresenteerd tijdens de SAWC Fall Meeting, Las Vegas, NV. Okt. 2019.

2. KCI. Summative User Interface Evaluation Report. 20 maart 2018.

3. ICG. DERMATAC Opportunity Assessment: Qualitative & Quantitative Market Research Final Report. 8 oktober 2015.

4. KCI. CLINICIAN SURVEYS. 17 mei 2019.

Sluit af voor goede genezing

zorgt voor een zeer doeltreffende afdichting voor bescherming van de wond

Met 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie kunt u vertrouwen op een sterke en effectieve afdichting, voor een optimale ondersteuning bij de genezing.

Een afdichting waar u op kunt vertrouwen

- Helpt de huid rondom de wond te beschermen
- Fungeert als barrière tegen verontreiniging van buitenaf

In een gesimuleerd wondmodel (n=5) werd bij V.A.C. Dermatac folie met een 3M™ V.A.C.® behandeling de afdichting bij 100% (5/5) van de voorbeelden behouden in vergelijking met Mölnlycke's Avance® folie met Safetac® technologie waarbij in 80% (4/5) van de voorbeelden de afdichting niet werd behouden.

	V.A.C. Dermatac folie	Andere folie op basis van siliconen
De afdichting werd behouden in een gesimuleerd wondmodel (n=5) ⁵	100%	20%

Een testopstelling voor de beoordeling van V.A.C. Dermatac folie en Mölnlycke's Avance® folie met Safetac® technologie (n = 30) waarbij de hechtingseigenschappen onder zowel natte als droge omstandigheden werden vergeleken.

	V.A.C. Dermatac folie	Andere folie op basis van siliconen
Toonden uitstekende hechting onder droge omstandigheden (n=30) ⁶	Ja (91,8%)	Nee (1,3%)
Toonden uitstekende hechting onder natte omstandigheden (n=30) ⁶	Ja (83,7%)	Nee (0%)

Vertrouw op een folie die 72 uur kan blijven zitten

- Zorgt voor een vochtige omgeving voor wondgenezing waardoor het genezingsproces wordt bevorderd

Geïnfekteerde wonden moeten zeer goed worden gecontroleerd en de wondverbanden moeten wellicht vaker worden verwisseld dan de wondverbanden van wonden die niet geïnfecteerd zijn. Dit is mede afhankelijk van factoren zoals de status van de wond en de behandelingsdoelen.

5. KCI. Evaluation of Seal Performance for KCI DERMATAC™ Drape and Mölnlycke Avance Safetac Drape on Simulated Wound Model. 20 nov. 2018.

6. Kharkar, P. Novel Drape with Hybrid Adhesives Has Improved Adhesion Properties. Poster gepresenteerd tijdens de SAWC Fall Meeting, Las Vegas, NV. Okt. 2019.

7. Desvigne, M. Initial Experiences Applying Negative Pressure Wound Therapy with a Novel Drape Containing an Acrylic and Silicone-based Adhesive. Poster gepresenteerd tijdens de SAWC Fall Meeting, Las Vegas, NV. Okt. 2019.

8. KCI. Wounds treated with DERMATAC™ dressings show evidence of re-epithelization in split and full thickness wound models. Sept. 2018.

Verwijderen op een vriendelijke manier

huidvriendelijke
verwijdering voor een
optimale genezing en
comfort voor de patiënt

De resultaten van een casestudy met 5 patiënten tonen aan dat het gebruik van **3M™ V.A.C. Dermatac™ folie de ervaring van de patiënt bij toepassing van NPWT kan verbeteren door de pijn tijdens het verwijderen van de folie te verminderen** en door te helpen irritatie van de huid rondom de wond te beperken.⁷

Het genezingsproces ondersteunen

- Zacht voor de huid en biedt bescherming van de huid rondom de wond
- In een studie bij 2 varkens werden oppervlakkige wonden op het dorsum gecreëerd en behandeld met V.A.C. Dermatac folie als onderdeel van het 3M™ V.A.C.® Therapy systeem waarbij de wonden gedurende 5 dagen werden behandeld. Aan het einde van de studie vertoonden de wonden tekenen van re-epithelisatie met of zonder wisseling van het wondverband op dag 3 (n=3 per groep, 4 groepen in totaal, 24 wonden)
- Wonden behandeld met V.A.C. Dermatac folie vertoonden tekenen van re-epithelisatie⁸

Comfort van de patiënt verbeteren

- 100% (n=17) van de patiënten gaven aan dat het verwijderen van V.A.C. Dermatac folie pijnloos was⁹

V.A.C. Dermatac folie is in Chili bij 17 patiënten gedurende 2 werken toegepast, waarbij de wondverbanden elke 48 tot 72 uur werden verwisseld. Bij het wisselen van het wondverband werd de patiënt gevraagd hoe het verwijderen van V.A.C. Dermatac folie voelde.

- Uit een retrospectieve beoordeling van 46 wisselingen van wondverband, waarbij de patiënt werd gevraagd naar de beoordeling van pijn bij het wisselen van het wondverband, bleek dat patiënten (n=27) een gemiddeld lagere pijnscore ($2,23 \pm 2,0$) hadden gemeld in vergelijking met een eerder vergelijkend onderzoek waarbij een gemiddelde score van 6,5 werd aangegeven bij toepassing van traditionele folie en foam (Fraccalvieri 2011)^{10,11}

9. Galarza, L. Initial clinical observations using a novel negative pressure wound therapy drape comprised of acrylic and silicone. Poster gepresenteerd tijdens de SAWC Spring Meeting, San Antonio, TX. Mei 2019.

10. Kharkar, P. Assessment of a Novel Drape containing Acrylic and Silicone-based Adhesives When Using Negative Pressure Wound Therapy. Poster gepresenteerd tijdens de SAWC Fall Meeting, Las Vegas, NV. Okt. 2019.

11. Fraccalvieri M, Ruka E, Bocchiotti MA, et al. Int Wound J. 2011;8:492-499.



3M Dermatac folie biedt innovatieve voordelen waar zowel behandelaars als patiënten van kunnen profiteren.

Gemakkelijk aan te brengen: past zich aan de verschillende anatomische gebieden aan en kan tijdens het eerste aanbrengen worden geherpositioneerd

Sluit af voor goede genezing zorgt voor een zeer doeltreffende afdichting voor negatieve druk

Verwijderen op een vriendelijke manier: huidvriendelijke verwijdering voor een optimale genezing en comfort voor de patiënt

Product	Artikelnummer	Bestelinformatie
3M™ V.A.C. Dermatac™ folie	DTAC10LDP	Doos met 10 stuks
3M™ V.A.C. Dermatac™ folie en V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - small	DTGF10PKS	Doos met 10 stuks - 1x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket
3M™ V.A.C. Dermatac™ folie en V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - small	DTGF05PKS	Doos met 5 stuks - 1x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket
3M™ V.A.C. Dermatac™ folie en V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - medium	DTGF10PKM	Doos met 10 stuks - 1x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket
3M™ V.A.C. Dermatac™ folie en V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - medium	DTGF05PKM	Doos met 5 stuks - 1x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket
3M™ V.A.C. Dermatac™ folie en V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - large	DTGF10PKL	Doos met 10 stuks - 2x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket
3M™ V.A.C. Dermatac™ folie en V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - large	DTGF05PKL	Doos met 5 stuks - 2x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket

Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van GD Medical;
customerservice@gdmedical.nl of customerservice@gdmedical.be



Distributed by:
GD Medical
 Hastelweg 224
 NL- 5652 CL Eindhoven
www.gdmedical.nl

KCI
 part of 3M

Zoals met elke casestudy mogen de resultaten en uitkomsten niet worden beschouwd als garantie voor soortgelijke resultaten. De individuele resultaten kunnen verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk van de omstandigheden en de toestand van de patiënt.

OPMERKING: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een behandelaar en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

© 2021 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik niet toegestaan. Gebruikt onder licentie in Canada. PRA-PM-BE-00057 (06/21) OMG17595

