

## Guide d'application du film adhésif 3M™ V.A.C. Dermatac™

Dans le cadre d'une étude clinique réalisée lors du pré-lancement commercial, 24 professionnels de santé<sup>1</sup> :

**85 %**  
des cliniciens (20/24)

ont trouvé que le film adhésif V.A.C. Dermatac était ...

- facile à utiliser
- maniable grâce à sa capacité de repositionnement
- rapide à appliquer et à retirer

**75 %**  
des cliniciens (18/24)

ont constaté qu'avec le film adhésif V.A.C. Dermatac, il y avait ...

- MOINS de film adhésif nécessaire aux changements de pansements
- MOINS de film nécessaire pour protéger la peau périlésionnelle
- AUCUN produit annexe nécessaire pour garantir l'étanchéité

Dans une étude interne relative à la facilité d'utilisation :

**86 %**  
des cliniciens (17/20)

ont préféré le film adhésif V.A.C. Dermatac au film adhésif standard de la TPN<sup>2</sup>

## Étapes d'application

Avant la TPN et avant chaque application de pansement, nettoyer soigneusement la plaie et la région périlésionnelle conformément à la prescription du médecin ou au protocole de l'établissement. Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi du film adhésif V.A.C. Dermatac.

**1** Couper la quantité souhaitée de film adhésif, d'une bande à l'autre, en laissant un bord d'au moins 5 cm.

- Cela facilite la mise en place à l'aide des bandes de manipulation.

**2** Appliquer le film adhésif V.A.C. Dermatac sans tension sur la zone de la plaie – ne pas l'étirer.


- Étirer le film risquerait de provoquer une tension lors de l'administration de la thérapie 3M™ V.A.C.®.

**3** Lisser les plis et repositionner le film si nécessaire.

- Le repositionnement avec les bandes de manipulation intégrées peut faciliter la manipulation. Le film adhésif peut être repositionné pendant 15 à 20 minutes après l'application initiale, même après le retrait des bandes de manipulation et le début de la thérapie V.A.C.®.
- Il est possible de repositionner plusieurs fois le film adhésif sans perte d'adhérence pendant l'application du pansement.

**4** Retirer les bandes de manipulation en tirant sur les bords perforés.

- Tenir le film adhésif appliqué avec une main tout en retirant les languettes.

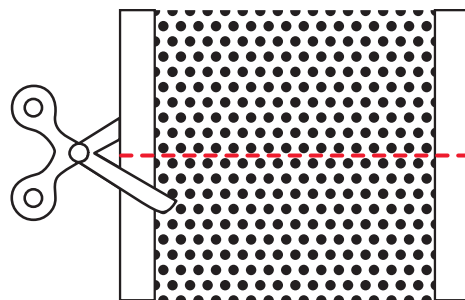

## Techniques d'application

- Pour que le film adhésif 3M™ V.A.C. Dermatac™ puisse épouser les contours d'une anatomie courbe (voir la première image), découper un triangle ou une fente et lisser appliquer le film autour des courbes.
- Pour l'exemple du talon (images 2 et 3), appliquer le film adhésif sur la zone courbe puis **découper des fentes**.
- **Replier chaque partie les unes sur les autres** et, si nécessaire, continuer à découper des fentes afin d'épouser au mieux les contours de l'anatomie courbe.
- La superposition de film adhésif sur les zones repliées garantit l'étanchéité.
- **Poursuivre l'initiation de la thérapie 3M™ V.A.C.®** en pinçant le film adhésif et en découpant un trou de 2,5 cm, soit environ la taille d'une pièce de 2 €, dans le film afin d'appliquer le tampon SensaT.R.A.C.™.
- **Activer** la thérapie V.A.C.®.



Produits	Références	Conditionnements
Film adhésif 3M™ Dermatac™	DTAC10LDP	Boîte de 10 films adhésifs 3M™ Dermatac™
Kit de pansement V.A.C.® Granufoam™ <b>petit modèle</b> avec le film adhésif 3M™ Dermatac™	DTGF10PKS	Boîte de 10 – 1 film adhésif 3M™ Dermatac™ par kit
Kit de pansement V.A.C.® Granufoam™ <b>moyen modèle</b> avec le film adhésif 3M™ Dermatac™	DTGF10PKM	Boîte de 10 – 1 film adhésif 3M™ Dermatac™ par kit
Kit de pansement V.A.C.® Granufoam™ <b>grand modèle</b> avec les films adhésifs 3M™ Dermatac™	DTGF10PKL	Boîte de 10 – 2 films adhésifs 3M™ Dermatac™ par kit

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local.

©3M Science. Au service de la Vie.

### Références

1. KCI. CLINICIAN SURVEYS. 17 MAI 2019.
2. KCI. HEOR-2019-004-DERMATAC.Time.Study.Econ.Model.

Kit de pansement V.A.C.® Granufoam™ avec le film adhésif 3M™ Dermatac™ : Dispositif Médical Classe IIb, CE 2797. Film adhésif 3M™ Dermatac™ : Dispositif Médical Classe IIa, CE 2797. KCI USA, Inc. Edition : Juin 2021.

**REMARQUE : il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité propres à ces produits et thérapies. Veuillez consulter un clinicien et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé.**

© 2021 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques mentionnées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation interdite sans autorisation. PRA-PM-BE-00062 (07/21). OMG175393.

# 3M

Distributed by:  
**GD Medical Belgium B.V.**  
 Rue Abbé Cuyppers 3  
 B-1040 Bruxelles  
 www.gdmedical.be

**KCI**  
 part of 3M

**GD**  
 medical