

Ht one ReadyGard™ Duo

Duo veiligheidspennaalden

Dubbele automatische bescherming

Veilig en eenvoudig insuline injecteren



Verpleegkundigen lopen risico op prikaccidenten



In een enquête uitgevoerd bij 634 Europese diabetesverpleegkundigen in 2012, rapporteerde bijna een derde van de deelnemers een prikaccident in relatie tot het geven van injecties aan mensen met diabetes in een ziekenhuisomgeving. Ongeveer 24% van de Amerikaanse verpleegkundigen gaven aan ooit een prikaccident te hebben gehad bij het geven van diabeteszorg gerelateerde injecties.

Prikaccidenten komen voor bij beide uiteinden van de naald wat daardoor een risico op besmetting kan zijn

Tijdens het injecteren met een insulinepen word je blootgesteld aan besmettingsrisico voor verschillende infectieziekten, zoals hepatitis A, B of C. Het is daarom belangrijk jezelf goed te beschermen en prikaccidenten te voorkomen.

Prikaccidenten treden op bij zowel de naald aan de kant waarmee de patiënt is geprikt, als ook de achterzijde van de naald. Het is daarom van groot belang dat er aan beide zijden van de pennaald bescherming wordt geboden.

Ht-One ReadyGard™ Duo met bescherming aan beide zijdes


Voor gebruik

De naald zelf wordt beschermd in een plastic omhulsel waardoor deze niet detecteerbaar is totdat deze klaar is voor gebruik.



Aan het uiteinde wordt de steriele naald blootgesteld om de insulinepen aan te sluiten.

Aan de kant van de patiënt wordt door de rode indicator bevestigd dat het veiligheidsmechanisme is geactiveerd.

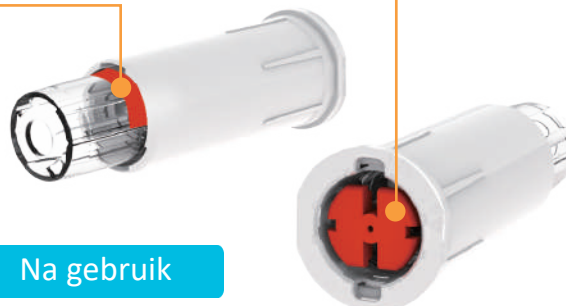


Na gebruik

Aan het uiteinde wordt de rode beschermcover zichtbaar na verwijdering van de naald uit de insulinepen.

Meer efficiency door minder stappen

Minder handelingen nodig voor toepassing, waardoor het gebruik snel en efficiënt is.

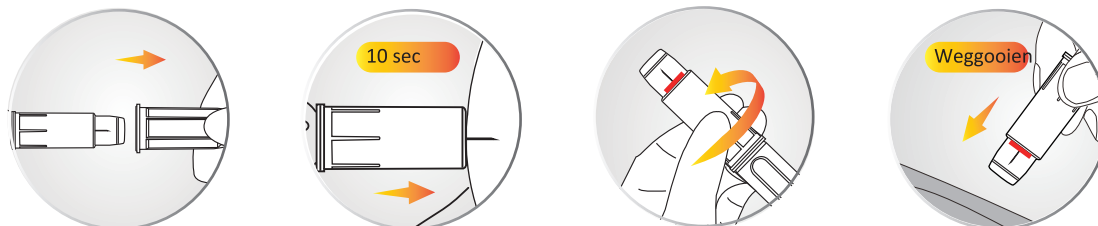


Comfortabel injecteren

De gepatenteerde structuur zorgt voor een betrouwbare en rechte injectie, waardoor de patiënt een comfortabelere en soepelere injectie-ervaring krijgt.

Controleerbare diepte

Een breder huidoppervlak verbetert niet alleen het comfort van de patiënt door minder druk tijdens de injectie, maar dit betekent ook dat de klinische impact (IM-injectie) van variabele injectiekrachten van de patiënt op de diepte van het injectiedepot worden geminimaliseerd.

Loodrechte injectie

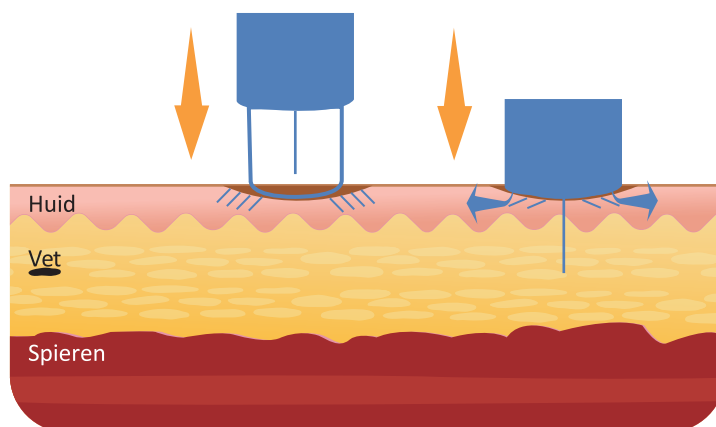

Compatibel

De Ht- One Readygard Duo-naald kan worden gebruikt met de meest gebruikte insulinepennen.

Bestelinformatie

Artikelcode	Kleur	Gauge	Naaldlengte	ZI- nummer	Verpakking
GD103699		31G	5 mm	17098718	100 stuks/ verpakking 8 verpakkingen/ omdoos



Voor meer informatie kunt u de QR code scannen of contact opnemen met de klantenservice van GD Medical via customerservice@gdmedical.nl of bellen met 040- 3031 099.