
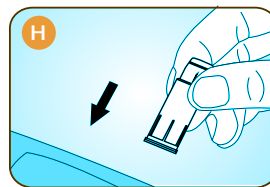
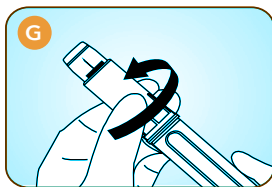
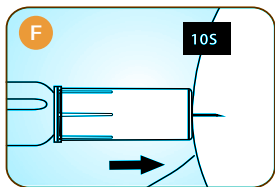
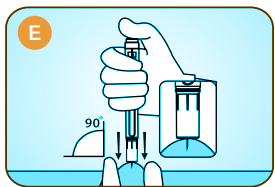
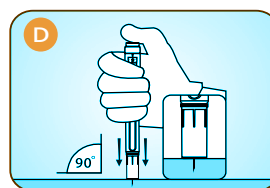
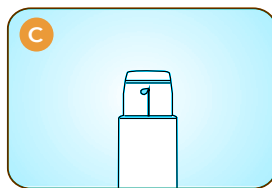
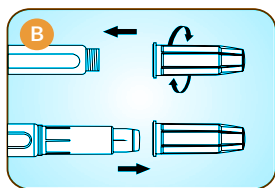


GEBRUIKSAANWIJZING Duo veiligheidspennaalden

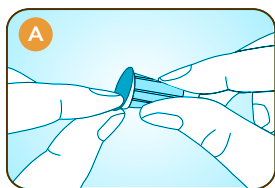

A.
Verwijder het verzegelpapier.

B.
Houd de buitenste dop vast, schroef de pennaald verticaal op de pen en trek de buitenste dop er recht af.

C.
Controleer altijd de stroom van de pennaald vóór elke injectie. Raadpleeg de procedure die wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van de insulinepen. Ontlucht de veiligheidspennaald met 2 eenheden insuline, totdat er zich een druppel op de naaldpunt vormt. Zo niet, herhaal totdat er vloeistof aan de naaldpunt verschijnt.

OPMERKING: Vloeistof kan terugvallen in de pennaald, waardoor er na injectie vloeistof op de huid kan achterblijven.

Stel de door uw behandelaar voorgeschreven dosis in volgens de gebruiksaanwijzing van de insulinepen. Raadpleeg uw behandelaar welke injectiemethode voor u het meest geschikt is.

D. LOODRECHTTECHNIEK ZONDER HUIDPLOOI

Houd de pen met één hand vast, in de handpalm. Uw duim mag niet op de knop van de insulinepen zitten. Steek de pennaald RECHT in de huid in één continue beweging, totdat het hoofdgedeelte de huid raakt. Oefen constante druk uit op de huid (niet van hand wisselen).

E. LOODRECHTTECHNIEK MET HUIDPLOOI

Om injectie in de spier te voorkomen (bijv. jonge kinderen, laag lichaamsvet), of om een stevig huidoppervlak te garanderen voor een succesvolle injectie, adviseren wij een huidplooi van 2,5 cm op te tillen (knijp omhoog).

Houd de pen met één hand vast, in de handpalm. Uw duim mag niet op de knop van de insulinepen zitten. Steek de pennaald recht in de huid in één continue beweging totdat het hoofdgedeelte de huid raakt. Oefen constante druk uit (niet van hand wisselen).

F.
Injecteer uw dosis volgens de gebruiksaanwijzing van de insulinepen en instructie van uw behandelaar. Laat de naald na de injectie 10 seconden in de huid om de nauwkeurigheid te garanderen.

G.
Trek de pennaald uit de huid zodra de volledige dosis is toegediend. De rode indicator geeft aan dat de beschermende cover automatisch is geactiveerd. Houd het hoofdgedeelte van de pennaald vast en schroef de pennaald eraf. Beide uiteinden van de pennaald worden nu beschermd door een beschermende cover. Plaats uw vingers NIET op beide uiteinden van de pennaaldbescherms.

H.
Gooi de gebruikte veiligheidspennaald weg in een naaldencontainer in overeenstemming met de lokale voorschriften.

