

Contra-indicaties

- Maligne tumoren
- Blootliggende bloedvaten, onbeschermde vaatstructuren
- Ogen, neus en oren
- Blootliggende zenuwen/neurovasculaire bundels
- Complexe en/ of zwaar gecontamineerde wonden
- Patiënten met HIV, hepatitis C of andere overdraagbare ziektes/infecties

Waarschuwing: in de onderstaande situaties is er een verhoogd risico bij gebruik van het systeem:


- Patiënten met hoge(re) bloedsneiging en arteriele ulcera
- Patiënten met geïnfecteerde wonden

→ In deze situaties moet de arts beslissen of en op welke manier de behandeling moet worden gegeven.


1. Inschakelen debritom⁺




2. Installeren van de debritom⁺

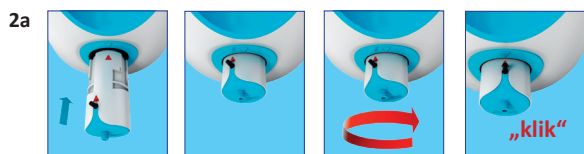


Plaats de pomp volgens de afbeelding tot deze niet verder kan en draai deze vervolgens met klok mee tot deze vastklikt.

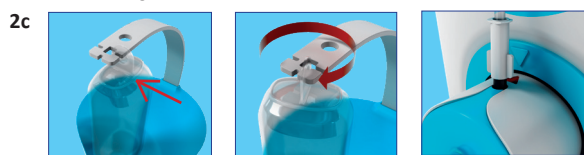

Bevestig vloeistof aan hanger, sluit de connectieslang aan op de pomp

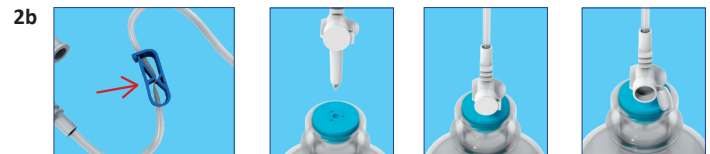

Connectieslang: sluit de klem, plaats de spike in de vloeistof en open ontluchting

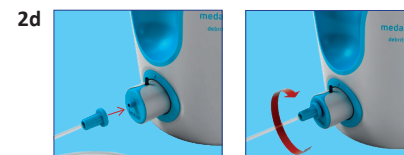

Draai de **connector van het handstuk** op de pomp en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.



Open de **klem**

3. Testen van de vloeistofstroom

Gebruik het voetpedaal om de vloeistofstroom te activeren;

- Test de straal visueel (vlak of punt)
- U kunt de intensiteit van de straal op uw hand testen – begin met een afstand van 25 cm (ongeveer 2x de lengte van het handstuk). Beweeg de straal vanaf de wondrand iets heen en weer.
- Als iets niet werkt, vervang dan het handstuk



4. Optimale toepassing

Intensiteitsniveau bij START is voor elk handstuk : **Level 4** (Level 1-5/laag/ hoog)

debritom⁺ handpiece standard jet
Aanbevolen werkafstand

REF 2000.0003
8 - 15cm


debritom⁺ handpiece flat jet narrow
Aanbevolen werkafstand

REF 2000.0004
4 - 10cm

debritom⁺ handpiece flat jet wide
Aanbevolen werkafstand

REF 2000.0005
3 - 8cm

Behandelingshoek: 3 – 45 graden t.o.v. het wondoppervlak
TIP flatjet: de flat jet kan het beste als een spatel over de wond worden toegepast.

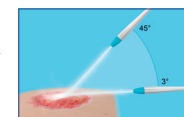

5. Intensiteitsniveau



Intensiteit +
Intensiteit -
Power button

6. Nieuwe patiënt / einde behandeling



Schakel debritom⁺ UIT

6a Nieuwe patiënt - One day (eendaagse) pomp



Sluit klem



Verwijder handstuk en gooi weg



Bevestig Luer dopje

Voor nieuwe patiënten
Volg stappen
vanaf 2d

6b Einde behandeling (One day pomp en single use pomp)



Verwijder connectieslang, pomp en handstuk en gooi gezamenlijk weg



debritom⁺ Verkorte instructie

medaxis

7. Foutmeldingen

NB: De aan/standby-knop op de unkit licht rood op als er een foutmelding optreedt. Met deze knop kan de storing na herstel worden bevestigd.



Batterij voetpedaal bijna leeg

Oplossing: Vervang batterijen (Batterij type 2 x LR03/AAA, hoofdstuk 11)



Pomp te lang in gebruik

Oplossing: vervang pomp (one day of single use)



Handstuk te lang in gebruik of wordt gebruikt met andere single use pomp

Oplossing: vervang handstuk



Handstuk niet gevonden of handstuk wordt niet herkend

Oplossing: Vervang handstuk. Als het probleem niet kan worden verholpen, neem dan gelijk contact op met GD Medical.



Spuitmond geblokkeerd of motor oververhit

Oplossing: Vervang zo nodig het handstuk of pomp. Als het probleem niet kan worden verholpen, neem dan gelijk contact op met GD Medical.



Pomp niet goed aangesloten

Oplossing: Verwijder de pomp en plaats opnieuw, of vervang de pomp.



Systeemfout

Oplossing: Neem contact op met GD Medical.



Geen voetpedaal gedetecteerd

Oplossing: Druk het voetpedaal in. Als deze niet kan worden gedetecteerd, onderhoud/ reparatie. (zie hoofdstuk 11)

8. Symbolen op de debritom⁺ display



Bluetooth-apparaat zoeken om te koppelen

Als u bij debritom⁺ de aan/standby- en ,+'-knoppen > 1 s ingedrukt houdt, wordt het symbool "Zoeken naar Bluetooth-apparaat" weergegeven voor het koppelen van een nieuwe of vervanging van het aan/uit voetpedaal.



Bluetooth-signaal van aan/uit-voetpedaal gedetecteerd - bevestigen

Zodra debritom⁺ het Bluetooth-signaal van het aan/uit voetpedaal heeft gedetecteerd, verschijnt dit symbool op het display.



debritom⁺ verbonden met aan/uit voetpedaal

Dit symbool verschijnt op het display als het aan/uit voetpedaal is verbonden met de debritom⁺.



Intensiteitsniveaus

De intensiteitsniveaus kunnen worden aangepast tussen 1 - 5. (1 = laagste/ 5 hoogste)