


Glnovoshare- eerste keer inloggen

- Ga naar de site www.glnovoshare.com
- Selecteer – indien niet automatisch – rechtsboven de Nederlandse taal.
- Er staan rechts twee inlogtabs. Een als Gebruiker en een als Zorgverlener.
- Selecteer **Zorgverlener** (geselecteerde tab moet wit zijn).
- Klik vervolgens op **Wachtwoord vergeten**.

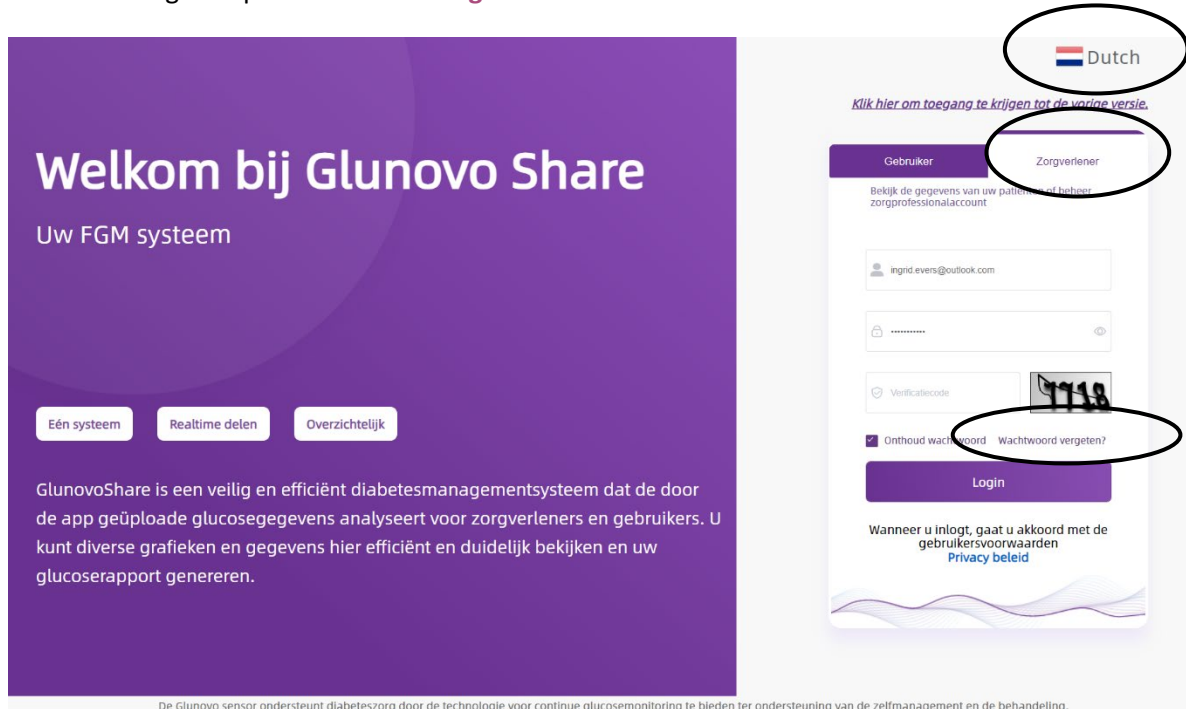

- U komt dan in onderstaand pop- up scherm

Wachtwoord vergeten ×

* Gebruikersnaam Verstuur email

* Email verificatiecode

* Nieuw wachtwoord

* Bevestig wachtwoord

Bevestigen Annuleren

- Vul daar bij Gebruikersnaam uw emailadres in.
- Daarna klikt u op **Verstuur email**
- U ontvangt een email van Infinovo met daarin een Verificatiecode.
- Vul verificatiecode in betreffende veld in.
- Maak een eigen wachtwoord aan en bevestig deze.
- Uw account is aangemaakt.

Voor alle opvolgende keren inloggen, hoeft u alleen maar uw email, eigen wachtwoord en de verificatiecode in het inlogscherm in te vullen.

Toevoegen van een patiënt/ gebruiker

Als u bent ingelogd, ziet u een overzicht van de patiënten die u met de Glunovo Flash in behandeling heeft.

Een nieuwe patiënt/ gebruiker toevoegen gaat als volgt:


- Vul rechtsboven het emailadres van de patiënt in. Dit moet hetzelfde emailadres zijn die de patiënt gebruikt voor zijn/ haar account in de Glunovo E2s app.

The screenshot shows the Glunovo Share interface. At the top left is the Glunovo Share logo. At the top right, it says 'Hallo, I.M. Evers' and 'Dutch'. Below the header, there is a search bar labeled 'Zoek patiënt' and a 'Zoek' button. Below the search bar, there is a text input field labeled 'Vul het emailadres van de patiënt in:' with the email address 'i.ee.john.doe@gmail.com' entered. To the right of the input field is a 'Voeg patiënt toe' button. Below this is a table with the following columns: 'Email adres', 'Voornaam', 'Achternaam', 'Status toestemming', 'Datum aanvraag', and 'Gegevens delen'. The table contains two rows of patient data. The first row has the email address 'marco.verhofstadt@gmail.com', first name 'Marco', last name 'Verhofstadt', status 'Akkoord', and date '2023-12-27 13:46:19'. The second row has the email address 'geerdien.prinsen@gmail.com', first name 'Geerdien', last name 'Prinsen', status 'Akkoord', and date '2023-05-08 14:07:14'. In the 'Gegevens delen' column, there are two rows of icons: a green eye icon and an orange eye icon with a slash through it. At the bottom of the table, it says 'Totaal 2' and '10/pagina'. There are also navigation arrows and a 'Ga naar' field with the number '1'.

- Klik vervolgens op **Voeg patiënt toe**.
- De betreffende patiënt krijgt een melding op de Glunovoshare website met de vraag om wel of geen toestemming te geven inzage in zijn/ haar gegevens te geven.
- Zolang er nog geen toestemming is verleend, ziet u in uw overzicht bij Status **In afwachting** staan.
- Zodra er bij Status **Akkoord** staat, heeft u toegang tot de gegevens.
- Door op het **groene 'oogje'** te klikken, komt u in het account van de patiënt.


Wat ziet u in het account van de patiënt/ gebruiker

- Via alle tabs bovenin, kunt u selecteren welke gegevens u wilt inzien/ analyseren.

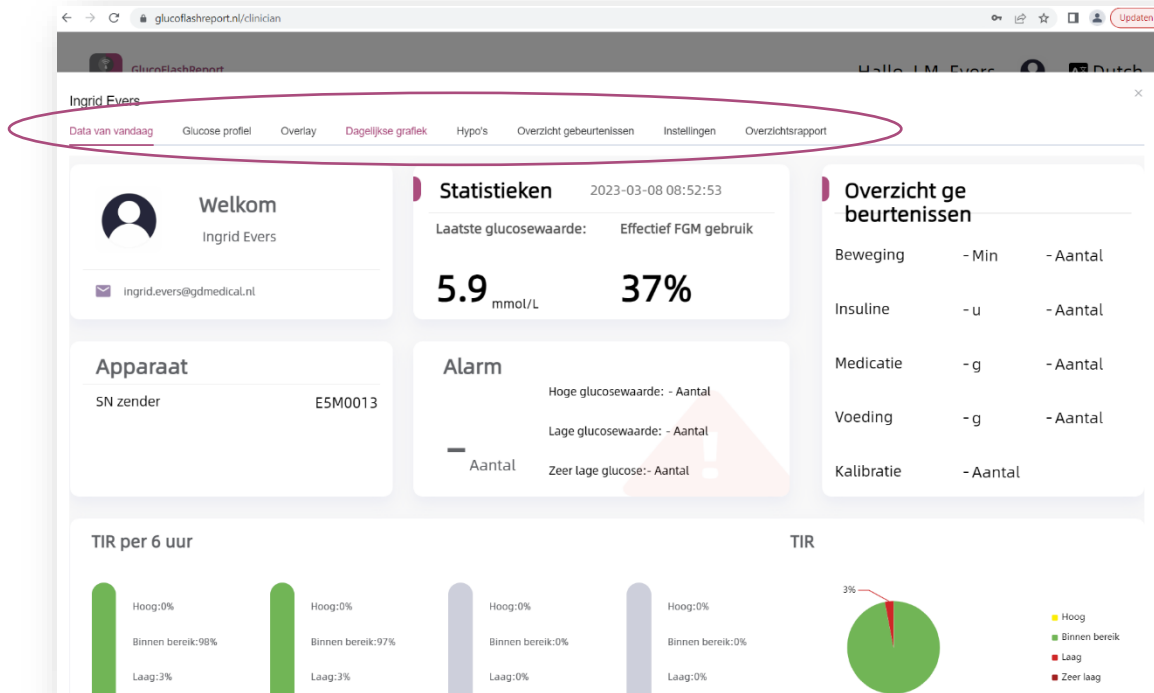



Stoppen met inzage in account patiënt/ gebruiker

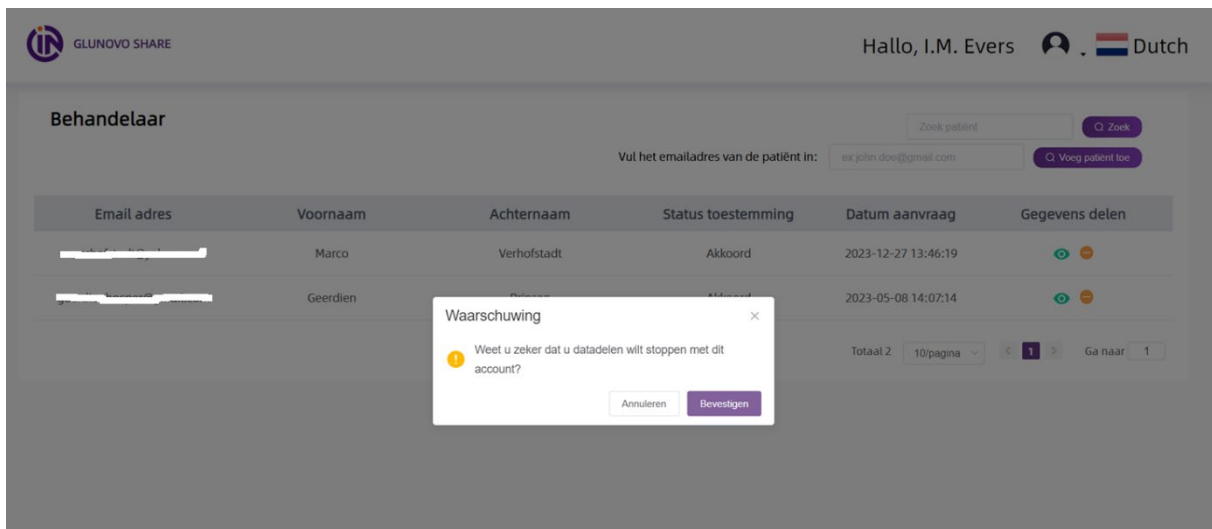- Als u wilt stoppen met het hebben van inzage in de gegevens van een patiënt, dan selecteert u het **oranje bolletje** naast het groene oogje.
- Vervolgens bevestigen dat u het delen van data wilt stoppen (of annuleren selecteren als u de patiënt wilt blijven volgen).
- De patiënt/ gebruiker kan vanuit het eigen account ook altijd het delen van data stoppen.



The screenshot shows the GLUNOVO SHARE interface. At the top left is the logo and 'GLUNOVO SHARE'. At the top right, it says 'Hallo, I.M. Evers' and 'Dutch'. Below this is the 'Behandelaar' section with search filters. A table lists patient data with columns for 'Email adres', 'Voornaam', 'Achternaam', 'Status toestemming', 'Datum aanvraag', and 'Gegevens delen'. A modal dialog box titled 'Waarschuwing' is open, asking 'Weet u zeker dat u datadelen wilt stoppen met dit account?' with 'Annuleren' and 'Bevestigen' buttons.

Email adres	Voornaam	Achternaam	Status toestemming	Datum aanvraag	Gegevens delen
[redacted]	Marco	Verhofstadt	Akkoord	2023-12-27 13:46:19	 
[redacted]	Geerdien	[redacted]	[redacted]	2023-05-08 14:07:14	