

VERKORTE INSTRUCTIE GLUNOVO FLASH

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

NB: indien u gebruik maakt van Glunovo Flash FGM graag deze instructie gebruiken

Glunovo® Flash
Flash Glucose Monitoring System

1. Download de GlucoFlash app uit de AppStore of Google Play.



2. Instellingen mobiele telefoon

- Schakel Bluetooth in.
- Geef toestemming voor meldingen.
- Android; geef toestemming voor altijd toestaan locatie (niet bij alleen gebruik app).
- Android: geef toestemming gebruik geheugen.
- Zorg dat de app op de achtergrond altijd draait.
- Schakel de app opnieuw in als u uw telefoon opnieuw opstart.
- Activeer niet de batterij-besparingsfunctie of niet- storen functie.


3. Account aanmaken

In de app maakt u een account aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Met dezelfde email/wachtwoordcombinatie logt u ook in op glucoflashreport.nl waar uitgebreide trends en rapportages staan en u gegevens kunt delen.



4. Instellen meeteenheid en drempelwaarden

Selecteer de meeteenheid van uw land (in NL mmol/L).
Stel uw drempelwaarde hoog en laag in.
Selecteer alarm aan of uit) en de alarmmelding (geluid en/ of trillen).

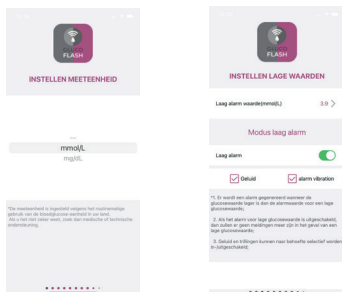

5. Kies de sensorplaats

Selecteer een plaats in het buikgebied.
Reinig desgewenst de huid met een alcoholdoekje en laat goed drogen.




Plaats sensor 5cm buiten de navel en 5cm buiten de insuline-injectieplaats.

Product niet gebruiken als de verpakking over datum of beschadigd is.


6. Verwijder de bescherm laagjes

Verwijder voorzichtig de bescherm laagjes van de sensorpleister en raak het kleefgedeelte niet aan.

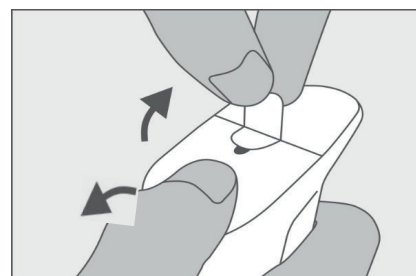

7. Ontgrendelen applicator


Schuif het oranje knopje van de applicator richting het 'slot open' symbool om deze te ontgrendelen.

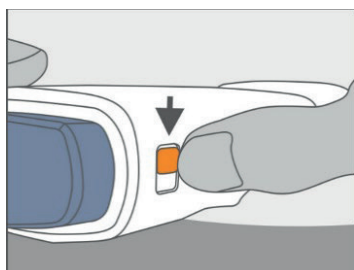

8. Plaatsen applicator


Plaats de applicator met de sensorpleister op de buik.

Duw stevig aan zodat het kleefgedeelte goed vastzit.

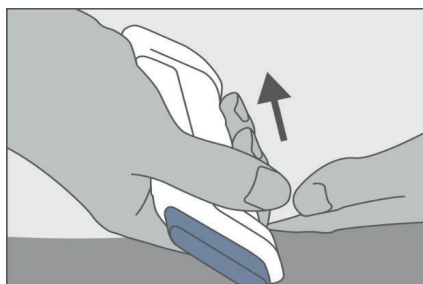

9. Inbrengen sensor

Druk op de bovenste knop en de sensor wordt automatisch geplaatst. Trek voorzichtig de applicator omhoog en houd de sensor hierbij vast. Druk de randen van de sensorpleister goed aan.

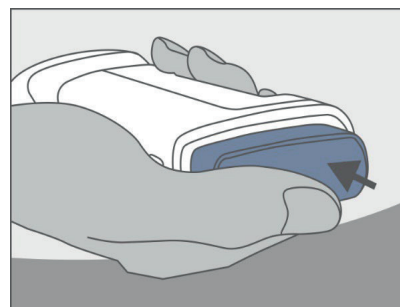


10. Plaatsen zender

De Glunovo zender heeft een puntige zijde en een zijde met 2 inkepingen.


Plaats de zender schuin met de puntige zijde eerst in de sensor. Daarna de andere zijde naar beneden drukken. Druk eerst goed aan bij inkeping links voor klik 1 en druk vervolgens aan bij inkeping rechts voor klik 2.

Pak voor een goede grip de zijanten van de sensor vast.

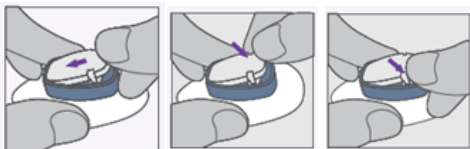

11. Koppelen zender

Scan vanuit de app de UDI code van de zender verpakking. **Uw zender wordt automatisch gekoppeld.** (Geef de app toegang tot de camera)

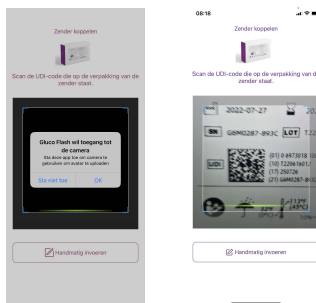


Bewaar de zender verpakking of maak een foto van het label, mocht handmatig invoeren van de codes nodig zijn of bij een product probleem.

12. Koppelen sensor

Scan nu de UDI code van de sensor verpakking die u heeft gebruikt. Voer de 4 cijfers van de fabrieks-kalibratie code in (Sensor Code). Deze staat ook op de verpakking van de sensor.

Klik op START FGM.

NIET fabrieks-kalibratiecode overslaan selecteren. Dit heeft tot gevolg dat u de sensor dagelijks zelf moet kalibreren.

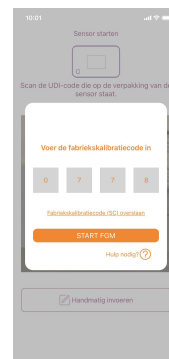

13. Initialisatietijd

Na START FGM begint automatisch de initialisatie of opwarmtijd. Deze duurt 2 uur (120 minuten).

Na deze 2 uur ziet u - na drukken op Flash- knop - uw glucose-waarden in de app.




14. GlucoFlash app menu's

In het Homescherm ziet u de meest recente waarde met een trendpijl. In de app kunt u o.a. een kalibratiewaarde invoeren (indien nodig), rapporten bekijken, gebeurtenissen invoeren en instellingen van alarmen aanpassen.



15. Einde sensor periode; vervangen/ verwijderen sensor


Na 14 dagen is de sensorperiode voorbij. U krijgt van te voren een melding via de app om deze te vervangen. Ga naar Instellingen → Apparaatinformatie → Vervang huidige sensor.

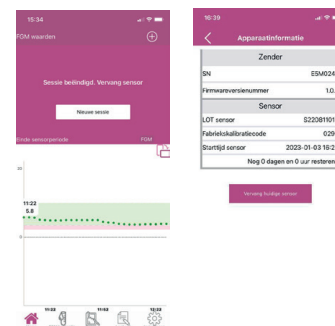

16. Verwijderen sensor

Verwijder de sensor tegelijk met de zender.


Zender niet weggooien! Deze kan 3 jaar gebruikt worden.

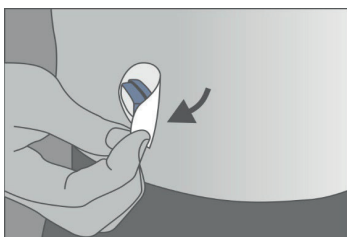

17. Zender uit sensor halen

Gebruik het oranje sleuteltje (uit verpakking zender) en duw de puntjes van het sleuteltje in de uitsparingen van de zender. Trek met het sleuteltje de zender omhoog uit de sensor.

Sensor kan bij huishoudelijk afval.

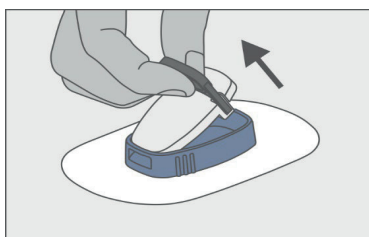

18. Starten nieuwe sensor

Volg de stappen in de app en/of ga terug naar stap 5 van deze Verkorte handleiding.

Ga naar www.glunovoflash.nl voor alle informatie, handleidingen of de instructie video.