

Zo past het goed

3M™ wegwerpmaskers zijn slechts effectief als er een goede afdichting is tussen de randen van het masker en uw gezicht. Zodra deze afdichting verbreekt, bestaat er geen goede bescherming meer. Verontreinigde lucht kan dan langs die gecreëerde openingen naar binnen lekken.

Volg deze draaginstructies bij het opzetten van een 3M™ Aura™ Deeltjesmasker 1800+-Serie.



Zorg ervoor dat uw gezicht glad geschoren is. Ademhalingsmaskers moeten niet gedragen worden met stoppelbaardjes, baarden of andere gezichtsbehaaring op de plaats van afdichting. Dit kan een goede afsluiting verhinderen.

Uw ademhalingsmasker correct dragen:

Druk de neusbeugel rondom de wangen en neus aan voor een goede afdichting. Knijp de neusklem niet met maar één hand vast. Anders past het masker mogelijk niet goed.

Zorg ervoor dat de panelen volledig zijn uitgevouwen.

Het ademhalingsmasker moet correct op uw gezicht en hoofd worden aangebracht.



Plaats de bovenste band op de kruin van het hoofd. De band mag niet gedraaid zijn.

De onderste band moet onder de oren worden geplaatst. De band mag niet gedraaid zijn.

Bind lang haar naar achteren vast. Verwijder sieraden, zodat deze de afdichting op het gezicht niet belemmeren.

1 en 2



- 1 Houd de binnenkant naar boven gericht en gebruik het lipje om de bovenste en onderste panelen van het ademhalingsmasker te scheiden, zodat een komvorm ontstaat. Plooi de neusklem lichtjes vanuit het midden.
- 2 Zorg ervoor dat beide panelen volledig opgevouwen zijn.

3a



- 3a Neem het masker in één hand met de open zijde naar uw gezicht gericht.

3b



- 3b Neem beide banden in uw andere hand. Houd het ademhalingsmasker onder uw kin, met het neusstuk naar boven, en trek de banden over uw hoofd.

4



- 4 Plaats de bovenste band op de kruin van uw hoofd en de onderste band onder uw oren. De banden mogen niet gedraaid zijn. Pas de boven- en onderpanelen aan voor een comfortabele pasvorm. Let er op dat de panelen en het lipje niet invouwen.

5



- 5 Vorm de neusbeugel met beide handen rondom de neus. Dit zorgt voor een nauwe aansluiting.
- ⚠ Mogelijk past het ademhalingsmasker minder goed als u de neusklem met één hand dichtknijpt. Gebruik daarom twee handen.

6



- 6 De pasvorm controleren: bedek de voorkant van het masker met beide handen. Zorg ervoor dat het goed blijft zitten.

Bij gebruik van een **ademhalingsmasker** zonder ventiel: **krachtig uitademen**. Bij gebruik van een **ademhalingsmasker met ventiel**: **krachtig inademen**.

Als er lucht rond de neus lekt, pas dan de neusbeugel aan om lekkage uit te sluiten. Controleer dan weer of de pasvorm goed is. Als er lucht via de randen van het masker weglekt, moeten de hoofdbanden aan de zijkant van uw hoofd worden aangepast om de lekkage te stoppen. Controleer dan de pasvorm weer.

⚠ Ga niet de gevarenzone in als het masker niet goed zit. Raadpleeg uw leidinggevende.

3M.nl/HealthcareSafety