
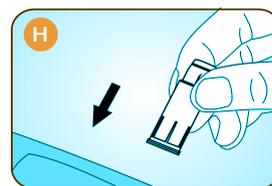
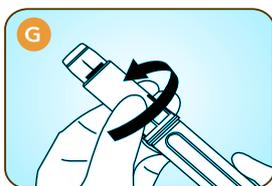
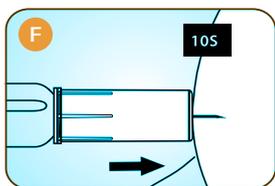
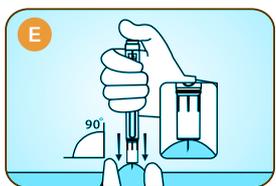
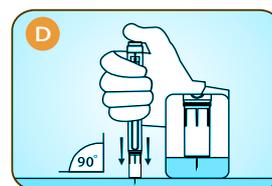
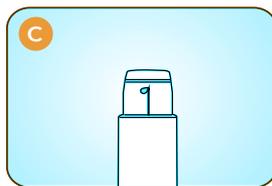
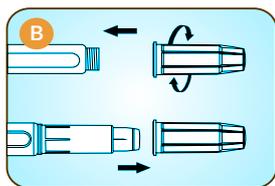


INSTRUCTIONS D'UTILISATION aiguilles de sécurité Duo

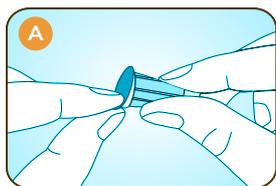

A.

Retirez le papier d'emballage.

B.

Tenez le capuchon extérieur, vissez l'aiguille verticalement sur le stylo et retirez le capuchon extérieur en tirant droit.

C.

Vérifiez le débit de l'aiguille du stylo avant chaque injection. Reportez-vous à la procédure décrite dans le mode d'emploi du stylo à insuline.

Purgez l'aiguille de sécurité avec 2 unités d'insuline jusqu'à ce qu'une goutte se forme à l'extrémité de l'aiguille. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération jusqu'à ce que du liquide apparaisse à l'extrémité de l'aiguille.

REMARQUE : le liquide peut refluer dans l'aiguille, ce qui peut entraîner la présence de liquide sur la peau après l'injection.

Réglez la dose prescrite par votre médecin conformément au mode d'emploi du stylo à insuline. Demandez conseil à votre médecin pour savoir quelle méthode d'injection vous convient le mieux.

D. TECHNIQUE À LA PLUMÉE SANS PLS CUTANÉS

Tenez le stylo d'une seule main, dans la paume de votre main. Votre pouce ne doit pas être sur le bouton du stylo à insuline. Insérez l'aiguille du stylo **perpendiculairement** dans la peau d'un seul mouvement continu, jusqu'à ce que la partie supérieure touche la peau. Exercez une pression constante sur la peau (ne changez pas de main).

E. TECHNIQUE À LA PLUMÉE AVEC PLI DE PEAU

Pour éviter toute injection dans le muscle (par exemple chez les jeunes enfants, qui ont peu de graisse corporelle) ou pour garantir une surface cutanée ferme permettant une injection réussie, nous recommandons de soulever un pli cutané de 2,5 cm (en pinçant vers le haut).

Tenez le stylo, dans la paume de votre main. Votre pouce ne doit pas être sur le bouton du stylo à insuline. Insérez l'aiguille du stylo dans la peau d'un seul mouvement continu jusqu'à ce que la tête touche la peau. Exercez une pression constante (ne changez pas de main).

F.

Injectez votre dose conformément au mode d'emploi du stylo à insuline et aux instructions de votre médecin. Après l'injection, laissez l'aiguille dans la peau pendant 10 secondes afin de garantir la précision.

G.

Retirez l'aiguille de la peau dès que la dose complète a été administrée. L'indicateur rouge indique que le capuchon de protection s'est automatiquement activé.

Tenez la partie supérieure de l'aiguille du stylo et dévissez-la. Les deux extrémités de l'aiguille sont désormais protégées par un capuchon protecteur.

NE placez PAS vos doigts sur les deux extrémités des capuchons protecteurs de l'aiguille.

H.

Jetez l'aiguille de sécurité usagée dans un conteneur à aiguilles conformément à la réglementation locale.