


1. Choisir l'emplacement du capteur

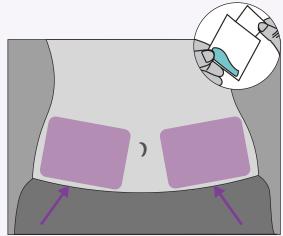

Choisir un site dans la région abdominale.


Si vous le souhaitez, nettoyez la peau avec une lingette imbibée d'alcool et laissez-la sécher complètement.

- 5 cm à l'extérieur du nombril
- 5 cm à l'extérieur du point d'injection de l'insuline
- Éviter la peau grasse, les vêtements serrés (ceinture), les tatouages, les cicatrices.
- Couper/raser les zones à forte pilosité

Ne pas utiliser le produit si l'emballage est périmé ou endommagé.


Attacher le capteur

2. Retirer les couches de protection

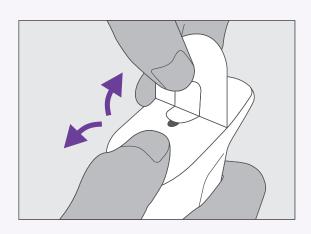

Tenez le capteur d'un côté et retirez la couche protectrice, puis retirez avec précaution l'autre partie de la couche protectrice.

3. Placer le capteur

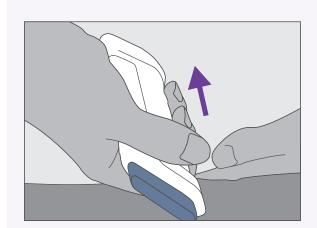


Placez le capteur horizontalement sur l'abdomen et appuyez fermement l'applicateur sur la peau.

Attacher le capteur

Attacher le capteur

4. Déverrouiller l'applicateur

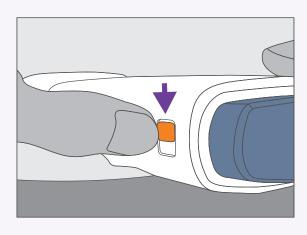









Tenir l'applicateur immobile et faire glisser le bouton de verrouillage de sécurité de "verrouillé" à "déverrouillé".

Attacher le capteur

5. Appuyer sur le bouton de l'applicateur

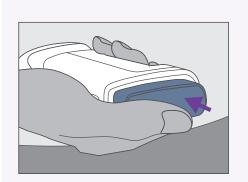


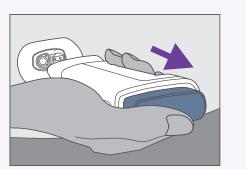

- Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l'applicateur.
- Vous entendrez un clic clair lorsque le bouton est enfoncé.
- Retirez ensuite l'applicateur du sens d'insertion.

Attacher le capteur

6. Appuyer sur le patch du capteur

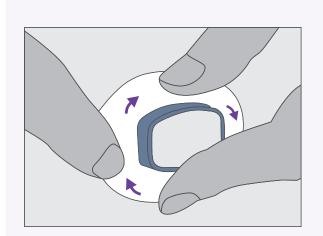

Appuyez sur le capteur et frottez autour du patch du capteur pour qu'il soit fermement fixé à la peau.

7. Connecter l'émetteur


- Si nécessaire, nettoyez le dessous de l'émetteur avec un chiffon imbibé d'alcool et attendez qu'il soit complètement sec.
- L'émetteur a une partie pointue




et une partie avec deux encoches.

Glunevo



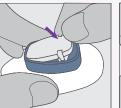

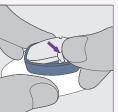


• Insérez le côté pointu dans la base du capteur. Appuyez ensuite sur une encoche dans la base du capteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic clair, puis appuyez sur l'autre encoche jusqu'à ce que vous entendiez un second clic.


Attacher le capteur

Attacher le capteur

1. Retirer le capteur et l'émetteur

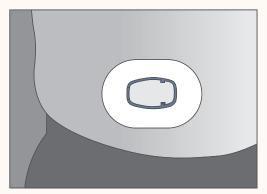


Retirez le capteur et le transmetteur de la peau en même temps.

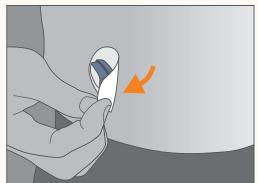

Détachez doucement le bord du patch du capteur de la peau et retirez le capteur d'un côté à l'autre.

Retirer le capteur

2. Supprimer l'émetteur

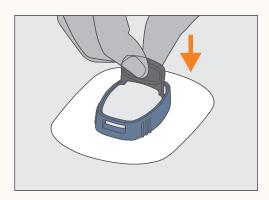

Prenez la clé orange et insérez-la dans le capteur comme indiqué ici.



Ensuite, tirez-la vers le haut pour retirer l'émetteur du capteur.



L'émetteur est réutilisable.

Conservez-le soigneusement.

Retirer le capteur

3. Nettoyage & élimination









Nettoyez l'émetteur avec une lingette imbibée d'alcool et rangez-le dans son emballage lorsqu'il n'est pas utilisé, ou appliquez-le sur un nouveau capteur.







Conservez la clé orange dans l'emballage de l'émetteur.








Suivre les directives locales pour la mise au rebut du capteur.

Retirer le capteur

Scan QR Code

pour obtenir le manuel complet

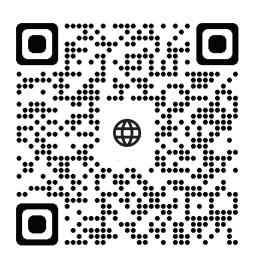

infinovo.com



Informations importantes avant d'utiliser le produit

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du produit avant de l'utiliser. Les instructions contiennent des informations importantes, notamment des indications, des contre-indications et des avertissements.

Pour obtenir des instructions, visitez le site https://infinovo.com/en/ Downloads ou contactez votre distributeur local.

	Infinovo Medical Co., Ltd. 3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400, Jiangsu, China
EC REP	Llins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany

TEL: 0049 175 4870 819







