



Instructie installeren & aanmaken account Glunovo app

- Download de Glunovo Pro (zonder flash- handeling) of Glunovo E2s app (met flash-handeling).
- Beide apps kunt u vinden in de Google Play Store (Android) of App Store (iPhone).
 - U herkent de Glunovo Pro app aan dit logo: 
 - U herkent de Glunovo E2s app aan dit logo: 
- Geef toestemming voor het ontvangen van berichten/ meldingen
- Geef toegang tot Bluetooth
- Voor Android: geef toestemming voor altijd toestaan locatie (niet toestemming bij alleen gebruik van app)
- Zoek en selecteer het land
 - **TIP:** typ in **Netherlands** (Nederland wordt niet gevonden)
- Geef en bevestig uw akkoord op de Gebruiksvoorwaarden en privacy beleid

De app opent in het scherm INLOGGEN. Helemaal onderaan ziet u staan:

Nog geen account? [Registreren](#)

- Klik op [Registreren](#).
- Vul uw emailadres in
- Maak een wachtwoord aan en herhaal deze.
 - Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens en moet een combinatie zijn van HOOFDLETTERS, kleine letters en speciale tekens (@#\$%^&*).
 - Een voorbeeld van een goed wachtwoord kan zijn: [Glunovo@Gd!](#)
- Klik op de tekst **Ontvang de verificatiecode**
- Ga naar uw mailbox en kijk of u een mail heeft ontvangen van glunovoshare.service met de titel 'Welcome to infinovo'. In deze mail staat de zogenaamde verification code van 6 cijfers.
 - *Mocht u geen mail hebben ontvangen, kijk dan bij de spam/ ongewenste email*
- Ga terug naar de Glunovo Pro app en vul deze code in bij het tekstveld Verificatiecode en klik daarna op [Registreren](#).
- U komt nu bij het onderdeel **Gegevensinvoer**
 - De app vraagt u uw voornaam en achternaam en geboortedatum in te vullen (laatste is niet verplicht).
 - Volgorde geboortedatum is JAAR – MAAND – DAG
 - Klik op Bevestigen

U komt nu in het gedeelte Instellingen. Dit betreft het instellen van de meeteenheid, doelbereik, alarmen etc. Na uw selectie veegt u in het scherm naar links om verder te gaan.

- Selecteer meeteenheid: in Nederland **mmol/L**
- Stel u uw doelbereik in
 - Klik op het > **teken** bij waarde en beweeg met uw vinger over het getal voor de laagste en de hoogste waarde van het doelbereik
 - Klik daarna op Bevestigen
 - *Als u uw doelbereik niet weet, dan kunt u de standaardinstelling laten staan en dit later eventueel nog aanpassen in overleg met uw behandelaar.*
- Alarm instellen voor hoge en lage waarden
 - Klik op het > **teken** bij waarde hoog of laag alarm en beweeg over het getal om deze aan te passen
 - Klik vervolgens op Bevestigen
 - Door op het groene schuifje te klikken, kunt u dit alarm uitzetten
 - U kunt Geluid en Trillen ook aan of uitzetten

NB: deze instellingen kunt u altijd later nog aanpassen in het Instellingen menu van de app

- Alarm ernstig laag
 - Vanuit veiligheidsoverwegingen kunt u dit alarm niet aanpassen of uitzetten
 - Het alarm staat standaard ingesteld op 3.0 mmol/L
- Bij meldingsinstellingen staat standaard ingesteld dat u elke 3 minuten een melding in uw scherm krijgt van de waarde. Deze kunt u hier uitzetten door op het groene schuifje te klikken.

Uw account en instellingen zijn nu helemaal compleet.

De app gaat verder met de instructie hoe u de sensor en zender aanbrengt.