

Pansement Solventum™ V.A.C.® Peel and Place

En toute simplicité, étendez
l'application de la thérapie V.A.C.®



3M™ Prevena™ Plus

3M™ ACTIV.A.C.™

3M™ V.A.C.® Ultra

Compatibilité avec les unités Solventum™

Inspiré par les soignants, pensé pour les patients



Efficacité jusqu'à 7 jours¹

Le film protecteur, perforé et non adhérent sous la mousse permet une tenue efficace jusqu'à 7 jours et ainsi une diminution de la fréquence de change du pansement.



Rapidité d'application < 2 minutes²

Conçu pour couvrir la plaie et les tissus environnants, le pansement V.A.C.® Peel & Place assure une application facile et rapide à tous les soignants.




Conception simple tout-en-un

Effet de macrodéformation et de microdéformation homogène et uniforme sur l'ensemble de la plaie



Repositionnable grâce au champ adhésif 3M™ Dermatac™

Le tout premier film hybride en silicone et acrylique pour un retrait en douceur et une étanchéité optimale.

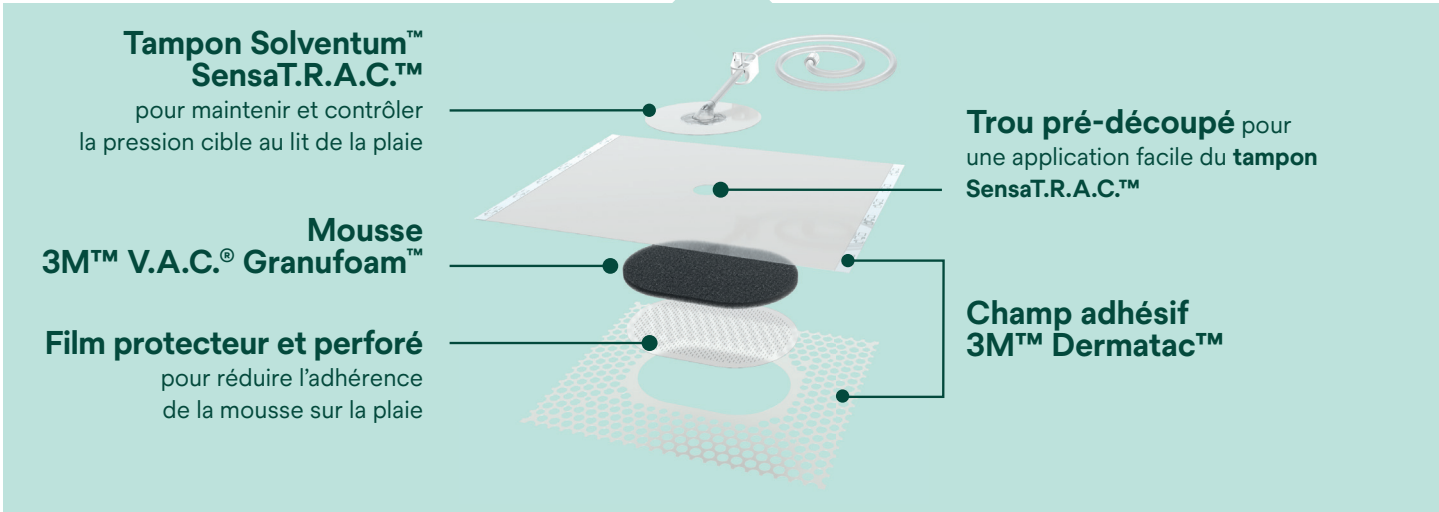

Extension des indications accessibles à la thérapie V.A.C.®

INDICATIONS	
- Plaies de forme irrégulière - Ulcères de jambe - Ulcères du pied diabétique - Greffes / Lambeaux	- Escarres III & IV - Toutes les plaies d'une profondeur inférieure à 6 cm, avec un décollement inférieur à 2 cm, sans tunnelisation

Impact économique optimisé sur l'organisation des soins des plaies ⁴



Réduction de 74%

de recours à l'infirmier(e)



Diminution de 75%

du nombre de changements de pansements*



Augmentation de 23%

des recettes journalières par GHM*

* En se basant sur un changement hebdomadaire de 4 pansements standards contre 1 pansement V.A.C.® Peel and Place

* Moyenne de 4 GHM - plaies complexes

Cas clinique


Un patient diabétique qui a reçu une piqûre d'araignée sur l'avant-bras. Suite au développement d'une cellulite, les professionnels de santé ont débridé la plaie et appliqué un greffon.



Application rapide et facile



Le décollement doit être ≤ 2 cm et il ne doit pas y avoir de tunnelisation.

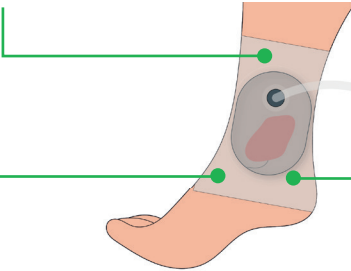

Pour déporter, sélectionner la taille de pansement "Large".

Ne pas ajouter d'autres pansements ou de mousses de remplissage.

La mousse doit s'étendre au-delà de la plaie et dépasser sur la peau périlésionnelle d'environ 1,5 cm.


Unités de thérapie	Références
 3M™ Prevena™ Plus	PRE4010
 3M™ ActiV.A.C.™	340006
 3M™ V.A.C.® Ulta	HCULTDEV01/FR

Réservoirs 3M™ V.A.C.®	Références & conditionnements
 Réservoir 150 ml Prevena™ Plus	PRE4095 Carton de 5
 Réservoir 300 ml pour utilisation avec l'unité de thérapie 3M™ ActiV.A.C.™ et 3M™ V.A.C.® Ulta Home	M8275058/10 Carton de 10
 Réservoir 500 ml pour utilisation avec l'unité de thérapie 3M™ V.A.C.® Ulta	M8275063/10 Carton de 10

Kit de pansements V.A.C.® Peel & Place (Tampon SensaT.R.A.C.™ inclus)

Nom du produit et références	Profondeur maximale de la plaie	Taille de la mousse	Taille du pansement	Emplacement du trou prédécoupé	Conditionnement
Petit EZ5SML	≤ 2 cm	6,1 cm 8,6 cm	16,9 cm 20,6 cm	Centré	Carton de 5
Moyen EZ5MED	≤ 4 cm	11,1 cm 16,6 cm	23,7 cm 29,2 cm	Centré	
Grand EZ5LRG	≤ 6 cm	13,6 cm 24,2 cm	26 cm 35,6 cm	Déporté	

Tout savoir sur l'innovation
Solventum™ V.A.C.® Peel & Place

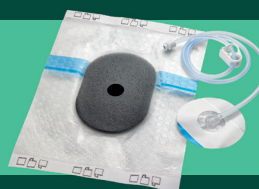

Service Client

Par téléphone : +32 (0) 2 808 58 80

Mail : customerservice@gdmedical.be



© 2025, Solventum. Solventum, le logo S sont des marques déposées de Solventum. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Pansements 3M™ V.A.C.® : Dispositifs médicaux de classe IIa ou IIb selon la référence, CE 2797. Unité de Thérapie 3M™ ActiV.A.C.™ 3M™ V.A.C.® Ulta, Prevena™ Plus 125, Film 3M™ V.A.C.® : Dispositifs Médicaux de classe IIa ou IIb selon la référence, CE 2797. Fabricant KCI USA. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par Solventum France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex. Med-Surg-411 Juillet 2025.

- SAT-BSER-05-869347 V.A.C.® Peel and Place (Ganymede) BSER.
- In a simulated use test with 12 nurse and surgeon users. Average dressing application time of 01:48. SAT-MTF-05-995965 Marketing study for 3M V.A.C.® Peel and Place Dressing. 2023
- SAT-MTF-05-982101 Evaluation of 3M™ V.A.C.® Peel and Place Dressing Concepts in Full-Thickness Excisional Wounds. 2023. Allen D, Robinson T, Schmidt M, Kieswetter K. Preclinical assessment of novel longer-duration wear negative pressure wound therapy dressing in a porcine model. Wound Rep Reg. 2023;31S3:349-359.
- Simulation médico-économique réalisée par Solventum France (Juin 2025) non contractuelle visant à présenter le bénéfice hypothétique du pansement V.A.C.® Peel and Place.