

Veelgestelde vragen over 3M™ V.A.C.® Peel and Place-verband

V. Zijn V.A.C. Peel and Place-verbanden geïndiceerd voor hetzelfde type wonden als andere 3M™ V.A.C.® Granufoam™-verbanden?

Ja. Dit verband is geschikt voor dezelfde geïndiceerde typen wonden als traditionele V.A.C.® Granufoam™-verbanden.

V. Voor welke wondafmetingen zijn de verschillende V.A.C.® Peel and Place-verbanden geschikt?

Het foamgedeelte van het verband moet uitsteken voorbij alle wondranden en het wondbed volledig bedekken. Als een wond dieper is dan 6 cm, gebruik dan een traditioneel 3M™ V.A.C.® Granufoam™-verband.

- Voor het **kleine** (small) verband mag de wonddiepte maximaal 2 cm zijn.
 - Voor het **middelgrote** (medium) verband mag de wonddiepte maximaal 4 cm zijn.
 - Voor het **grote** (large) verband mag de wonddiepte maximaal 6 cm zijn.
-

V. Kunnen V.A.C.® Peel and Place-verbanden worden gebruikt op wonden met ondermijning?

De verbanden kunnen worden gebruikt met ondermijning tot 2 cm. Gebruik de verbanden niet als de ondermijning dieper is dan 2 cm.

V. Kunnen V.A.C.® Peel and Place-verbanden worden gebruikt op wonden met tunnels?

Gebruik de verbanden niet op wonden met tunnels. Gebruik een ander V.A.C.® -verband voor wonden met tunnels.

V. Kan losse foam of andere wondvullers onder de verbanden worden gebruikt?

Nee. Gebruik geen wondvullers met het V.A.C.® Peel and Place-verband. Als wondvullers nodig zijn, selecteer dan een ander V.A.C.® Granufoam™-verband voor gebruik.

V. Welke Solventum™ NPWT-systemen kunnen worden gebruikt met V.A.C.® Peel and Place-verbanden?

De V.A.C.® Peel and Place-verbanden dienen alleen te worden gebruikt met de volgende Solventum NPWT-oplossingen:

- 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit (alleen 3M™ V.A.C.®-therapie)
- 3M™ ActiV.A.C.™ Therapy Unit
- 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit

Niet gebruiken met enige andere systemen of muurvacuüm.

V. Hoe lang kunnen de V.A.C.® Peel and Place-verbanden worden toegepast / gebruikt?

De verbanden kunnen maximaal 7 dagen blijven zitten. De frequentie kan indien nodig door de behandelaar worden aangepast. De intervallen tussen wisselen van wondverband moeten gebaseerd zijn op een voortdurende evaluatie van de conditie van de patiënt en de wond in plaats van op een vast schema. Zoals bij alle NPWT-verbanden moeten geïnfecteerde wonden vaak en zeer nauwlettend worden gecontroleerd en moeten de verbanden mogelijk vaker worden verwisseld.

V. Kan het foamgedeelte van het V.A.C.® Peel and Place-verband over de intacte huid worden gelegd?

Ja, de geperforeerde, niet-klevende polyurethaanlaag beschermt de periwondhuid tegen direct contact met foam.

V. Kan het Solventum™ V.A.C.® Peel and Place-verband direct op weefselflappen en huidtransplantaten worden geplaatst?

Ja, dankzij de geperforeerde, niet-klevende polyurethaanlaag kan het verband direct op weefselflappen of huidtransplantaten worden geplaatst.

V. Hoe moet er worden omgegaan met lekkages bij het V.A.C.® Peel and Place-verband?

Als zich een lekkage voordoet binnen 20 minuten na plaatsen, kan het verband worden opgetild, geherpositioneerd en opnieuw worden aangebracht. Zorg dat er geen rimpels of vouwen in het verband zitten. Als er tijdens de therapie een lekkage ontstaat, versterk het verband dan met extra 3M™ Dermatac™-folie of 3M™ V.A.C.®-folie.

V. Kan ik het V.A.C.® Peel and Place-verband knippen of aanpassen?

Knip niet in het foamgedeelte van het verband. Zorg dat er een afdoende ruimte is voor de folie voor een goede afdichting. Het verband is bedoeld om te worden gebruikt zonder aanpassing van de afmetingen van de folie, zodat het verband eenvoudig kan worden aangebracht. Voor sommige toepassingen kan het echter wenselijk zijn om het verband op maat te knippen naar oordeel van de zorgprofessional. Zorg dat er afdoende folie is voor de afdichting. Bij een gebogen anatomie kunnen insneden worden gemaakt in het foliegedeelte van het verband om overlappingsen of plooiën in de folie te verminderen of om rimpels in de folie te verwijderen.

V. Welke instellingen voor negatieve druk kan ik gebruiken met het V.A.C.® Peel and Place-verband?

De drukinstelling moet tussen -75 en -150 mmHg in continue modus liggen. Deze instellingen zorgen ervoor dat het verband gedurende de therapie in contact blijft met het wondbed.

V. Moet ik een niet-klevende laag toevoegen om blootliggende bloedvaten, anastomosegebieden of organen te beschermen?

Ja, net als bij andere V.A.C.®-verbanden die over blootliggende bloedvaten, anastomosegebieden of organen worden geplaatst, zou een dikke laag natuurlijk weefsel de meest effectieve bescherming moeten bieden. Als dit niet beschikbaar is of chirurgisch niet mogelijk is, kunnen als alternatief meerdere lagen van niet-klevend gaasmateriaal of gekweekt weefsel worden overwogen.

V. Moet ik een niet-klevende laag toevoegen om blootliggende pezen, gewrichtsbanden, zenuwen of intact bot te beschermen?

Nee, de geïntegreerde niet-klevende laag voorkomt direct contact met het foam. Als u zich zorgen maakt over de onderliggende structuren, overweeg dan om het verband binnen 7 dagen te wisselen om de wondprogressie te beoordelen.

V. Moet ik me zorgen maken over het fibrineuze of eiwitachtige materiaal op de wond?

Bij het verwijderen van het verband kan er wat fibrineus materiaal zichtbaar zijn. Reinig de wond volgens het protocol of de behandelingsinstructies van uw instelling.

Aanvankelijke preklinische onderzoeken met varkens hebben uitgewezen dat dit materiaal ongeveer 60% albumine bevat, hetgeen het meest voorkomende eiwit in het lichaam is. In het preklinische onderzoek werd het fibrineuze materiaal niet verwijderd. Er werd waargenomen dat dit materiaal na verloop van tijd afnam bij opeenvolgende verbandwisselingen en het materiaal leek geen negatieve invloed te hebben op de wondgenezing.

V. Kan het verband worden gebruikt met 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge Dressings en/of met brugtechnieken?

Nee. Vanwege de verschillen in draagtijden kan het V.A.C.® Peel and Place-verband niet worden gecombineerd met andere NPWT-verbanden. Opties voor drukontlasting van de SolventumSensa™ T.R.A.C.™ pad zijn onder meer:

1. Gebruik een groter V.A.C.® Peel and Place-verband. Opmerking: het vooraf aangebrachte gat van de Solventum™ SensaT.R.A.C.™ Pad in het grote V.A.C.® Peel and Place-verband (large) bevindt zich niet in het midden en kan nuttig zijn in geval drukontlasting nodig is.
2. Plaats vulling onder de Solventum™ SensaT.R.A.C.™ Tubing om het risico op drukpunten tot een minimum te beperken.
3. Als geen van de bovenstaande opties klinisch haalbaar is, gebruik dan een alternatief V.A.C.® Granufoam™-verband of wissel het V.A.C.® Peel and Place-verband en de brugcomponent minstens 3 keer per week.

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing van het product voordat u het product gebruikt. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.