


Importance de l'ajustement

Pour garantir l'efficacité optimale des masques de protection respiratoire 3M™, il est indispensable de veiller à une bonne étanchéité entre le masque et votre visage. Dès lors que cette étanchéité est altérée, l'air contaminé peut pénétrer plus librement et la protection est compromise.

Ces instructions doivent être suivies chaque fois qu'un masque contre les particules 3M™ Aura™ série 1800+ est porté.

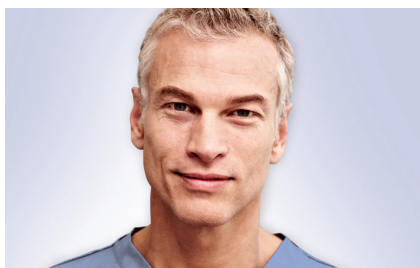


Assurez-vous d'être rasé de près. Les masques ne doivent pas être portés avec de la barbe ou tout autre pilosité susceptibles de réduire l'étanchéité au niveau du visage.

Portez correctement votre masque :

La barrette nasale doit être ajustée aux contours du nez et des pommettes pour garantir une bonne étanchéité. Si vous pincez la barrette nasale d'une seule main, vous risquez de compromettre l'étanchéité du masque.

Assurez-vous que les panneaux sont complètement dépliés.

Le masque doit être correctement positionné sur votre visage.

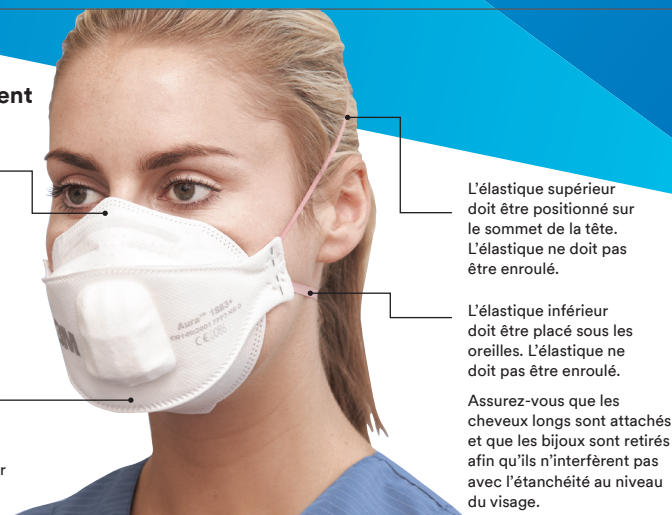


L'élastique supérieur doit être positionné sur le sommet de la tête. L'élastique ne doit pas être enroulé.

L'élastique inférieur doit être placé sous les oreilles. L'élastique ne doit pas être enroulé.

Assurez-vous que les cheveux longs sont attachés et que les bijoux sont retirés afin qu'ils n'interfèrent pas avec l'étanchéité au niveau du visage.

1 et 2

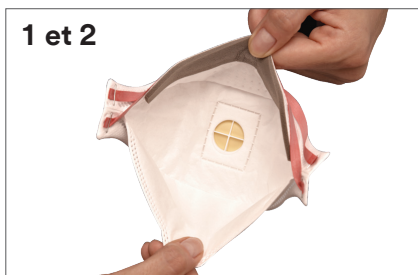

- 1 À l'aide de la languette, séparez les panneaux supérieur et inférieur du masque pour former une coque. Pliez légèrement le centre de la barrette nasale.
- 2 Assurez-vous que les deux panneaux sont complètement dépliés.

3a



- 3a Tenez le masque dans une main avec le côté ouvert vers votre visage.

3b



- 3b Prenez les deux élastiques dans l'autre main. Tenez le masque au niveau du menton et du nez et tirez les élastiques par-dessus votre tête.

4



- 4 Placez l'élastique supérieur sur le sommet de la tête et l'élastique inférieur sous les oreilles. Les élastiques ne doivent pas être enroulés. Ajustez les panneaux supérieur et inférieur pour un ajustement confortable, en veillant à ce que les panneaux et la languette ne se replient pas.

5



- 5 À l'aide des deux mains, ajustez la barrette nasale au contour du nez pour assurer une étanchéité parfaite. Le masque peut être mal ajusté si vous pincez la barrette nasale d'une seule main. Utilisez les deux mains.



6



- 6 Effectuez un contrôle d'ajustement en couvrant l'avant du masque avec les deux mains en prenant soin de ne pas perturber son ajustement.
Si vous utilisez un **masque** sans soupape expiratoire, **expirez** fortement. Si vous utilisez un **masque** avec soupape expiratoire, **inspirez** fortement.
Si de l'air s'échappe au niveau des contours du nez, réajustez la barrette nasale pour éliminer les fuites, puis vérifiez une nouvelle fois l'ajustement. Si vous constatez une fuite d'air sur le pourtour du masque, ajustez les élastiques sur les côtés de la tête afin d'éliminer cette fuite. Vérifiez une nouvelle fois l'étanchéité du masque.
Si vous ne parvenez pas à assurer une étanchéité correcte, ne pénétrez pas dans la zone à risque. Consultez votre responsable.