



## Instructie voor aanbrengen van V.A.C.® Dressings

Voor wonden zonder blootliggende vaten, organen, pezen en zenuwen

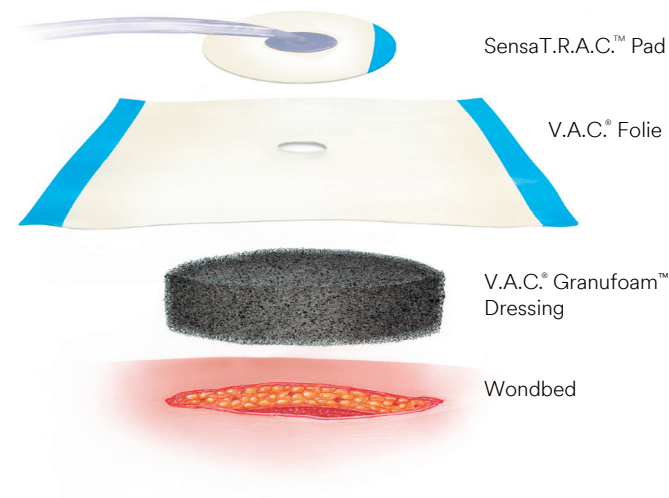


### Stap 1 - Beoordeel type wond en afmeting

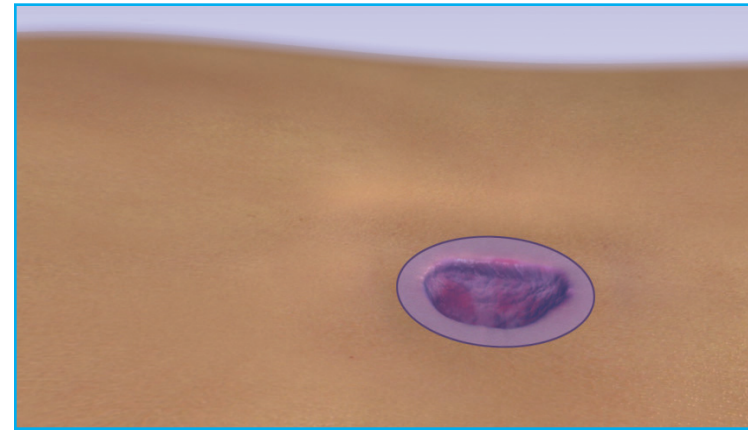

Bereid het wondbed voor.


### Stap 2 - Knip het foam op maat

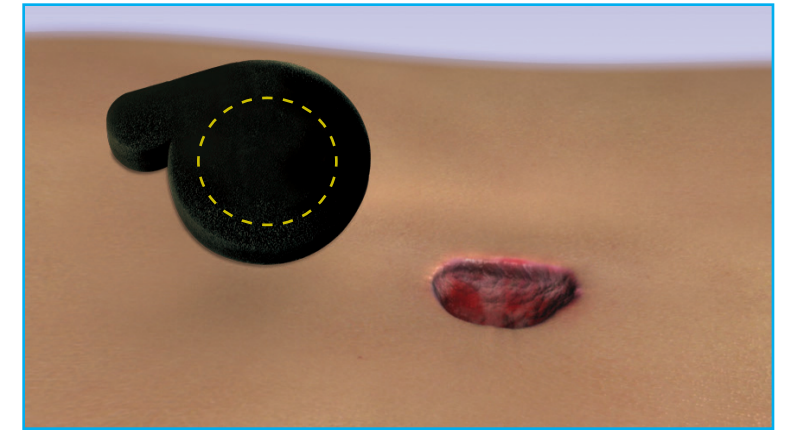

Knip het foam niet boven de wond om te voorkomen dat foam deeltjes in de wond terecht komen.


*Het spiraalvormige V.A.C.® Granufoam™ kan gemakkelijk op maat worden gebracht. Hier is geen schaar voor nodig.*

### Stap 3 - Plaats het verband in de wond

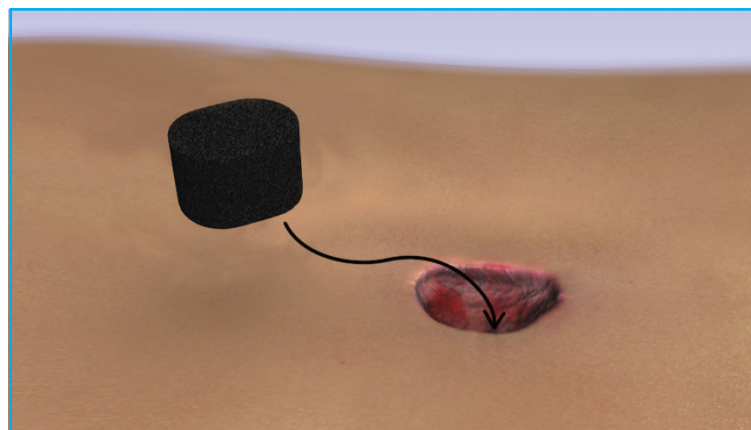


Noteer het aantal stukken foam dat in de wond wordt gebruikt.

### Stap 4 - Knip V.A.C.® folie op maat

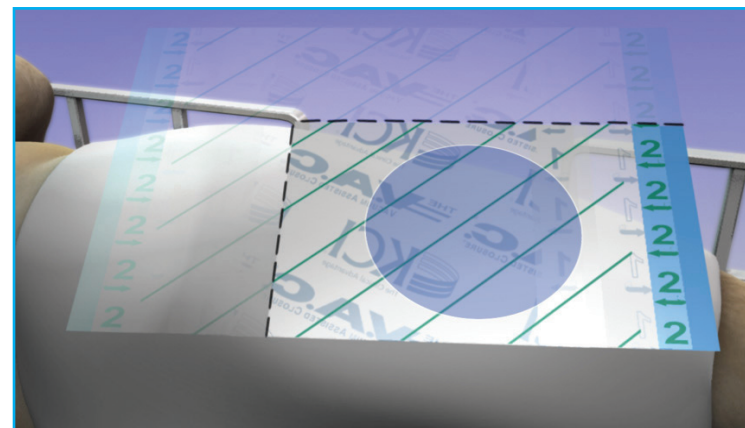


Verwijder één kant van laag 1 en plaats met de plaklaag naar beneden over de wond. Verwijder de rest van laag 1, de groen gestreepte laag en de blauwe strookjes.

### Stap 5 - Aanbrengen SensaT.R.A.C.™ Pad

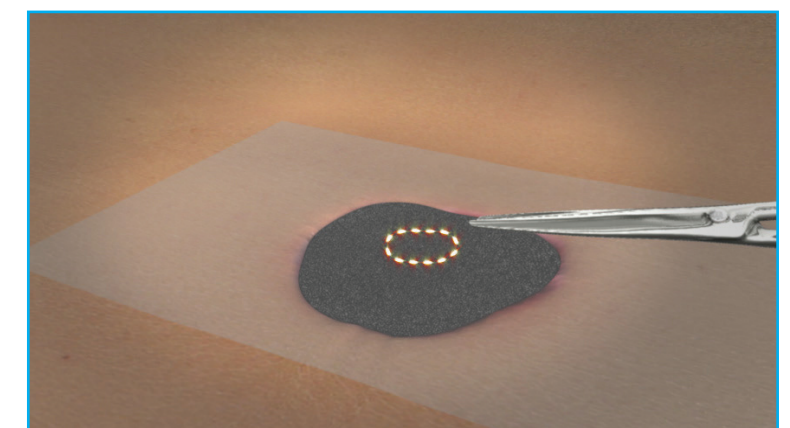

Bepaal plaats voor de SensaT.R.A.C.™ Pad.

**Stap 6** - Knijp in de folie, trek omhoog en knip een rond gat van ~2.5 cm

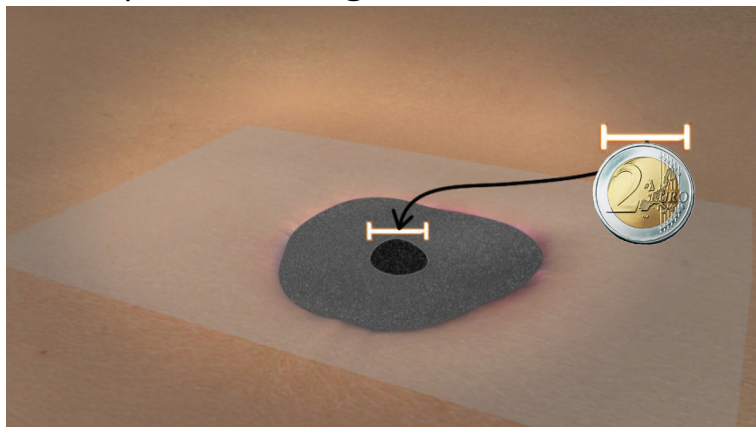


Houd de folie tussen duim en wijsvinger en knip hier onderdoor. Een goede referentie voor de grootte is een 2 euro muntstuk.


**Stap 9** - Koppel de SensaT.R.A.C.™ Pad aan de slang van de opvangbeker



**Stap 7** - Verwijder kleeflaag 1 en 2 van de SensaT.R.A.C. Pad

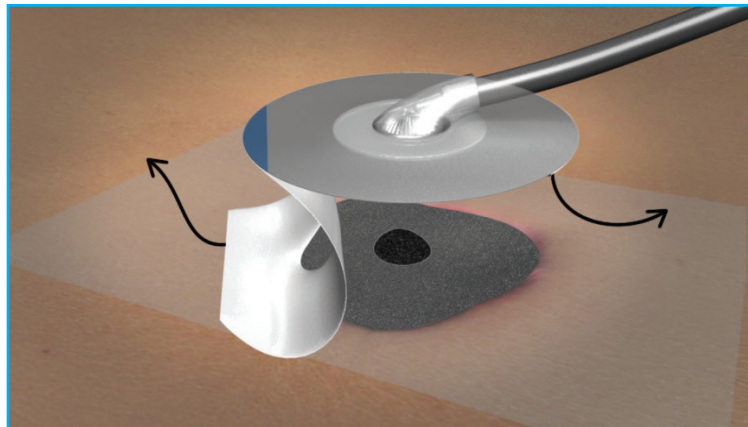


**Stap 8** - Plaats de SensaT.R.A.C. Pad opening direct boven het gat

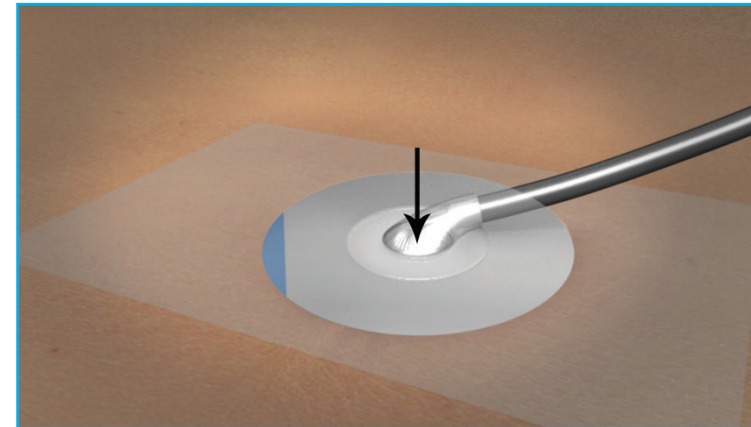

Verwijder de blauwe stabilisatielaag. Noteer de datum en het aantal stukken foam in het patiëntendossier.

**Stap 10** - Zet de V.A.C.® Therapy Unit weer aan

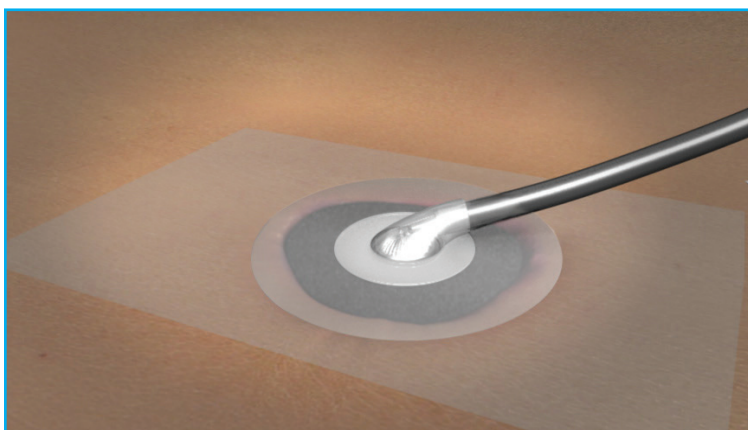

Stel de voorgeschreven therapie-instellingen in om de therapie te starten.

Instructies voor gebruik en veiligheid: Dit is een korte instructie waarin de basistappen van het aanbrengen van V.A.C.® Dressings worden uitgelegd. Zoals met elk apparaat, is het belangrijk om de gedetailleerde instructies voor het gebruik en veiligheid te lezen en te begrijpen (met inbegrip de informatie over blootgestelde vaten, organen, pezen, zenuwen, en infectie) van toepassing zijnde op uw V.A.C.® Therapy Unit en het aanbrengen van V.A.C.® Dressings. Vragen en informatie: Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar specifieke informatie welke gevonden kan worden bij de therapie unit, in het karton van de V.A.C.® dressings of in de V.A.C.® Therapy klinische richtlijnen. Deze bronnen geven informatie over de correcte toepassing van alle V.A.C.® Therapy Dressings waaronder geavanceerde toepassingen en technieken. Voor vragen over het product kunt u contact opnemen met uw account manager of kijken op [gdmedical.nl](http://gdmedical.nl) of [gdmedical.be](mailto:gdmedical.be)

Opmerking: Specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie bestaan voor 3Mp producten en therapieën. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing voor het aanbrengen. De informatie is bedoeld voor zorgprofessionals.

**Neem bij medische vragen contact op met de behandelaar.**

Voor product gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met GD Medical via: [customerservice@gdmedical.nl](mailto:customerservice@gdmedical.nl) of bel 040- 3031099

# V.A.C.® PEEL & PLACE AANBRENGEN

Het verband kan tot 7 dagen blijven zitten en is door de aanwezige bescherm laag zonder pijn te verwijderen

## ✓ PLAATSEN




Plaats het verband met het SensaT.R.A.C.™ Pad-gat naar boven. Laat ten minste 2 cm van het geïntegreerde Granufoam deel overlappen op de huid.

## ✓ CONTROLEREN



Controleer de folie en positioneer opnieuw indien nodig en strijk eventuele plooien glad. Druk de rand goed aan en verwijder de blauwe zijkantjes om een goede afdichting te creëren.

## ✓ AANSLUITEN

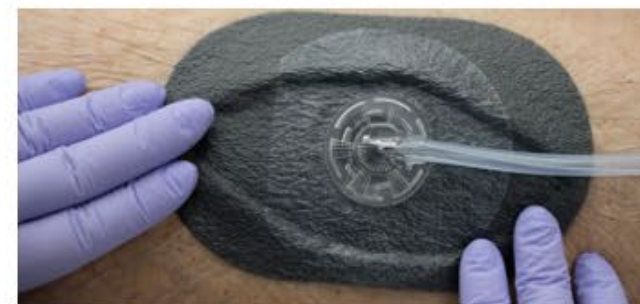

Breng de SensaT.R.A.C.™ Pad aan over het gat en druk het aan. Sluit de slang aan op de V.A.C.® Therapie pomp en start de therapie.