

ABTHERA ADVANCE™


OPEN ABDOMEN DRESSING

Belangrijk: Deze verkorte handleiding is bedoeld als een globaal overzicht. Raadpleeg het ABTHERA ADVANCE™ Dressing Indicatie overzicht en de V.A.C. ULTA™ Therapy Unit Gebruikershandleiding voor uitgebreide instructies, waaronder belangrijke veiligheidsinformatie. Consulteer bij medische noodgevallen de behandelend arts of het noodnummer. Lees alle bijgaande literatuuren en labels behorend bij het product aandachtig door voorafgaand aan gebruik. Neem bij vragen voor het opstarten van de therapie contact op met GD Medical (exclusieve distributeur producten 3M+KCI).

Indicaties voor gebruik

- Tijdelijke overbrugging van openingen in de buikwand wanneer primaire sluiting niet mogelijk is en/of herhaaldelijke toegang tot de buik nodig is.
- Beoogd gebruik van dit verband is toepassing bij open buik wonden met blootliggende ingewanden, inclusief, maar niet beperkt tot, abdominaal compartiment syndroom.
- Beoogde zorgomgeving is een ziekenhuisomgeving met continu toezicht, zoals een Intensive Care Unit. Het abdominaal verband zal meestal op de OK worden aangebracht.

ABTHERA ADVANCE™ Open Abdomen Dressing

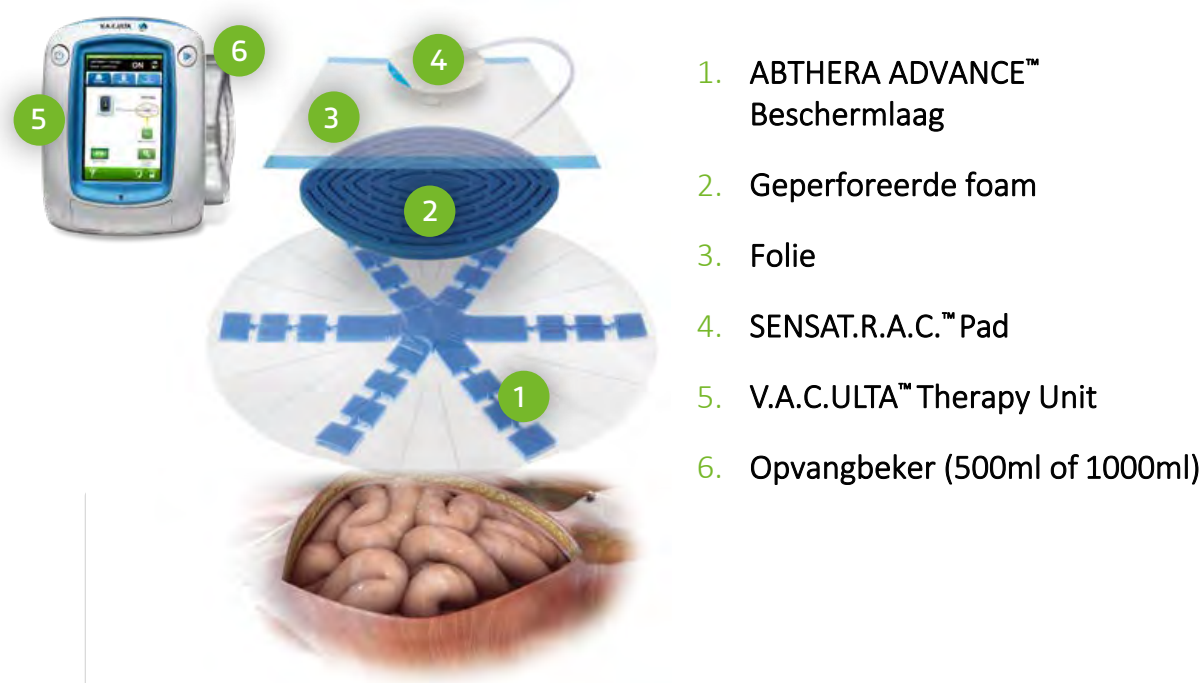

V.A.C. ULTA™ Therapy Unit



Installeren van de unit

1. Plaats de opvangbeker




V.A.C. ULTA™ 500ml of 1000ml opvangbeker

2. Sluit de slang van de pad aan op de slang van de opvangbeker (na aanbrengen verband) door aanduwen en draaien van de connector



NB: Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het V.A.C. ULTA™ 4 Therapy System voor de volledige instructies

Starten met ABTHERA™ Therapy

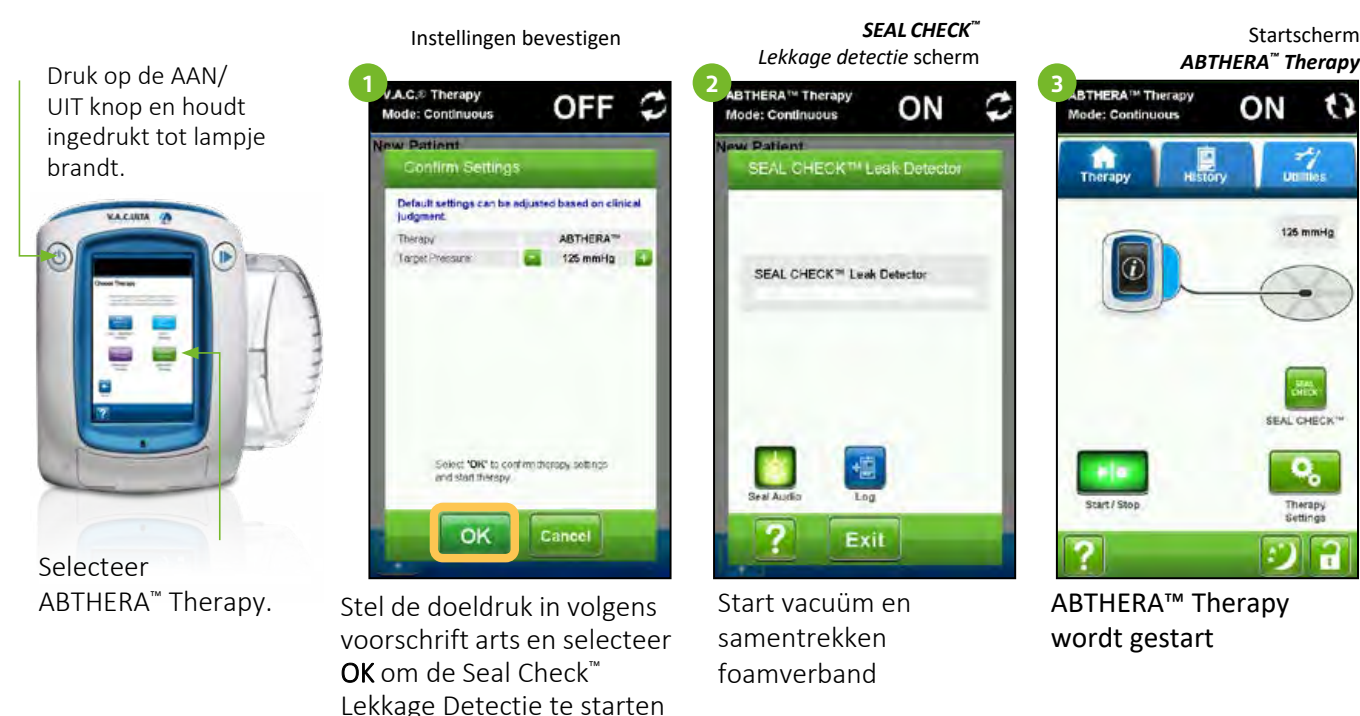

Neem voor meer informatie contact op met uw account manager, onze klantenservice

040- 3031 099 of kijk op gdmedical.nl

NB: Er bestaan specifieke indicaties, contra- indicaties, voorzorgsmaatregelen, en veiligheidsinformatie voor producten en therapieën van KCI. Raadpleeg voor gebruik een arts en de productinstructies. Dit document is bestemd voor zorgverleners. De ABTHERA ADVANCE™ OA Dressing is ontworpen voor gebruik met negatieve druk therapie met de V.A.C. ULTA™ 4 Therapy Unit. Selecteer bij gebruik van de V.A.C. ULTA™ 4 Therapy Unit, niet de V.A.C. VERAFL™ Instillatie Therapie optie. Zie Gebruikersinstructies. De ABTHERA ADVANCE™ Dressing kan niet gebruikt worden met de ABTHERA™ NPT unit. Copyright 2019 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders aangegeven, zijn alle hier genoemde handelsmerken eigendom van, KCI Licensing, Inc., Systagenix Wound Management, Ltd., of Crawford Healthcare, Ltd. PRA-PM-EU-00134 (06/19)

Contra- indicaties


Breng nooit foam in direct contact met darmen, andere organen, bloedvaten of zenuwen.

- Bescherm vitale structuren tijdens de therapie altijd met de ABTHERA ADVANCE™ bescherm laag.
- Patiënten met een open buik waar ook niet- enterale niet-geëxploreerde fistels aanwezig zijn, moeten niet worden behandeld met de ABTHERA ADVANCE™ Open Abdomen Dressing

AANBRENGEN BESCHERMLAAG

Plaatsen van slangen en drains:

Bepaal hoe de bescherm laag het beste geplaatst kan worden voorafgaand aan het inbrengen. Wanneer de bescherm laag rondom slangen, drains of het ligamentum falciforme moet worden aangebracht, knip dan alleen tussen de foam armen, zoals hiernaast getoond (knip niet vlak naast of door de foam armen). De bescherm laag kan op maat worden gemaakt door deze te knippen of te vouwen. Er is geen verschil tussen de boven- en onderkant van de bescherm laag.



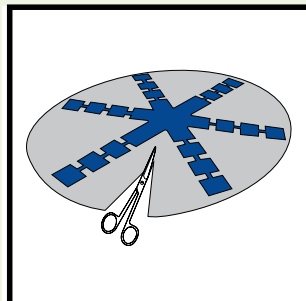


WAARSCHUWING: Voor de veiligheid van de patiënt zit de foam ingekapseld. Bescherm tijdens de therapie vitale structuren te allen tijde met de ABTHERA ADVANCE™ bescherm laag. Breng nooit foam in direct contact met darmen, bloedvaten of zenuwen.

WAARSCHUWING: Hemostase moet bereikt zijn voor aanbrengen verband. Raadpleeg de Gebruikers-handleiding van de ABTHERA ADVANCE™ Dressing voor alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Bescherm laag op maat vouwen

Houd de bescherm laag vast bij de rand en til deze een beetje op. Breng voorzichtig aan in de paracolische goot. Gebruik de andere hand om de laag voorzichtig en gelijkmatig naar beneden te duwen. Vouw het teveel aan bescherm laag naar boven en buiten. Ga door met plaatsen bescherm laag tussen de buikwand en organen in het gehele abdominale compartiment om alle ingewanden te bedekken.

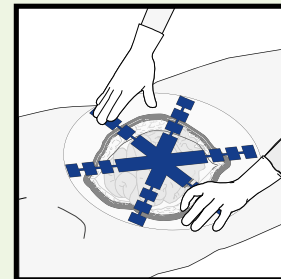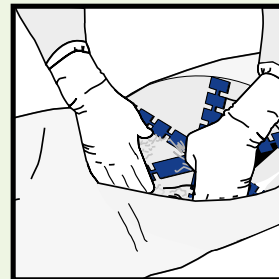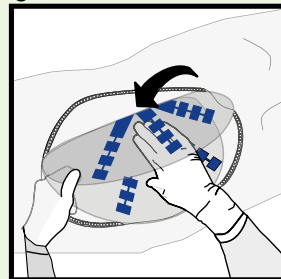


Bescherm laag op maat knippen

NB: Aangezien de bescherm laag diep in de paracolische goot wordt aangebracht, is knippen vaak niet nodig

- Knip met een steriele schaar de bescherm laag, weg van de wond, door het midden van de grote foam vierkanten (Fig. A). Knip niet door de kleine verbinding tussen de foam vierkanten.
- Pak de resterende helft van het foam vierkant en de verbinding vast en trek aan. De foam en verbinding zullen loskomen bij het eerstvolgende vierkant (Fig. B). Hierdoor zal de bescherm laag de foam bedekken, waardoor het niet in contact kan komen met organen (Fig. C).

NB: Noteer het aantal verwijderde foam delen en zorg dat elk stuk foam op de juiste wijze, weg van het wondgebied, wordt verwijderd.

LET OP: Knip of scheur de foam niet boven de wond, aangezien kleine deeltjes in de wond terecht zouden kunnen komen. Wrijf tegen de foam om losse deeltjes te verwijderen en knip de foam op maat uit de buurt van de wond, zodat losse deeltjes niet in de wond terecht kunnen komen bij de verbandwisselingen.

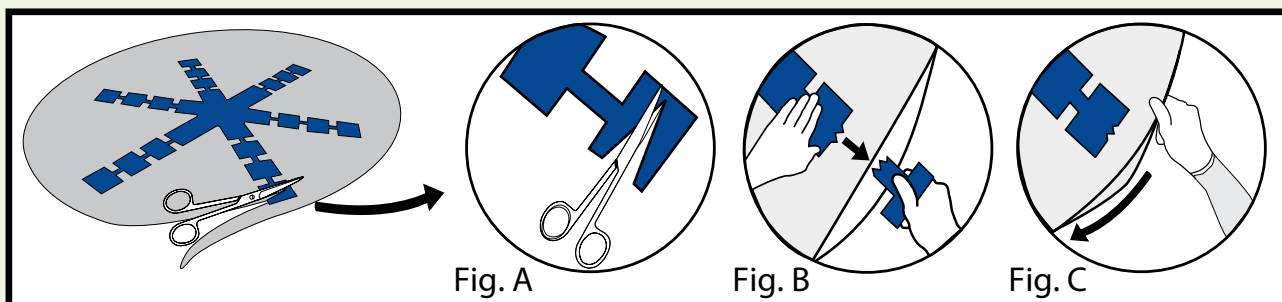

Aanbrengen geperforeerde foam en folie

Knip of scheur de geperforeerde foam op maat. Plaats de foam voorzichtig in de wond bovenop de bescherm laag.

NB: Foam niet in de wond proppen.

LET OP: Knip of scheur de foam niet boven de wond, aangezien kleine deeltjes in de wond terecht zouden kunnen komen. Wrijf tegen de foam om losse deeltjes te verwijderen en knip de foam op maat uit de buurt van de wond, zodat losse deeltjes niet in de wond terecht kunnen komen bij de verbandwisselingen.

Breng de folie aan over de foam en de intacte huid en zorg dat de folie 8-10cm intacte huid rondom de wond bedekt.

NB: Ter voorkoming van trauma aan de omliggende huid de folie niet strak trekken over het foamverband. Minimaliseer plooien, aangezien deze een bron voor lucht lekkage kunnen vormen (zie ook het deel Voorzorgsmaatregelen Beschermen omliggende huid van de Gebruikershandleiding).

NB: Bij gebruik van meerdere stukken folie deze elkaar laten overlappen om goede afdichting te krijgen.

Knip een rond gat van minimaal 2cm doorsnede in de folie t.b.v. plaatsing SENSAT.R.A.C.™ Pad. Breng de SENSAT.R.A.C.™ Pad aan recht boven het gat.

