

Gegevens downloaden naar PC

Met behulp van speciale software (te installeren op uw PC) kunt u de resultaten van uw Diatesse XPER meter, via een micro USB-kabel of Bluetooth® (voor Windows 10), verzenden en beheren op uw computer indien u dat wenst. De software is geschikt voor PC's met Microsoft Windows besturingssysteem.

Instructie installatie

Download het installatiepakket voor Windows 11 (downloaden via de link Diatesse website) naar uw PC. Als het downloaden geslaagd is dan dient u het installatiepakket (zip-bestand) uit te pakken. Dit kan over het algemeen door te dubbelklikken op het bestand. In het uitgepakte pakket vindt u de installer (setup), dubbelklik op dit bestand en geef akkoord op de bevestigingsvraag. Volg nu de instructies van het installatieprogramma om uw software te installeren. Na afloop van de installatie is de software geïnstalleerd op uw PC en door u te gebruiken.

De meter aansluiten op een pc via kabelverbinding

Sluit de kabel aan op een USB-poort op uw computer. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel, met de meter uitgeschakeld, aan op de gegevenspoort van de meter. "USB" verschijnt op het display van de meter, wat aangeeft dat de meter in de communicatiemodus staat. Kies in de software het juiste apparaat: Model TD-4289.

Gegevensverzending

Volg de instructies bij de software voor het verzenden van gegevens. De resultaten worden verzonden met datum en tijd. Verwijder de kabel; de meter wordt automatisch uitgeschakeld.

OPMERKING:

De in de software gebruikte aanduiding "BG" staat voor Blood Glucose metingen. "BP" staat voor Blood Pressure en "Thermometer" staat voor temperatuur metingen. ALLEEN "BG" IS VAN TOEPASSING.

LET OP:

Uw beveiligingssoftware / anti-virussoftware kan een melding geven over het downloaden van software. De software die u hier kunt downloaden is géén malware (geen schadelijke software voor uw computer). U kunt deze software veilig installeren ondanks deze waarschuwing.

Installeren GlucoCheck App op uw telefoon



Bluetooth® kan in de basisinstellingen in- of uitgeschakeld worden. De bluetooth® (BT) dient ingeschakeld (ON) te zijn. Voor meer informatie raadpleeg pagina 10 (hoofdstuk 6) in de handleiding van de Diatesse XPER.

Wij adviseren u onderstaande stappen uit te voeren:

- Eerst dient u de Bluetooth®-functie op uw smartphone* aan te zetten.
- Installeer vervolgens de GlucoCheck App via **App Store (IOS) of Google Play (Android)**.
- De volgende stap is de meter inschakelen en direct uitschakelen. Na uitschakeling is Bluetooth® actief, u ziet het Bluetooth®-signaal op uw meter knipperen.
- In de GlucoCheck App gaat u naar Instellingen, vervolgens naar Bluetooth® Smart Meter en via Zoeken vind u uw meter, genaamd Diatesse XPER xxxx(yyyy = de unieke 4 cijfer/lettercombinatie van de Bluetooth® MAC code die aan uw meter is gekoppeld).
- Voeg uw meter toe, druk op het pijltje en selecteer “Ja” om de instellingen op te slaan.
- Nadat de koppeling succesvol tot stand is gekomen zal de Bluetooth®-functie van uw meter uw data verzenden naar de GlucoCheck App.

Heeft u naar aanleiding van deze toelichting nog vragen?

Neem dan contact op met GD Medical door te mailen naar diabetes@gdmedical.nl of te bellen met 040- 3031 099.