


3M™ Prevena™ Therapie



**Uw arts heeft gekozen
voor 3M™ Prevena™
therapie**

VOOR DE BEHANDELING VAN UW
CHIRURGISCHE INCISIE

Uw arts heeft het 3M™ Prevena™ systeem geselecteerd om uw incisie te helpen beschermen door:

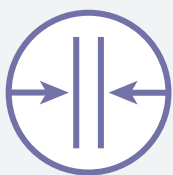

incisieranden
bij elkaar te
houden



bescherming te
bieden tegen
externe
infectiebronnen




vocht te
verwijderen
van de
incisieplaats

Het beschermen van uw incisie is belangrijk voor uw herstel

- Een **incisie** is een insnijding van huid en weefsel van het lichaam die tijdens een chirurgische ingreep wordt gemaakt en die wordt gesloten met behulp van chirurgische hechtingen, nietjes of een combinatie van deze methoden.
- Incisies genezen zowel aan het huidoppervlak als daaronder.
- Het verzorgen van uw incisie is een belangrijk onderdeel waarmee u uw hersteltijd en uw kwaliteit van leven kunt beïnvloeden.

3M™ Prevena™ Therapie

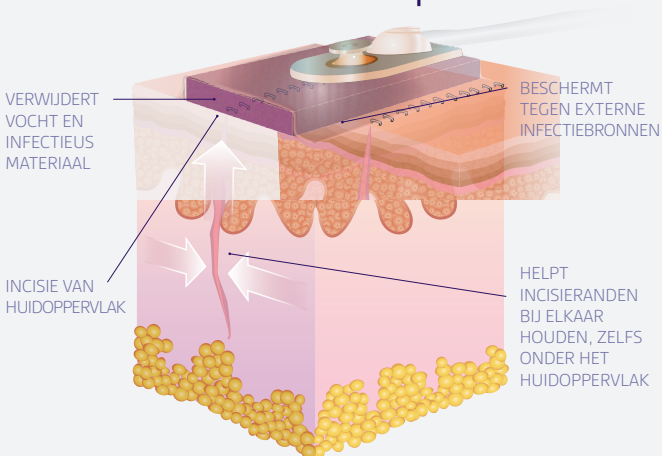

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe lang wordt 3M™ Prevena™ therapie op mijn incisie toegepast?

- Draag het systeem gedurende de tijd die uw arts heeft opgedragen. De therapie-unit wordt na 7 dagen automatisch uitgeschakeld.

Moet mijn incisieverband worden vervangen?

- Meestal wordt het wondverband niet vervangen. Volg de instructies van uw arts.

Wat gebeurt er als het alarm van het 3M™ Prevena™ systeem afgaat?

- De therapie-unit is voorzien van alarmen die u kunt zien en horen, om u te waarschuwen voor mogelijke problemen zoals een lege accu of een luchtlek. In de meeste gevallen kan het probleem makkelijk worden opgelost. Raadpleeg de handleiding voor patiënten van de 3M™ Prevena™-therapie of neem contact op met uw vertegenwoordiger van GD Medical.

Waar kan ik meer informatie vinden?


- De handleiding voor patiënten van uw 3M™ Prevena™-therapie bevat meer veiligheidsinformatie en gegevens over het gebruik van uw 3M™ Prevena™ therapie.

Hoe u de 3M™ Prevena™ therapie-unit draagt


Deze draagbare unit moet **altijd** aan staan gedurende de tijd die uw arts heeft opgedragen. Volg de instructies die worden vermeld in deze brochure met betrekking tot slapen en douchen. De unit kan worden gedragen onder uw kleding, inclusief een draagtas met verstelbare banden die u op verschillende manieren kunt dragen.



Op de heup

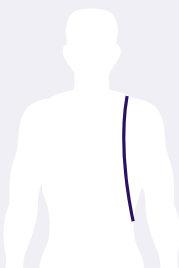

Over de
schouder

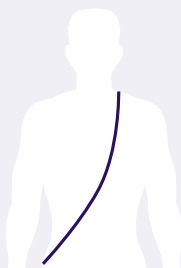

Schuin over
uw lichaam



PREVENA™
125 THERAPIE-
UNIT EN
DRAAGTAS

OPMERKING: Het Prevena systeem is niet geschikt voor gebruik bij kinderen.

WAT IS 3M™ PREVENA™ THERAPIE?

Prevena™ therapie is een draagbaar systeem, voor eenmalig gebruik, waarbij gebruik wordt gemaakt van **negatieve druk** (zoals een vacuüm) om uw incisie te beschermen.

Maak kennis met uw 3M™ Prevena™ systeem

Het 3M™ Prevena™ Peel & Place™ verband of het 3M™ Prevena Customizable™ verband wordt geplaatst na de chirurgische ingreep. De 3M™Prevena systemen werken op vergelijkbare wijze met slechts een paar verschillen.

Uw systeem bevat:

- een therapie-unit die negatieve druk uitoefent op het wondverband
- een wondverband met een waterbestendige afdeklaag die wordt geplaatst over uw incisie
- een verbindingsslang
- een opvangbeker waarmee vocht uit de incisie wordt opgevangen
- een acculader (de 3M™ Prevena™ Plus therapie-unit bevat een oplaadbare accu)
- een draagtas met verstelbare banden



OPMERKING: Het 3M™ Prevena™ systeem kan worden gebruikt bij verschillende soorten incisie. De grootte en locatie van uw incisie kan afwijken van hetgeen wat wordt getoond op de afbeelding hierboven.

HET ONDERHOUDEN VAN

3M™ PREVENA PLUS™125 therapie-unit

Systeem:

Bewaar uw therapie-unit op een veilige plaats waar:

- de slang niet geknikt of afgeklemd kan raken
- de unit niet van een tafel kan worden getrokken of op de vloer kan vallen



Douchen:

Bij toestemming van uw arts mag u een snelle douche nemen. Houd de therapie-unit uit de buurt van directe waterstralen. Dompel het wondverband niet onder in water. Maak vóór het douchen het wondverband los van de therapie-unit.

1. Houd de AAN-/UITknop vast totdat de therapie stopt
2. Sluit de klem op de aansluitingsslang
3. Koppel de slang los van de therapie-unit
4. Verstoor het wondverband niet tijdens het afdrogen.

Raadpleeg de handleiding voor patiënten van de 3M™ Prevena Plus™ therapie voor aanvullende gegevens.

Accu's:

- Deze therapie-unit is voorzien van een oplaadbare accu en wordt geleverd met een acculader.
- Neem uw acculader mee als u langere tijden van huis bent.
- Voor uw gemak kunt u de therapie-unit opladen terwijl u slaapt.

PREVENA™ THERAPIE UNIT

3M™ Prevena™ 125 therapie-unit

Systeem:

Bewaar uw therapie-unit op een veilige plaats waar:

- de slang niet geknikt of afgeklemd kan raken
- de unit niet van een tafel kan worden getrokken of op de vloer kan vallen



Douchen:

Bij toestemming van uw arts mag u een snelle douche nemen. Houd de therapie-unit uit de buurt van directe waterstralen. Dompel het wondverband niet onder in water.

- Verstoor het wondverband niet tijdens het afdrogen.

Raadpleeg de handleiding voor patiënten van de 3M™ Prevena™ therapie voor aanvullende gegevens.

Accu's:

- Deze therapie-unit wordt geleverd met drie AA-batterijen en kan niet worden opgeladen.
- Het wordt aanbevolen dat u extra batterijen bij de hand hebt. Raadpleeg de handleiding voor patiënten van de 3M™ Prevena™ therapie voor instructies over het vervangen van uw batterijen als ze leeg zijn.

Uw 3M™ Prevena™ therapie wondverband

Probeer het wondverband niet te verwijderen of onder het wondverband te kijken terwijl de therapie wordt toegepast.

Het is belangrijk dat u de mogelijke voordelen en risico's van een specifieke therapie met uw arts bespreekt, bij het besluiten of de behandeling voor u geschikt is.

Raadpleeg uw behandelende zorgverlener in geval van specifieke vragen en belangrijke informatie met betrekking tot het gebruik, de veiligheidsinformatie en de bedieningsinstructies van het 3M™ Prevena™ systeem.

Als u product vragen heeft, graag contact opnemen met de klantenservice van GD Medical:

NL: customerservice@gdmedical.nl

BE: customerservice@gdmedical.be

Voor medische vragen graag contact opnemen met uw behandelaar.

OPMERKING: Er zijn specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie voor de Prevena-therapie. Raadpleeg vóór gebruik de toepasselijke gebruiksinstructies in de handleiding voor behandelaars van het Prevena-systeem.

© 3M 2022. 3M, 3M Science. Applied to Life., Prevena is een geregistreerd merken of handelsmerk van 3M Company. Alle rechten voorbehouden.

