

3M™ V.A.C.™ Therapy



V.A.C.® Therapy Behandelwijzer



V.A.C.® GRANUFOAM™ DRESSING

STIMULEERT GRANULATIEWEEFSEL

Bevordert de verwijdering van exsudaat – hydrofoob met open poriën.

Zorgt voor een gelijke verdeling van negatieve druk.

Vormt zich naar de contouren van diepe en onregelmatige wonden – flexibel design.



V.A.C.® WHITEFOAM DRESSING

BESCHERMT KWETSBAAR WEEFSEL

Ideaal voor wonden met tunnels of ondermijningen – hoge treksterkte.

Toepassing op bot, pees en spier.

Ter bescherming van (uitdroging) van (biologische) mesh

Bevordert aanslaan van grafts en flaps – niet verklevend materiaal voor een comfortabele verbandwissel.



V.A.C. GRANUFOAM SILVER® DRESSING

ANTIMICROBIEEL

Snelle en effectieve microbiële vernietiging – continue afgifte van zilverionen aan het wondbed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service via +31 (0)40 303 10 99 / +32 (0)2 808 58 80 of kijk op gdmedical.nl/be



Distributeur van Solventum:
GD Medical
Park Forum 1057,
5657 HJ Eindhoven



3M™ Veraflo™ Therapy als alternatief voor V.A.C.® Therapy



Wat is het

V.A.C. VERAFO™ Therapy is V.A.C.® Therapy gecombineerd met de instillatie van een vloeistof. Het combineert de voordelen van V.A.C.® Therapy met geautomatiseerde toediening en verwijdering van wondvloeistoffen.

Standaard instelling:

Continu -125 mmHg,
10 minuten Soak Time
(inweken), 3,5 uur V.A.C.® Therapy

Wanneer toepassen

- In basis bij alle voor V.A.C.® geschikte wonden
- Geïnfekteerde / kritisch gekoloniseerde wonden
- In plaats van necrectomie bij taai geel beslag in de wond
- Dik exsudaat
- Biofilm in de wond
- Patiënten met diabetes en/of vaatlijden en/of ASA >2
- Riekende wonden (bijv. door Pseudomonas)
- Behandeling osteomyelitis in de wond (ook AB)
- Wonden met slechte genezigstendens (ongeacht wondgrootte)
- Opnameduur van af start >3 dagen

Aanbrengen van V.A.C.® Therapy

AANBRENGEN



- Reinig en droog de huid rondom de wond
- Breng V.A.C.® folie/ hydrocolloid aan op de wondranden of volg protocol instelling
- Knip de V.A.C. GRANUFOAM™ op maat
- Wond losjes opvullen met foam, niet proppen

Let op: de foam mag de wondranden niet bedekken!

AFPLAKKEN



- Knip de folie in stroken
- Verwijder de laag met het getal 1 en breng de folie (dakpansgewijs) aan. Bij voorkeur met een overlap van 3-5cm op de intacte huid.
- **Let op: folie niet te strak aanbrengen!**
- Verwijder laag 2 en verwijder de blauwe strookjes (scheurrand)

AANSLUITEN



- Trek met duim en wijsvinger de folie waar je de pad wilt plaatsen iets los van de foam
- Knip hierin een grote ronde opening ter grootte van een **2 euro munt**
- Breng de SENSAT.R.A.C.™ Pad rechtstreeks aan op de opening in de folie
- Sluit door middel van de bajonetsluiting de connector van de SENSAT.R.A.C.™ Pad op de opvangbeker aan
- Plaats de opvangbeker in de V.A.C.® unit
- Start de therapie (zie gebruikershandleiding)

- Noteer het aantal stukken foam in de wond in het dossier of op de bijgeleverde liniaal met sticker



Indicaties

- Diabetische voetwonden
- Ulcus cruris (open been)
- Decubituswonden
- Dehiscente wonden
- Transplantaten
- Traumawonden
- Abdominale wonden

Contra-indicaties

- Blootliggende bloedvaten en/of organen
- Maligne weefsels
- Necrose
- Niet-enterale en/of ongeëxploreerde fistels
- Actieve bloedingen
- Onbehandelde osteomyelitis



Het belang van SENSAT.R.A.C.™ Technologie

Beweging van wondvocht tegen de zwaartekracht in, evenals viscositeit van het exsudaat in de slang, beïnvloeden de toediening van negatieve druk. Alleen SENSAT.R.A.C.™ compenseert drukafwijkingen ter hoogte van de wond, veroorzaakt door de positie en beweging van de patiënt en kenmerken van het exsudaat. Het geïntegreerde V.A.C.® Therapy Systeem is het enige NPWT systeem dat de negatieve druk ter hoogte van de wond kan monitoren en aanpassen aan de ingestelde druk.