

W2 Controle-vloeistof (geschikt voor Diatesse XPER)

Inhoud: 4 ml

Art. nr.: GD100228

ZI-nr: 16078152

EAN: 8718692270633



Controle-oplossing bevat een bekende hoeveelheid glucose die reageert met de teststrips. Deze wordt gebruikt om te controleren of uw meter en de teststrips op de juiste manier werken.

Wanneer dient een test met controle-vloeistof te worden uitgevoerd?

- Wanneer u denkt dat de teststrips of meter niet goed functioneren;
- Wanneer de resultaten van uw bloedglucose niet overeenkomen met hoe u zich voelt, of als u vermoedt dat de resultaten niet nauwkeurig zijn;
- Bij het oefenen van de testprocedure;
- Als u de meter heeft laten vallen of denkt dat deze misschien is beschadigd.

Belangrijke opmerking:

Het bereik van de waarden voor de controlevloeistof dat op het buisje met teststrips weergegeven staat, is alleen voor gebruik met controlevloeistof. Het is geen aanbevolen bereik voor uw bloedglucosenwaarden .

Belangrijke tips onderhoud:

- Alleen W2 Controle-vloeistof gebruiken bij uw Diatesse-bloedglucosemeter.
- Gebruik de controle-vloeistof niet na de uiterste gebruiksdatum of 3 maanden na de eerste opening.
- Het advies is om de datum van opening op het flaconnetje te schrijven en de eventueel resterende oplossing, na de uiterste gebruiksdatum of 3 maanden na de eerste opening, weg te gooien.