

Solventum™ V.A.C.® Peel and Place Dressing

Draagtijd tot 7 dagen Aanbrengen in 2 min.^{1,2}

3M™ V.A.C.® Therapy is nu eenvoudiger en sneller aan te brengen. 3M™ V.A.C.® Peel and Place Dressing is het eerste V.A.C.® Therapy-verband met een draagtijd tot 7 dagen. Een alles-in-één geïntegreerd ontwerp zorgt voor gestroomlijnd aanbrengen, minder tijd en training voor verbandwissels en maximale consistentie van zorg gedurende het hele patiënttraject.

Alles-in-één ontwerp maakt aanbrengen eenvoudig.

1. 3M™ V.A.C.® Granufoam Dressing

Vormt zich naar het wondbed zonder dat er vullers nodig zijn, voor een gelijkmatige negatieve druk en effectieve exsudaatverwijdering.

2. Geperforeerde niet-klevende laag

Hierdoor kan het verband worden aangebracht op de intacte huid rondom de wond, zonder eerst folie te hoeven aanbrengen. De laag is ontworpen om ingroei van weefsel tegen te gaan.

3. 3M™ V.A.C.® Dermatac™ folie


Huidvriendelijke siliconen-acryl kleeftechnologie maakt herpositioneren bij het aanbrengen mogelijk en zorgt voor een goede afdichting op vele anatomische locaties en minimaal ongemak bij het verwijderen.

4. Solventum™ SensaT.R.A.C.™ Pad opening

Voorgesneden voor eenvoudig en consistent aanbrengen van de SensaT.R.A.C. Pad.

5. Solventum™ SensaT.R.A.C.™ Pad

Helpt de druk in het wondgebied te monitoren en te handhaven.

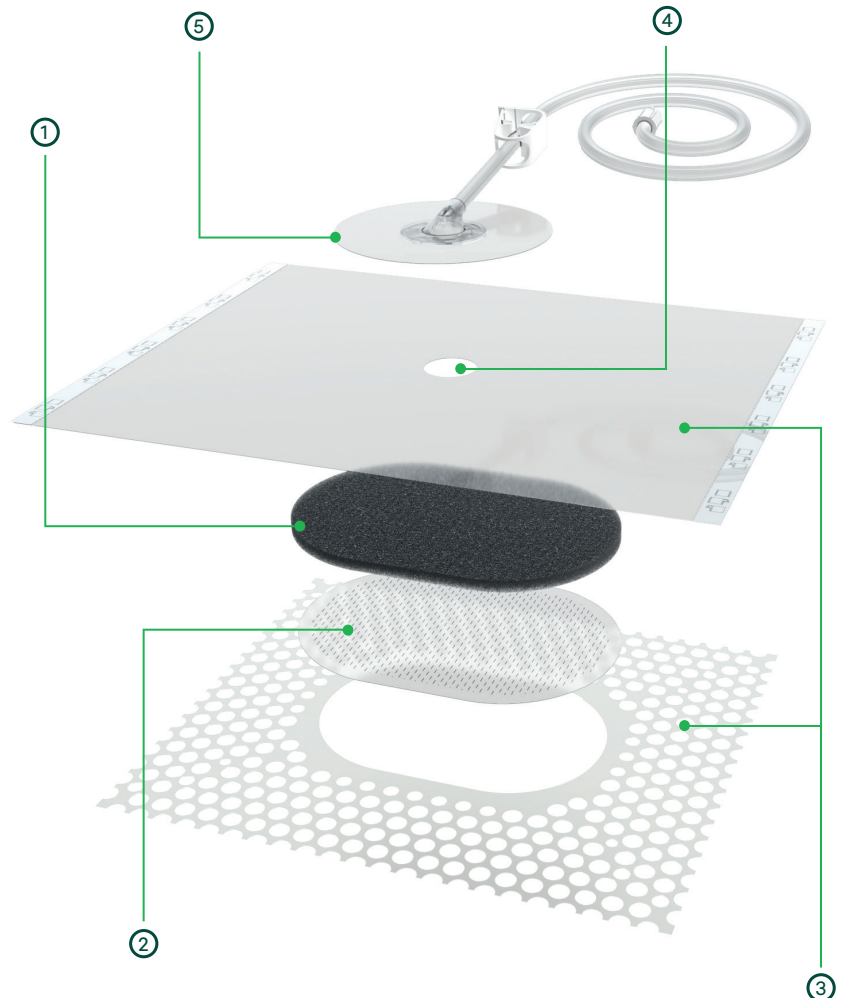

Tot 7 dagen draagtijd

De geperforeerde, niet-klevende laag zorgt voor een langere draagtijd en minder verbandwissels, waardoor behandelaars met vertrouwen langdurige wondbehandeling met negatieve druk therapie kunnen leveren in een beschermde wondgenezende omgeving. Vergeleken met traditionele NPWT foamwondverbanden van Solventum heeft V.A.C.® Peel and Place Dressing een grotere vermindering van het wondvolume en tot 2,4 keer grotere dikte van het granulatieweefsel laten zien in een varkensmodel op open wonden.³

Gemiddeld 2 minuten aanbrengen⁺

Gepatenteerd, alles-in-één wondverband voor eenvoudig, tijdsbesparend aanbrengen met minder training. V.A.C.® Peel and Place Dressing is ontworpen om de gehele wond en de omliggende huid te bedekken en maakt het knippen van foam overbodig. Als onderdeel van een gesimuleerde gebruikstest hebben verpleegkundigen het als gemakkelijker in gebruik beoordeeld dan traditioneel NPWT-verband van Solventum.⁴ In een klantvoorkeurstest meldden 10 van de 10 patiënten geen pijn bij het verwijderen.⁵

Consistente zorg in alle instellingen

Het eenvoudige, veelzijdige ontwerp van V.A.C.® Peel and Place Dressing is compatibel met meerdere V.A.C.® Therapy-units, wat betekent dat de behandeling kan worden overgedragen aan andere zorginstellingen. Dit geeft behandelaars het vertrouwen dat wondbehandeling met negatieve druk therapie effectief kan worden uitgevoerd in verschillende zorginstellingen.

1. SAT-BSER-05-869347 VAC Peel and Place BSER. 510(k) K222859.

2. In een gesimuleerde gebruikstest met 12 verpleegkundigen en chirurgen. Gemiddelde tijd 01:48. SAT-MTF-05-995965 Marketing study for 3M V.A.C. Peel and Place dressing. 2023.

3. Informatie verkregen uit proeven op dieren is niet geëvalueerd op mensen. SAT-MTF-05-982101 Evaluation of VAC Peel and Place Dressing Concepts in Full-Thickness Excisional Wounds. 2023. Allen D, Robinson T, Schmidt M, Kieswetter K. Preclinical assessment of novel longer-duration wear negative pressure wound therapy dressing in a porcine model. *Wound Rep Reg*. 2013; 31:349–359.

4. In een gesimuleerde gebruikstest met 12 verpleegkundigen en chirurgen. De gemiddelde beoordeling 5,8 uit 7 op een Likert-schaal van 7 punten, vergeleken met Solventum™ traditioneel NPWT foamwondverband en een afzonderlijke hybride folie van siliconen en acryl met een gemiddelde beoordeling van 4,6 uit 7 op een Likert-schaal van 7 punten ($p=0,01$, wilcoxonrangtekentoets). SAT-MTF-05-995965 Marketing study for 3M V.A.C. Peel and Place dressing. 2023.

5. Persoonlijke enquête (2020); Klantvoorkeurstest onder 10 gebruikers die feedback gaven over hun ervaring in een ziekenhuis in Chili. De verbanden werden 4 tot 7 dagen gedragen voordat ze werden verwijderd. SAT-DOC-0000052106. 8005 Ganymede Customer Preference Test Post Market Consumer Survey Report. 2021.

Hoe te gebruiken

Overwegingen

V.A.C.® Peel and Place Dressing kan worden gebruikt bij chronische, acute, traumatische, subacute en dehiscente wonden, tweedegraadsbrandwonden, ulcera (zoals diabetische ulcera, decubitus of veneuze insufficiëntie), flappen en transplantaten.

V.A.C.® Peel and Place Dressing is niet geschikt voor wonden met een ondermijning dieper dan 2 cm, tunnelvorming of wonden die dieper zijn dan 6 cm. Gebruik een ander V.A.C.® Therapy Dressing als niet aan deze criteria wordt voldaan.

Lees en volg altijd de gedetailleerde Gebruiksaanwijzing en de belangrijke veiligheidsinformatie op de verpakking.


Beoordelen

Beoordeel de afmetingen en diepte van de wond om de juiste maat van het V.A.C.® Peel and Place-verband te bepalen (zie onderstaande tabel).

Het foamverband moet over alle randen van de wond heen reiken, zodat het op de huid rondom de wond komt te liggen. Neem de opvolgende maat verband als u niet zeker weet of het foamverband voldoende op de huid ligt.

Voor drukontlasting kiest u de maat Large met de offset SensaT.R.A.C. padopening.

Niet op wonden gebruiken met:

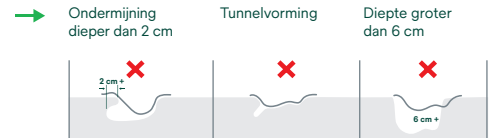

Verband vormt zich naar het wondbed

Als de wond groter is dan het verband, gebruik dan een maat groter

Het verband moet buiten de wondrand reiken




Plaatsen



Plaats het verband met de voorgesneden SensaT.R.A.C. pad opening naar boven gericht. Laat een folierand van minimaal 5 cm over voor het afdichten.

Controleren

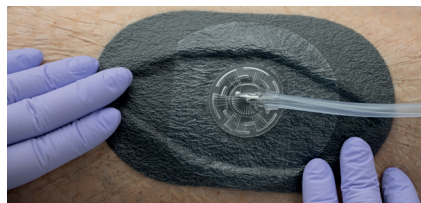

Controleer de initiële plaatsing en herpositioneer indien nodig. Strijk vervolgens eventuele kreukels glad, druk de folierand aan en verwijder de strips om een afdichting te creëren.

Verbinden



Verwijder beide beschermlagen en breng de SensaT.R.A.C. pad aan over het midden van het voorgesneden gat. Sluit de slang aan op de V.A.C.® unit en start de behandeling.

Verwijderen

Dankzij het geïntegreerde ontwerp kan de V.A.C.® Peel and Place Dressing tot wel zeven dagen worden gedragen. Wanneer het tijd is om het verband te verwijderen of te wisselen, verwijdt u het verband voorzichtig van de wond. Gebruik hierbij steriel water of een normale fysiologische zoutoplossing als het verband aan de wond kleeft.

Bestelinformatie en instructies

	Productnaam en SKU	Maximale wonddiepte	Maximale wondgrootte	Totale verbandgrootte	Plaats van voorgesneden gat	Verbanden/doos
Solventum™ V.A.C.® Peel and Place verbandset	Small EZ5SML	2 cm of minder	6,1 cm x 8,6 cm	16,9 cm x 20,6 cm	Midden	Maateenheid is doos van 5 (C05) 5 verbanden per doos
	Medium EZ5MED	4 cm of minder	11,1 cm x 16,6 cm	23,7 cm x 29,2 cm	Midden	
	Large EZ5LRG	6 cm of minder	13,6 cm x 24,2 cm	26 cm x 35,6 cm	Offset	

Compatibel met 3M™ V.A.C.® Ulta Therapy Unit, 3M™ ActiV.A.C.™ Therapy Unit, 3M™ Prevena™ Plus 125 Therapy Unit.

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing van het product voordat u het product gebruikt. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.



Bekijk de video met instructies voor het aanbrengen

Distributed by:

GD Medical
Park Forum 1057,
NL-5657 HJ Eindhoven
Tel +31 (0) 40 3031 099
customerservice@gdmedical.nl
www.gdmedical.nl

GD Medical Belgium
Rue Abbé Cuyppers 3
1040 Brussel
Tel +32 (0) 2 808 58 80
customerservice@gdmedical.be
www.gdmedical.be

© 2025 Solventum. Solventum, het S logo en andere handelsmerken zijn wereldwijde handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Solventum. 3M, het 3M logo en andere handelsmerken zijn wereldwijde handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. OMG1538128.